

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

1. Информация и рекомендации по безопасному использованию	4
2. Назначение изделия	5
3. Основные технические характеристики	6
4. Комплектность	8
5. Органы управления и индикации электрокардиографа	10
5.1. Верхняя панель	10
5.2. Правая боковая панель	13
5.3. Задняя панель	14
5.4. Нижняя панель	15
6. Подготовка к работе	16
6.1. Выбор места для установки электрокардиографа	16
6.2. Подсоединение питания	16
6.3. Заправка бумаги	17
Заправка рулонной бумаги	17
Заправка бумаги в пачках	18
6.4. Подключение кабеля электродного	19
6.5. Включение электрокардиографа и зарядка аккумулятора	19
6.6. Подключение внешних USB устройств	20
Подключение клавиатуры	20
Подключение внешней USB флэш-памяти	20
Подключение внешнего принтера	21
6.7. Подключение к компьютеру	21
7. Дисплей и управление электрокардиографом	22
7.1. Управление электрокардиографом в основной экранной форме	22
7.2. Описание меню и изменение настроек электрокардиографа	26
Изменение информации о пользователе	26
Изменение настроек печати	27
Изменение настроек ритма	28
Выбор системы отведений	28
Изменение настроек записи в память/передачи	28
Изменение прочих настроек	28
Печать настроек	29
Возврат к заводским настройкам	29
Выход из меню настроек	30
8. Регистрация пациента	31
9. Наложение электродов	32
9.1. Подготовка к наложению электродов	32
9.2. Наложение электродов для снятия стандартной ЭКГ	32

9.3. Наложение электродов для снятия ЭКГ по Кабрера	33
9.4. Наложение электродов для снятия ЭКГ по Нэбу	33
9.5. Наложение электродов для снятия ЭКГ по Франку	34
9.6. Наложение электродов при пользовательской системе отведений	34
9.7. Снятие и очистка электродов	35
9.8. Проверка кабеля электродного	35
10. Регистрация ЭКГ	36
10.1. Подготовка к регистрации ЭКГ	36
10.2. Режимы автоматической регистрации ЭКГ	36
Автоматическая регистрация ЭКГ	36
Автоматическая регистрация ЭКГ в режиме АВТО СТАРТ	37
Автоматическая регистрация ЭКГ по аритмии	37
Автоматическая регистрация ЭКГ с добавлением ритма	38
Периодическая регистрация ЭКГ	38
Анализ ЭКГ	39
Полный формат анализа ЭКГ	40
Краткий формат анализа ЭКГ	41
Режим регистрации без печати	41
Печать копии	41
Печать на внешнем принтере	41
10.3. Ручная регистрация ЭКГ	42
10.4. Регистрация ритма	42
10.5. Применение электрокардиографа при дефибрилляции	44
11. Работа с памятью	45
Общие сведения	45
Запись ЭКГ в память	45
Просмотр содержимого памяти	45
Печать записи ЭКГ	47
Передача записи ЭКГ	47
Удаление записи ЭКГ	48
Копирование записи ЭКГ на внешнюю USB флэш-память	48
12. Техническое обслуживание	49
12.1. Общие сведения	49
12.2. Очистка	49
12.3. Дезинфекция	50
12.4. Обслуживание встроенного аккумулятора	50
12.5. Периодическая калибровка	50
13. Возможные проблемы и способы их устранения	51
Помехи от электросети	51
Помехи от мышечной дрожи (тремор)	51
Дрейф ЭКГ	52

14. Хранение	54
15. Транспортирование	54
16. Утилизация	54
17. Гарантии изготовителя	55
18. Свидетельство о приемке	55
19. Сертификат о калибровке	56
20. Данные о вводе в эксплуатацию	56
21. Данные о калибровках	57

Приложения:

1. Технические характеристики	58
2. Методы измерения амплитуд и длительностей элементов ЭКГ	62
3. Список основных синдромальных заключений и критериев.....	63
4. Нормы для формирования оценки вариабельности ритма	78
5. Настройка беспроводной связи	79
6. Работа в режиме телефона	80
7. Работа в режиме приема результатов анализа ЭКГ с удаленного пульта ..	81
8. Методика периодической калибровки	82
9. Электромагнитная совместимость	88
10. Сведения о ремонте изделия	92

Настоящее руководство предназначено для ознакомления с правилами эксплуатации, а также для руководства при техническом обслуживании, транспортировании и хранении Электрокардиографа 3-6-12 канального с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д» вариант исполнения «ЭК12Т-01-«Р-Д»/141» (в дальнейшем ЭК).

Объем сведений и иллюстраций, приведенных в данном руководстве, обеспечивает правильную эксплуатацию ЭК и всех его узлов.

К работе с ЭК допускается специалист, имеющий специальную медицинскую подготовку в области электрокардиографии. Пользоваться ЭК до ознакомления с настоящим руководством не разрешается.

1 ИНФОРМАЦИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Этот раздел содержит важную информацию о мерах предосторожности при использовании ЭК. Также внимательно прочтите информацию о безопасности, приведенную в других разделах данного руководства.

ВАЖНО! Перед использованием ЭК внимательно прочитайте данное руководство и особенно всю предупредительную информацию, выделенную жирным шрифтом.

По безопасности ЭК соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1 и выполнен по классу защиты II, изделие с внутренним источником питания типа CF.

По безопасности с учетом основных функциональных характеристик ЭК соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-2-25 для анализирующих многоканальных электрокардиографов.

По электромагнитной совместимости ЭК соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.

При подключении ЭК к компьютеру комплекс соответствует требованиям ГОСТ IEC 60601-1-1. Компьютер должен находиться на расстоянии не менее 1,5 метров от пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не применяйте ЭК в присутствии горючего анестезирующего газа или в атмосфере с высокой концентрацией кислорода, это может привести к взрыву или пожару.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭК защищен от разряда дефибриллятора в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-25 только при использовании кабеля электродного МТЦ.30.03.501 производства ООО «НПП «Монитор», входящего в комплект поставки. Не используйте ЭК с другими электродными кабелями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭК не предусматривает совместное использование с высокочастотным электрохирургическим оборудованием, т.к. это может привести к нежелательным результатам. Отсоедините кабель пациента от электрокардиографа или отсоедините кабели от пациента до выполнения любой процедуры с применением высокочастотного хирургического оборудования.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЭК не подходит для прямого применения на сердце.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Некоторые импульсы кардиостимуляторов с трудом поддаются определению. В этом случае импульсы будут приняты за QRS комплекс, что может привести к неверным измерениям значения ЧСС и к невозможности определения некоторых видов аритмий и остановки сердца. Ведите тщательное наблюдение за пациентами с водителем ритма.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открытая крышка бумажного отсека позволяет получить доступ к внутренним частям ЭК и поэтому требует осторожности. При замене бумаги ЭК не должен быть подключен к сети и к пациенту.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что напряжение в электросети соответствует напряжению, указанному на блоке питания ЭК. Для эксплуатации ЭК не требуется заземления.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: К разъему питания постоянного тока $\equiv$ 12-16В 30ВА с меткой $\triangle$ должен подключаться только источник питания из комплекта поставки ЭК или питание от аккумулятора автомобиля скорой помощи. При подключении к этому разъему источника питания, не соответствующего требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1, возможно поражение током пациента или оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте замыкания контактов разъема аккумуляторной батареи, не оставляйте батарею вблизи открытого огня.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Возможен риск суммирования токов утечки при взаимном соединении ЭК с другими медицинскими изделиями.

2 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

2.1 ЭК предназначен для регистрации и измерения биоэлектрических потенциалов сердца с целью проведения электрокардиографических обследований в качестве портативного электрокардиографа для взрослых и детей.

2.2 ЭК предназначен для применения в кабинетах функциональной диагностики (кабинетах ЭКГ) поликлиник, клиник, больниц, отделений кардиореанимации и интенсивной терапии кардиологических отделений больниц, в других медицинских учреждениях, а также для работы в автомобиле скорой медицинской помощи.

2.3 Условия эксплуатации ЭК :

- температура окружающего воздуха от 10 до 40 °С;
- относительная влажность 80% при температуре 25°С и при более низких температурах без конденсации влаги;
- атмосферное давление 84÷106,7 кПа (630÷800 мм рт. ст.).

3 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1 **ЭК** соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-2-25, ГОСТ Р 50444, ТУ 2660-005-24149103-2018 и комплекта конструкторской документации.

3.2 Основные характеристики **ЭК** приведены в Таблице 3.1.

Таблица 3.1. Основные характеристики **ЭК**

№ п/п	Наименование	Значение
1	Соответствие конструкторской документации	МТЦ. 31.00.000
2	Питание от сети переменного тока	от 85 до 242В, 50 или 60Гц
3	Питание от бортовой сети автомобиля	от 12 до 16В
4	Питание от встроенной аккумуляторной батареи	7,4В ± 1,2В
5	Потребляемая мощность	не более 30ВА
6	Масса в полном комплекте поставки	не более 5,0 кг
7	Масса блока электрокардиографического	не более 1,2 кг
8	Габаритные размеры блока электрокардиографического	не более 260×180×70 мм
9	Тип дисплея	цветной TFT
10	Размер экрана по диагонали	141 мм ± 2%
11	Разрешающая способность	640х480 точек
12	Регистрация в системе отведений	стандартные, по Нэбу, по Кабрера и по Франку
13	Разрешающая способность печати при скорости 25 мм/с	64 точки/мм вдоль бумаги 8 точек/мм поперек бумаги
14	Тип термобумаги	рулонная, в пачках
15	Ширина термобумаги	110 мм
16	Память	внутренняя до 500 ЭКГ, внешняя – USB флэш
17	Возможные интерфейсы для связи с компьютером	RS 232, USB, GSM, Bluetooth
18	Работа в автомобиле скорой медицинской помощи	да
19	Одновременная регистрация 12 отведений	поперек бумаги

3.3 **ЭК** обеспечивает следующие виды регистраций:

1) регистрацию 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать поперек бумаги с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 40 мм;

2) регистрацию 12-ти отведений и вывод их на печать по 6 отведений вдоль бумаги в ручном или автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 20 мм;

3) регистрацию 12-ти отведений и вывод их на печать по 3 отведения или по 3 отведения плюс "ритм" вдоль бумаги в ручном или автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 40 мм;

4) регистрацию 12-ти отведений в "режиме проб" – многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в диапазоне от 1 до 90 мин. В течение заданного времени наблюдения 5-180 мин;

5) регистрацию ритма в течение заданного времени;

6) основные параметры съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение антитреморного фильтра и антидрейфового фильтра, ЧСС, дата, время и параметры ЭКГ регистрируются рядом с ЭКГ.

3.4 На дисплее прибора отображаются ЭКГ, параметры режима съема, ЧСС, меню, состояние аккумулятора, обрыв электродов, выбранные фильтры, значения усиления, скорости, формат отведений, виды анализа ЭКГ и другие параметры. **ЭК** может иметь и другие сервисные функции.

3.5 При нарушении контакта электродов **ЭК** обеспечивает индикацию наименования электрода с нарушенным контактом.

3.6 В **ЭК** измеряются и регистрируются амплитуды зубцов P, Q, R, S, ST, T во всех отведениях.

3.7 В **ЭК** измеряются и регистрируются во всех отведениях интервалы RR, PQ (PR), QT, QRS, длительности зубцов P, Q, R и S.

3.8 Вычисляется угол α (α QRS) ($\arctg$ отношения суммы амплитуд зубцов Q, R, S, R', S' в отведении aVF к сумме этих же зубцов в отведении I) в диапазоне от -180° до 180° с погрешностью $\pm 1^\circ$.

3.9 **ЭК** регистрирует следующую справочную информацию:

- заключение о положении электрической оси сердца (ЭОС);
- заключение о смещении сегмента ST с указанием отведений, в которых обнаружено смещение;
- заключение об амплитудно-временных параметрах комплекса QRS (контурного анализа) с указанием отведений, в которых обнаружены отклонения.

3.10 В **ЭК** обеспечиваются:

- заключение о регулярности ритма, построение ритмограммы и скаттерограммы;
- печать ритма по одному или трем выбранным отведениям;
- печать ФИО пациента, наименование лечебного учреждения, ФИО врача;
- запоминание до 10 профилей (фамилии врачей и установленные ими настройки);
- автостарт при подключении последнего электрода;
- подключение к разъему USB A внешней стандартной компьютерной клавиатуры или флэш-памяти.

3.11 При подключении **ЭК** к компьютеру через интерфейс RS 232, USB или Bluetooth обеспечивается работа установленных на компьютере из комплекта поставки программных модулей «ЭКГ-Ревю», «ArMaSoft-12-Cardio», «Stress-12-Cardio», а при наличии модуля GSM программного модуля «ArMaSoft-12-Tele». Работа модулей осуществляется в соответствии с технической документацией на них.

Подробные технические характеристики приведены в Приложении 1.

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки ЭК приведен в таблице:

№	Наименование	Обозначение документа	Производитель	Кол-во шт.
1	Блок электрокардиографический	МТЦ.31.01.000	ООО «НПП «Монитор», Россия	1
2	Блок питания	GSM36B15-P1J	«Mean Well», Тайвань	1
3	Электроды электрокардиографические хлорсеребряные с элементами крепления ЭКХ-01, ЭКХ-03	РУ № ФСЗ 2012/11643	ООО «НПК Элимед», Украина	10
4	Модуль COM-порта (при необходимости)	МТЦ.31.06.501	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
5	Модуль USB порта (при необходимости)	МТЦ.31.04.501	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
6	Модуль GSM (при необходимости)	МТЦ.31.05.501	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
7	Адаптер COM-Bluetooth (при необходимости)	Parani SD1000	«Sena», Корея	-
8	Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии «ЛР-Регистрон» 110мм в рулоне	РУ № ФСР 2010/07976	ЗАО «Регистрон», Россия	1
9	Ленты регистрационные бумажные с тепловой записью для электрокардиографии «ЛР-Регистрон» 110мм в пачке (при необходимости)	РУ № ФСР 2010/07976	ЗАО «Регистрон», Россия	-
10	Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ и других электрофизиологических исследований «Униспрей» (при необходимости)	РУ № ФСР 2010/08253	ООО «Гельтек-Медика», Россия	1
11	Программный модуль регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ-Ревю» и руководство пользователя на диске, РУ № РЗН 2017/5268 от 20 января 2017 года (при необходимости)	МТЦ.30.07.504	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
12	USB ключ для программного модуля регистрации и архивации ЭКГ «ЭКГ-Ревю» (при необходимости)		ООО «НПП «Монитор», Россия	-
13	Программный модуль анализа ЭКГ покоя «ArMaSoft-12-Cardio» и руководство пользователя на диске, РУ № РЗН 2017/5268 от 20 января 2017 года (при необходимости)	МТЦ.30.07.502	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
14	USB ключ для программного модуля ЭКГ покоя «ArMaSoft-12-Cardio» (при необходимости)		ООО «НПП «Монитор», Россия	-
15	Программный модуль удаленного приема и анализа ЭКГ «ArMaSoft-12-Tele» и руководство пользователя на диске, РУ № РЗН 2017/5268 от 20 января 2017 года (при необходимости)	МТЦ.30.07.503	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
16	USB ключ для программного модуля		ООО «НПП	-

	удаленного приема и анализа ЭКГ «ArMaSoft-12-Tele» (при необходимости)		«Монитор», Россия	
17	Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах ЭК12Т-01-«Р-Д» вариант исполнения ЭК12Т-01-«Р-Д»/141. Руководство по эксплуатации.	МТЦ.31.00.000 РЭ	ООО «НПП «Монитор», Россия	1
18	Кабель электродный	МТЦ.30.03.501	ООО «НПП «Монитор», Россия	1
19	Кабель электродный для одноразовых электродов (при необходимости)	МТЦ.30.03.502	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
20	Аккумулятор	МТЦ.31.00.501	ООО «НПП «Монитор», Россия	1
21	Кабель питания постоянного тока (при необходимости)	МТЦ.30.10.601	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
22	USB флэш-накопитель (при необходимости)		«Transcend», Тайвань	-
23	Внешняя клавиатура (при необходимости)		«Logitech», Китай	-
24	Аудиогарнитура (при необходимости)		«A4tech», Китай или Тайвань	-
25	Адаптер под термобумагу (при необходимости)	МТЦ.30.12.003	ООО «НПП «Монитор», Россия	-
26	Очиститель термоголовки (при необходимости)		«ZEBRA», Китай	-
27	Кабель COM-порта 1,8 м (при необходимости)		«Gembird», Китай	-
28	Шнур USB-A -USB-B 3м (при необходимости)		Hsuan Mao Technology Co., Ltd, Китай	-

Принадлежности

1	Сумка	МТЦ.31.05.301	ООО "НПП "Монитор", Россия	1
---	-------	---------------	----------------------------	---

Примечания

1. Количество поставляемых при необходимости компонентов определяется заказчиком.

2. Покупные изделия могут быть заменены на аналогичные, не уступающие по своим характеристикам. По согласованию с заказчиком перечень входящих в комплект поставки покупных изделий может быть расширен. По отдельному заказу могут поставляться детские электроды.


3. Модуль COM-порта (или модуль USB или GSM), приобретенный по отдельному заказу, устанавливается в блок электрокардиографический. Если ЭК приобретен с двумя или тремя модулями, то один из модулей устанавливается в блок электрокардиографический, а остальные поставляются отдельно. При необходимости Вы можете сами установить нужный Вам модуль в ЭК.

4. Вместе с модулем GSM может поставляться телефонная гарнитура.

5. Аккумулятор поставляется установленным в блок электрокардиографический.

5 ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНДИКАЦИИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА

5.1 ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ

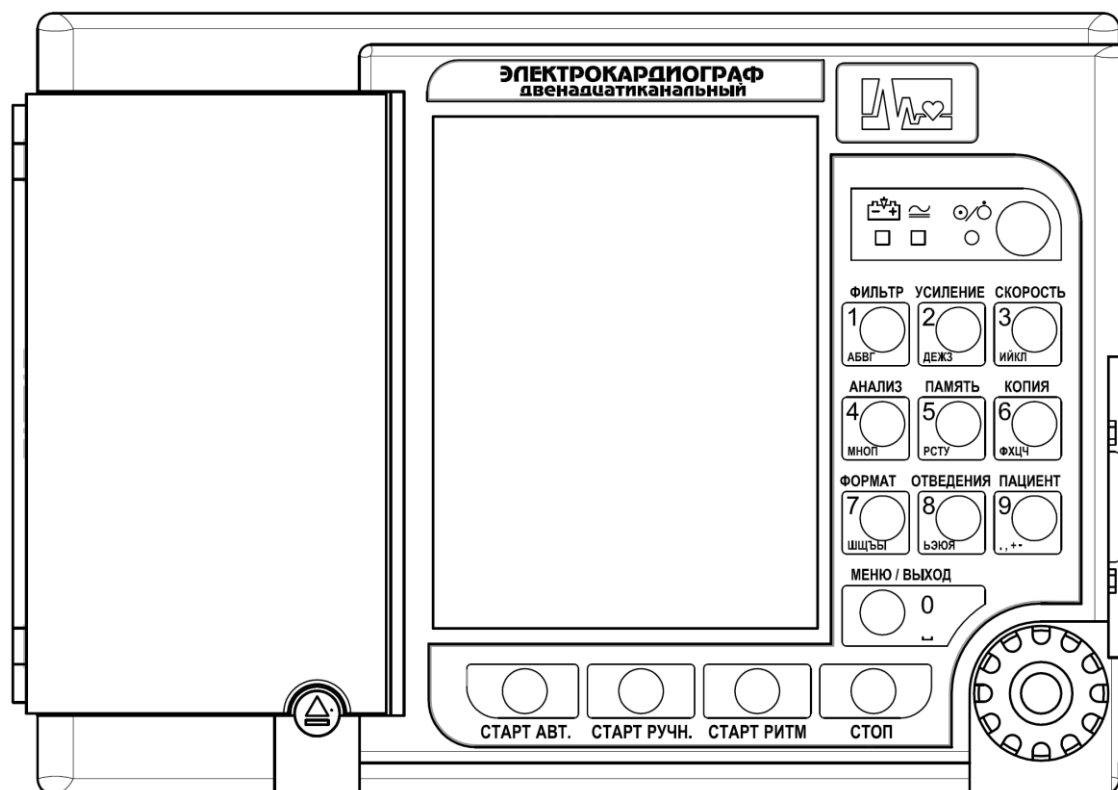

На верхней панели **ЭК** расположены:

- **сенсорный экран цветного жидкокристаллического дисплея;**
- **кнопка “ $\odot/\odot$ ”** (работа/ожидание). Нажатием на эту кнопку в течение 1-2 секунд можно включить **ЭК**. При включении **ЭК** светится индикатор “ $\odot/\odot$ ” зеленого цвета. Повторное нажатие на эту кнопку переводит **ЭК** в режим ожидания, при этом выключается экран **ЭК** и гаснет индикатор “ $\odot/\odot$ ”. В этом режиме **ЭК** выключен, но продолжается процесс заряда встроенных аккумуляторов, если они не полностью заряжены;
- **светодиодный индикатор “ $\cong$ ”** зеленого цвета. Этот индикатор светится, если на **ЭК** подано внешнее питание от сети переменного тока или питание постоянного тока от аккумулятора автомобиля скорой помощи;
- **светодиодный индикатор “ батарейка ”** желтого цвета. Этот индикатор светится, если идет процесс заряда аккумуляторов;
- **кнопка “ $\triangle$ ”** для открывания крышки бумажного отсека;
- **манипулятор** для выбора и изменения режимов работы **ЭК**. Ручку манипулятора можно вращать и нажимать. Это позволяет войти в меню, выбрать нужный пункт и внести в него изменения;
- **кнопка СТАРТ АВТ.**

Если все электроды наложены на пациента и есть бумага, то при нажатии на эту кнопку начинается регистрация ЭКГ в автоматическом режиме.

При просмотре записанных в память ЭКГ позволяет произвести сортировку записей по фамилии пациента;

- **кнопка СТАРТ РУЧН.**

При нажатии на эту кнопку начинается регистрация выбранной группы отведений ЭКГ в ручном режиме.

При просмотре записанных в память ЭКГ позволяет произвести сортировку записей по дате и времени;

- **кнопка СТАРТ РИТМ**

При нажатии на эту кнопку начинается регистрация ритма в выбранном в меню формате. При этом изменяется формат регистрации ЭКГ: выбирается формат **ЗАПИСЬ РИТМА** и этот формат остается после окончания регистрации ритма.

При просмотре записанных в память ЭКГ позволяет произвести сортировку записей по коду;

- **кнопка СТОП**

Если кнопку **СТОП** нажать в момент регистрации ЭКГ, то регистрация прекращается. Если регистрация ЭКГ не идет, то нажатие кнопки **СТОП** приводит к остановке кривых на экране **ЭК**, повторное нажатие кнопки **СТОП** возобновляет движение кривых. На время остановки кривых на экране появляется сообщение **<< СТОП >>**.

При просмотре записанных в память ЭКГ позволяет отобразить записи без сортировки;

- **кнопка ФИЛЬТР, 1, АБВГ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку происходит циклическое изменение состояния фильтров ЭКГ сигнала. Выбранное состояние фильтров отображается в основной экранной форме.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №1 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **1** и букв **А,Б,В,Г**.

Если включить **ЭК** при нажатой этой кнопке, то **ЭК** перейдет в меню **НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ**;

- **кнопка УСИЛЕНИЕ, 2, ДЕЖЗ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку происходит циклическое изменение значения усиления ЭКГ сигнала. Выбранное значение усиления отображается в основной экранной форме.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №2 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **2** и букв **Д,Е,Ж,З**;

- **кнопка СКОРОСТЬ, 3, ИЙКЛ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку происходит циклическое изменение значения скорости развертки ЭКГ сигнала. Выбранное значение скорости отображается в основной экранной форме.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №3 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **3** и букв **И,Й,К,Л**;

- **кнопка АНАЛИЗ, 4, МНОП**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку происходит циклическое изменение формата печати анализа ЭКГ. Выбранный формат печати анализа ЭКГ отображается в основной экранной форме.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №4 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **4** и букв **М,Н,О,П**;

- **кнопка ПАМЯТЬ, 5, РСТУ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку вызывается экран работы с записанными в память ЭКГ.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №5 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **5** и букв **Р,С,Т,У**.

Если включить **ЭК** при нажатой этой кнопке, то **ЭК** перейдет в меню **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ** (если в **ЭК** установлен модуль GSM);

- **кнопка КОПИЯ, 6, ФХЦЧ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку происходит печать копии последней ЭКГ снятой в автоматическом режиме.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №6 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **6** и букв **Ф,Х,Ц,Ч**;

- **кнопка ФОРМАТ, 7, ШЩЪЫ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку происходит циклическое изменение формата печати ЭКГ в автоматическом режиме. Выбранный формат печати ЭКГ отображается в основной экранной форме.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №7 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **7** и букв **Ш,Щ,Ъ,Ы**;

- **кнопка ОТВЕДЕНИЯ, 8, ЪЭЮЯ**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку осуществляется циклическое изменение группы отведений ЭКГ, отображаемых на экране **ЭК**.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №8 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **8** и букв **Ъ,Э,Ю,Я**;

- **кнопка ПАЦИЕНТ, 9, ., +,-**

Если на экране **ЭК** отображается основная экранная форма, то при нажатии на эту кнопку вызывается экран ввода данных о пациенте.

Если на экране **ЭК** отображается меню, то при нажатии на эту кнопку осуществляется быстрый выбор врача №9 и всех настроек **ЭК**, установленных этим врачом.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **9** и знаков **., + -**;

- **кнопка МЕНЮ/ВЫХОД, 0, _ (знак пробела)**

Нажатие на эту кнопку позволяет входить в меню и возвращаться из меню в основную экранную форму.

Если выбран один из пунктов меню, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то этой кнопкой осуществляется ввод цифры **0** и знака пробела.

Нажатие кнопок и манипулятора сопровождается коротким звуковым сигналом, громкость которого регулируется вместе с громкостью звукового сигнала пульса пациента.


Внимание! Если действие кнопки в данный момент невозможно, то ее нажатие сопровождается **двойным звуковым сигналом**, например нажатие кнопки **ПАЦИЕНТ** во время печати **ЭКГ**.

Для управления работой **ЭК** кроме кнопок и манипулятора можно дополнительно воспользоваться сенсорным экраном.

Если выбран один из пунктов, связанный с вводом алфавитно-цифровой информации, то на экране **ЭК** появляется сенсорная клавиатура.

5.2 ПРАВАЯ БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ

Внешний вид правой боковой панели **ЭК** приведен на рисунке:

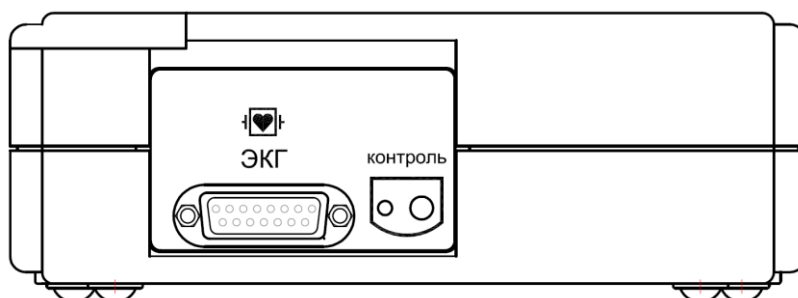


На правой боковой панели расположены следующие разъемы:

- разъем **ЭКГ** для подключения кабеля пациента;
- гнездо и светодиод **КОНТРОЛЬ** для проверки кабеля пациента.

5.3 ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Варианты внешнего вида задней панели **ЭК** приведены на рисунке:

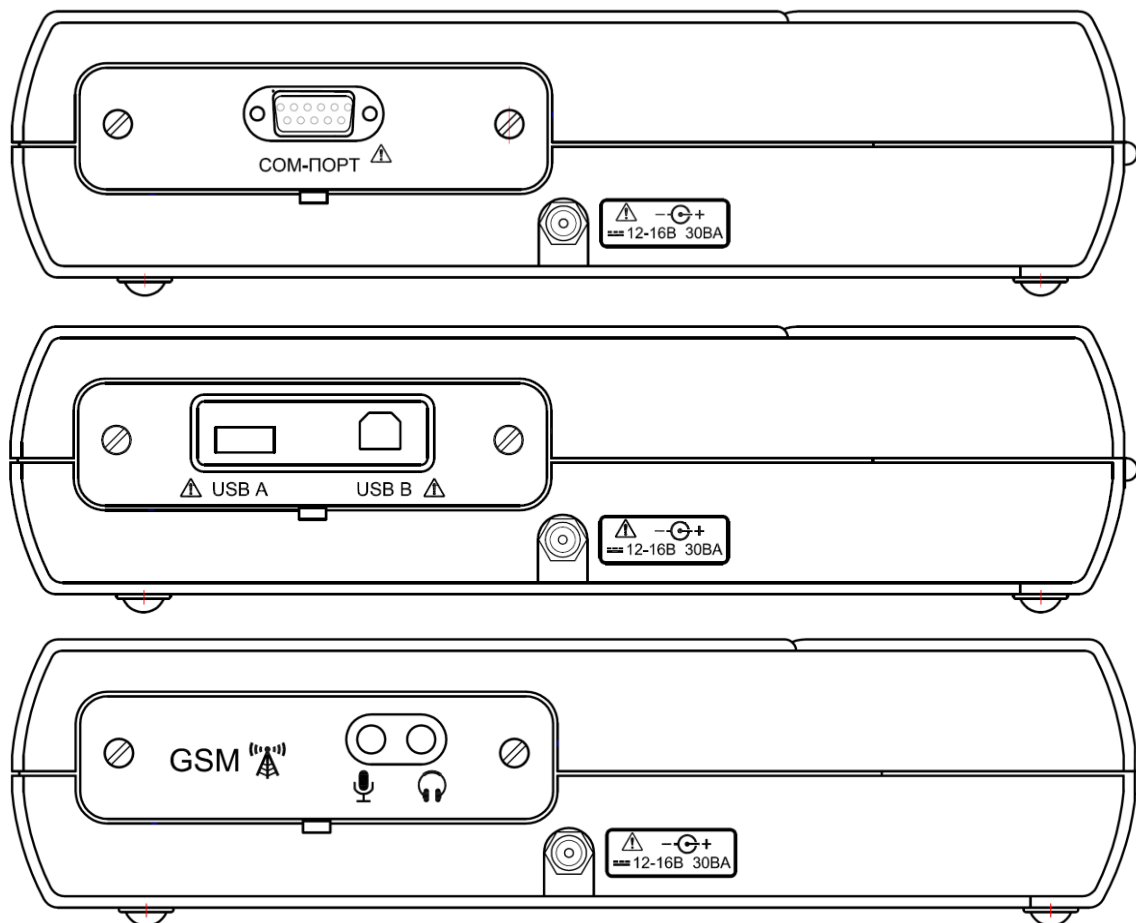

На задней панели расположен разъем питания **ЭК**, имеющий обозначение: **12-16В 30ВА** с меткой $\triangle$. К этому разъему должен подключаться только источник питания из комплекта поставки **ЭК** или питание от аккумулятора автомобиля скорой помощи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При подключении к этому разъему источника питания, не соответствующего требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1, возможно поражение током пациента или оператора.

На верхнем рисунке приведено изображение **ЭК** с установленным модулем COM-порта для связи с компьютером (устанавливается в **ЭК** по опции).


На среднем рисунке показан вид **ЭК** с установленным модулем USB для подключения внешних устройств (устанавливается в **ЭК** по опции).

На нижнем рисунке показан вид **ЭК** с установленным модулем GSM для передачи ЭКГ по каналам сотовой связи (устанавливается в **ЭК** по опции).

Если **ЭК** приобретен без модуля COM-порта и без модуля USB, то на задней боковой панели устанавливается заглушка без разъемов.

5.4 НИЖНЯЯ ПАНЕЛЬ

Внешний вид нижней панели **ЭК** приведен на рисунке:

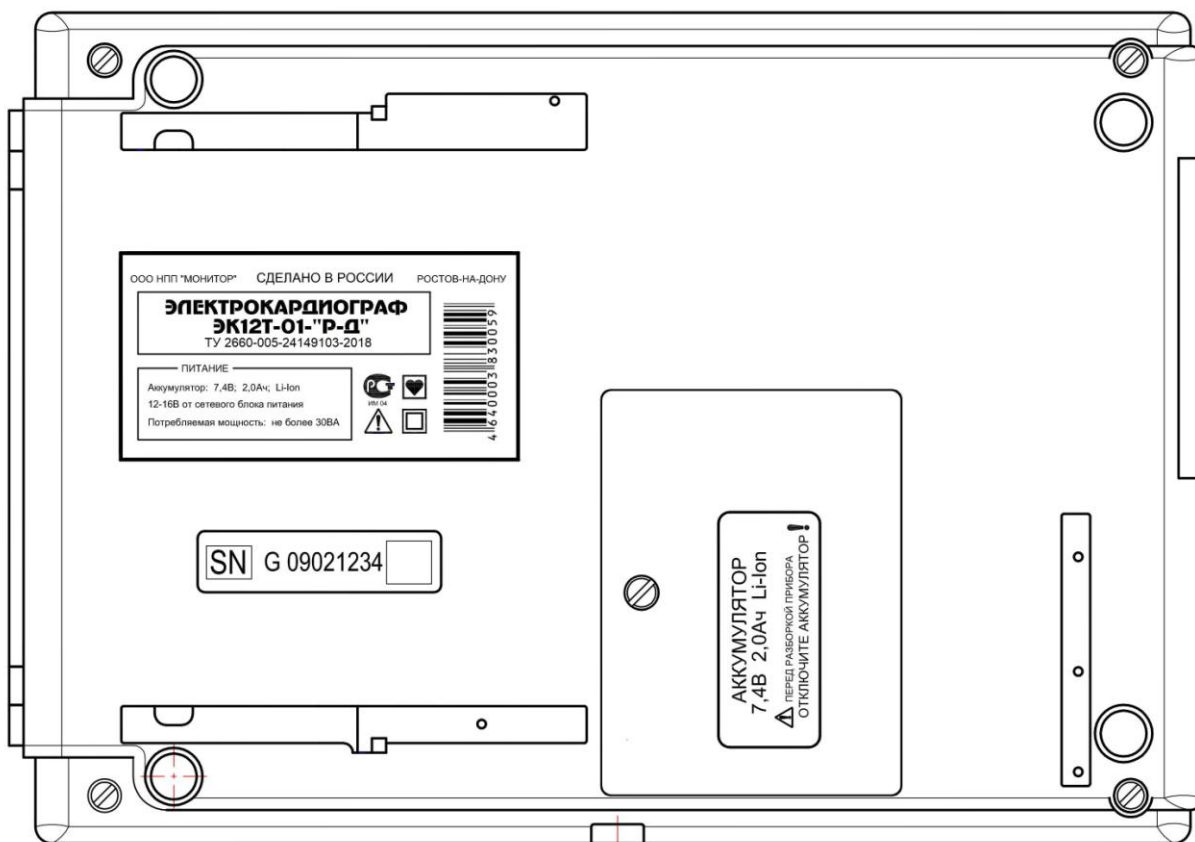

На нижней панели расположен аккумуляторный отсек **ЭК**.

6 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

6.1 ВЫБОР МЕСТА ДЛЯ УСТАНОВКИ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускается использование ЭК в присутствии горючего анестезирующего газа или в атмосфере с высокой концентрацией кислорода. Нарушение этого требования может привести к взрыву или пожару.

Устанавливайте **ЭК** на устойчивую, ровную горизонтальную поверхность.

Для обеспечения наилучшего качества отображения информации устанавливайте **ЭК** таким образом, чтобы на его экран не попадал прямой солнечный свет.

Не устанавливайте **ЭК** в местах, где на него может попасть жидкость. Если на **ЭК** случайно попала жидкость, то выключите **ЭК**, просушите его и проверьте его работоспособность.

ЭК соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2 по электромагнитной совместимости, то есть он не оказывает влияния на работу другого электронного оборудования, а также он защищен от влияния внешних электромагнитных полей. Однако, чтобы защитить **ЭК** от воздействия приборов, не соответствующих требованиям по электромагнитной совместимости, при выборе места установки **ЭК** необходимо соблюдать следующие правила:

- устанавливайте **ЭК** на максимальном удалении от силовых кабелей и источников статического электричества;
- устанавливайте **ЭК** на максимальном удалении от других диагностических или лечебных аппаратов (например, рентгеновских или ультразвуковых установок и др.), которые могут повлиять на качество ЭКГ;
- если нет возможности установить **ЭК** на максимальном удалении от других диагностических или лечебных аппаратов, необходимо выключить их на момент снятия ЭКГ;
- избегайте пользования сотовыми телефонами вблизи **ЭК**.

Наилучшие условия для съема ЭКГ:

- комната с температурой 20-25 °С. Это предотвратит мышечный тремор;
- питание **ЭК** от встроенных аккумуляторов, сетевой блок питания должен быть отключен от сети. Это уменьшит сетевые помехи.

6.2 ПОДСОЕДИНЕНИЕ ПИТАНИЯ

Переменный ток

Убедитесь в том, что напряжение в сети составляет 100-240 В переменного тока при частоте 50 или 60 Гц. Подключите сетевой блок питания к розетке и к разъему **12-16В 30ВА** на задней панели **ЭК**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте с **ЭК** сетевой источник питания только из комплекта поставки **ЭК**. При использовании источника питания, не соответствующего требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1, возможно поражение током пациента или оператора.

Время работы **ЭК** от полностью заряженной батареи – около 3 часов.

Постоянный ток

Вы можете использовать **ЭК** с питанием от бортовой сети специально оборудованного автомобиля скорой помощи с напряжением от 12 до 16 В

постоянного тока. Для этого подключите бортовую сеть к разъему **12-16В 30ВА** на задней панели **ЭК**. Соблюдайте полярность источника постоянного тока.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При питании от источника постоянного тока к разъему питания **12-16В 30ВА** с меткой $\triangle$ должен подключаться только источник питания автомобиля скорой помощи. При использовании питания, не соответствующего требованиям безопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1, возможно поражение током пациента или оператора.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При переносе **ЭК** в сумке вынимайте кабель питания из разъема **12-16В 30ВА** на задней панели **ЭК** во избежание повреждения разъема.

6.3 ЗАПРАВКА БУМАГИ

В **ЭК** может использоваться два типа термобумаги:

- рулонная бумага: ширина 110мм, длина не более 30м;
- бумага в пачках: ширина 110мм, длина листа 100мм, 200 листов в пачке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Открытая крышка бумажного отсека позволяет получить доступ к внутренним частям **ЭК** и поэтому требует осторожности. При замене бумаги **ЭК** не должен быть подключен к сети и к пациенту.



Заправка рулонной бумаги

Заправка рулонной бумаги в термопринтер осуществляется следующим образом:


- Нажмите на кнопку " $\triangle$ " и откройте крышку бумажного отсека;
- Возьмите рулон термобумаги и вставьте ось во внутреннюю втулку рулона. Отмотайте от рулона 10-15 сантиметров бумаги;

Внимание! Вставляя ось в рулон бумаги, убедитесь, что ось свободно поворачивается во внутренней втулке рулона бумаги. Если ось вращается с трудом, то электрокардиограф не будет печатать. В этом случае можно попробовать использовать рулон бумаги, не вставляя ось, но время работы **ЭК** от аккумуляторов сократится, так как мотору термопринтера придется прилагать больше усилий для протяжки бумаги.

- Вставьте рулон вместе с осью в бумажный отсек **ЭК**, так чтобы ось попала в предусмотренные для нее пазы.

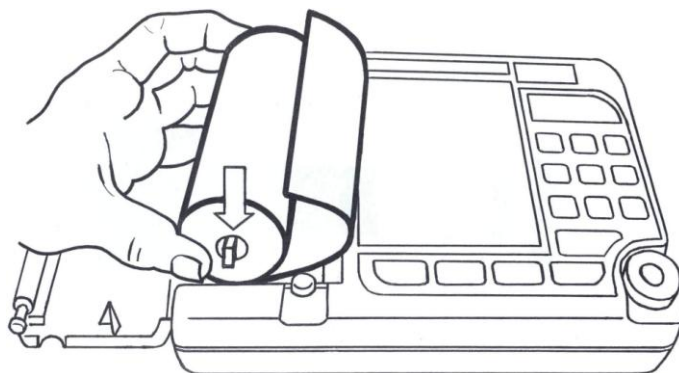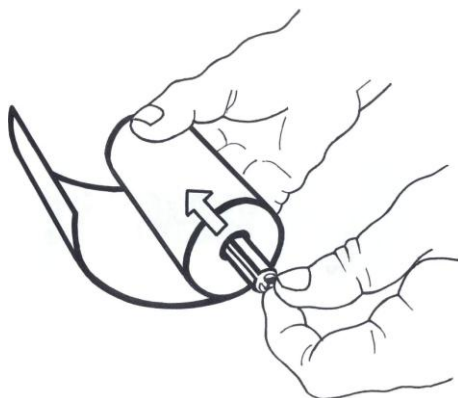


- Придерживая свободный конец бумаги, закройте крышку бумажного отсека. Крышка должна закрыться до упора, со щелчком. Термобумага должна выходить из **ЭК** термочувствительным слоем вверх (см. рисунок).

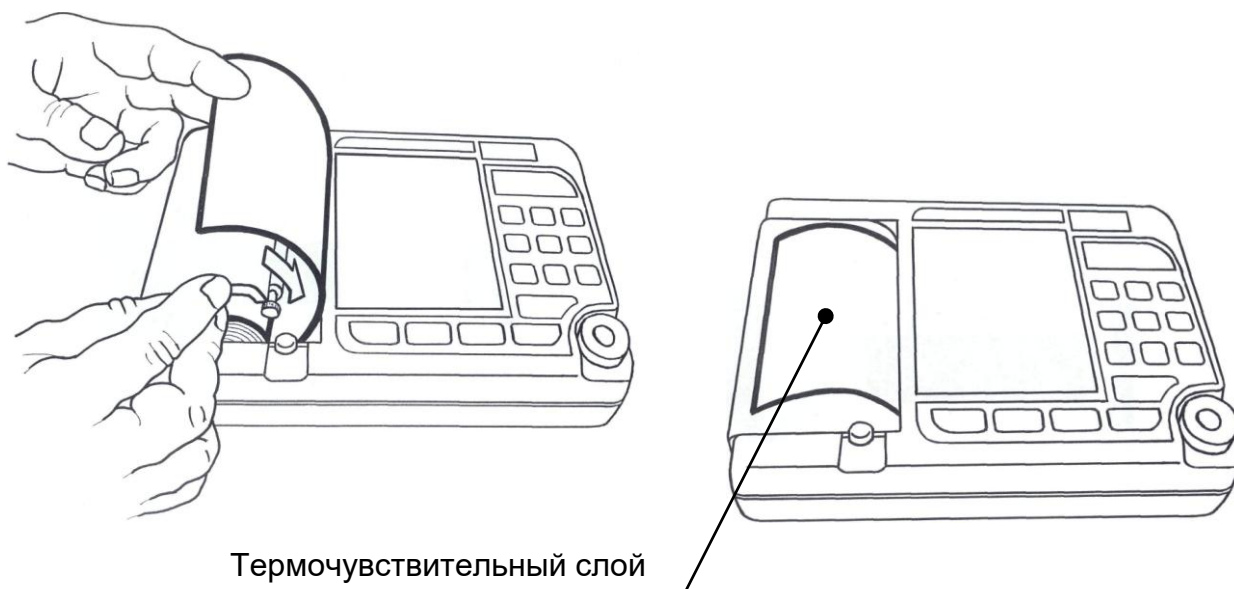

Заправка бумаги в пачках


Заправка пачки бумаги в термопринтер осуществляется следующим образом:

- Нажмите на кнопку “ $\triangle$ ” и откройте крышку бумажного отсека;
- Возьмите пачку термобумаги и вставьте ее в бумажный отсек, так чтобы черные метки на бумаге были расположены, как показано на рисунке.

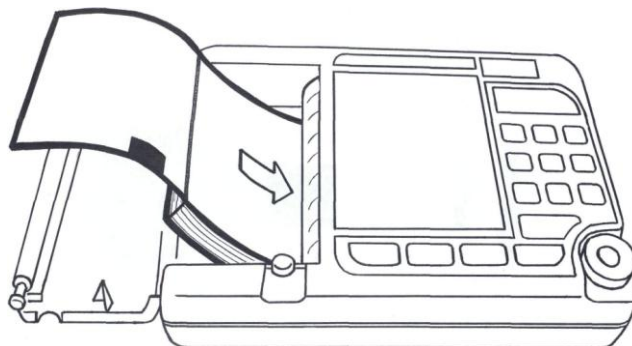

Внимание! Если метки будут расположены не так, как показано на рисунке, то **ЭК** не будет выравнивать ЭКГ по страницам и увеличится расход бумаги.

- Придерживая свободный конец бумаги, закройте крышку бумажного отсека. Крышка должна закрыться до упора, со щелчком. Термобумага должна выходить из **ЭК** термочувствительным слоем вверх (см. рисунок).

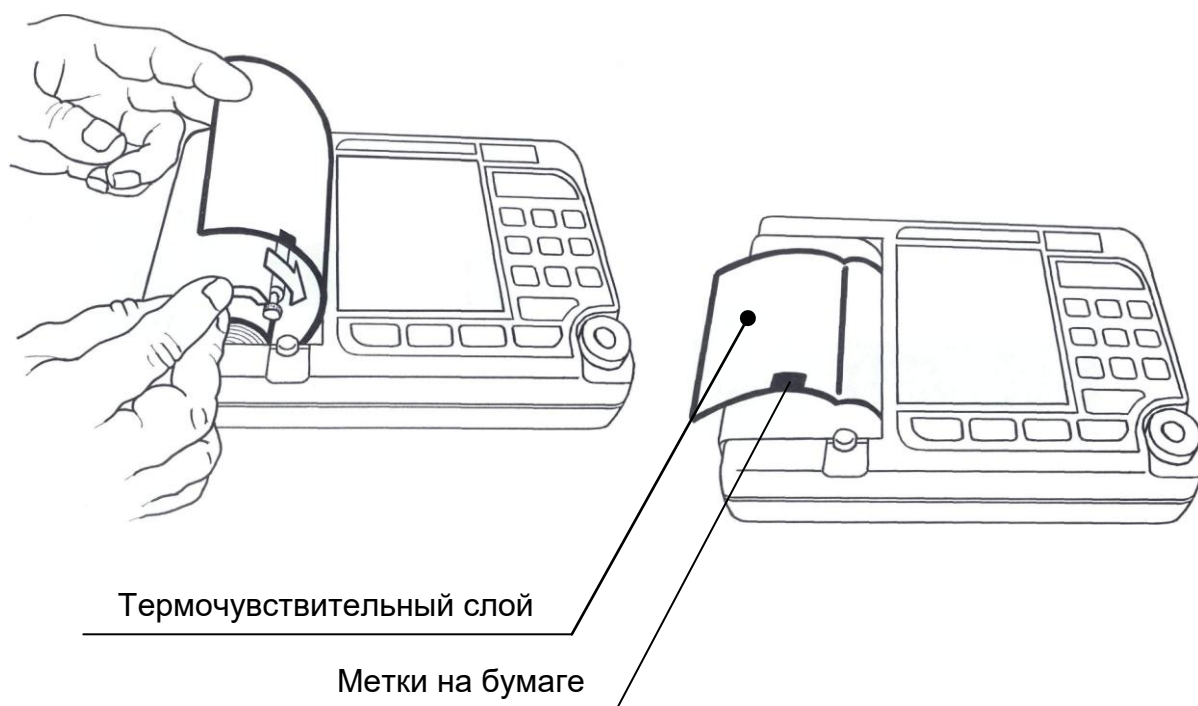

6.4 ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДНОГО

Вставьте 15-контактную вилку кабеля электродного в разъем “ЭКГ” прибора и закрепите ее винтами.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускается использование ЭК с другим кабелем электродным. Это может привести к неправильной работе ЭК и даже к выходу ЭК из строя, так как другой кабель электродный может не иметь встроенной защиты от импульсов дефибрилляции.

Внимание! Будьте внимательны при подключении разъема кабеля электродного, не прилагайте чрезмерных усилий и не дергайте за кабель при расстыковке разъемов!

Внимание! Если кабель электродный не подключен к электрокардиографу, то на экране электрокардиографа будет отображаться сообщение об обрыве электродов и печать ЭКГ будет невозможна ни в одном из автоматических режимов. Возможен запуск печати только в ручном режиме.

6.5 ВКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА И ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРА

Подключите **ЭК** к сети переменного тока. На верхней панели засветится индикатор “ $\cong$ ” зеленого цвета, а если аккумулятор не заряжен полностью, то автоматически начнется его заряд и засветится индикатор “ ⏻ ” желтого цвета.

Если аккумулятор заряжен, ЭК может работать от аккумулятора без подключения к сети. В этом случае на передней панели не будут светиться индикаторы "≈" и "⏻".

Внимание! На момент получения Вами ЭК, аккумуляторная батарея может быть разряжена. Она полностью зарядится за первые 6-7 часов после подключения ЭК к источнику переменного тока. Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор "⏻" погаснет. Во время зарядки аккумулятора ЭК можно использовать по назначению без всяких ограничений.

Для включения ЭК нажмите на кнопку "⏻" и удерживайте ее 1-2 секунды. При этом должен засветиться индикатор "⏻" зеленого цвета, а на экране ЭК через несколько секунд должна появиться основная экранная форма.

Повторным нажатием на кнопку "⏻" ЭК можно выключить (перевести в режим ожидания), экран ЭК и индикатор "⏻" погаснут.

Если ЭК подсоединен к сети переменного или постоянного тока, то после выключения кнопкой "⏻", индикатор "≈" будет светиться и будет продолжаться заряд аккумулятора.

Для экономии заряда аккумулятора (при отсутствии внешнего питания) в ЭК предусмотрено автоматическое выключение питания, если в течение 15 минут не была нажата ни одна кнопка. При разряде аккумулятора ниже 30% ЭК будет выключаться через 3 минуты, если не была нажата ни одна кнопка.

При наличии внешнего питания подсветка экрана ЭК выключается, если ЭК не подключен к пациенту, не подключен к компьютеру по USB, находится в основной экранной форме и в течение 15 минут не была нажата ни одна кнопка. Это сделано для продления срока службы дисплея ЭК.

Внимание! Если какой-либо индикатор или экран ЭК не светится должным образом, не используйте ЭК. Обратитесь к квалифицированному техническому персоналу.

6.6 ПОДКЛЮЧЕНИЕ ВНЕШНИХ USB УСТРОЙСТВ

Если Вы приобрели ЭК с модулем USB, то Вы можете подключать к нему внешние устройства, как описано ниже.

Подключение клавиатуры

К разъему "USB A" ЭК Вы можете подключить стандартную USB клавиатуру от компьютера.

Внимание! Подключение клавиатуры производите при выключенном ЭК.

С внешней клавиатурой Вам будет удобнее вводить данные пациента и информацию о пользователе. Также Вы можете использовать внешнюю клавиатуру при внесении изменений в меню ЭК и при работе с ЭКГ, записанными в память.

Переключение языка ввода – одновременное нажатие кнопок Ctrl и Shift.

Подключение внешней USB флэш-памяти

К разъему "USB A" ЭК Вы можете подключить стандартную USB флэш-память и использовать ее как дополнительную память для хранения записей ЭКГ. Также при помощи внешней USB флэш-памяти Вы можете перенести записи ЭКГ с одного электрокардиографа на другой.

Возможно одновременное подключение к ЭК внешней клавиатуры и внешней USB флэш-памяти, но в этом случае Вам необходимо приобрести стандартный разветвитель USB (хаб).

Подключение внешнего принтера

К разъему “USB A” ЭК Вы можете подключить внешний принтер для печати ЭКГ и результатов анализа на стандартной бумаге формата А4.

Внимание! Подключение внешнего принтера производите при выключенном ЭК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В соответствии с требованиями к безопасности медицинских электрических систем ГОСТ IEC 60601-1-1, располагайте принтер вне досягаемости пациента (на расстоянии не менее 1,5м), так как принтер не является изделием медицинской техники.

Внимание! ЭК может работать не со всеми типами принтеров. Приобретайте принтеры, протестированные на возможность работы с ЭК в ООО «НПП «Монитор».

При самостоятельной покупке принтера для работы с ЭК следует иметь в виду следующее:

- принтер должен иметь интерфейс USB;
- принтер должен поддерживать один из следующих языков программирования: PCL3, PCL4, PCL5, PCL6.

Перед самостоятельной покупкой необходимо согласовать выбранный Вами тип принтера с техническими специалистами ООО «НПП «Монитор».
Тел. (863) 243-61-11, 243-63-77, 231-04-01.

6.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОМПЬЮТЕРУ

Если Вы приобрели ЭК с модулем COM-порта или с модулем USB, то Вы можете подключить ЭК к компьютеру и использовать его в качестве компьютерного электрокардиографа (с модулем COM-порта) или для импорта ЭКГ из памяти ЭК в компьютер (с модулем USB).

В этом случае на компьютере должно быть установлено ПО для ПЭВМ, поставляемое ООО «НПП «Монитор».

ПО для ПЭВМ и кабель для подключения электрокардиографа к компьютеру в комплект поставки ЭК не входят и поставляются по отдельному заказу.

Подключение ЭК к COM-порту компьютера производится при помощи стандартного нуль-модемного кабеля, а к модулю USB – при помощи стандартного USB A-B кабеля.

Внимание! При подключении кабеля ЭК и компьютер должны быть выключены.

Порядок работы с ПО для ПЭВМ описан в руководстве пользователя на это программное обеспечение.


Если Вы приобрели ЭК с модулем GSM, то Вы можете передавать снятую ЭКГ на удаленный компьютер для проведения анализа и принимать результаты анализа по каналам сотовой связи.

Порядок работы с удаленным компьютером через модуль GSM описан в Приложениях 5-7 настоящего руководства по эксплуатации.

7 ДИСПЛЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОМ

7.1 УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФОМ В ОСНОВНОЙ ЭКРАННОЙ ФОРМЕ

При включении **ЭК** на дисплее появляется основная экранная форма, пример которой приведен на рисунке:

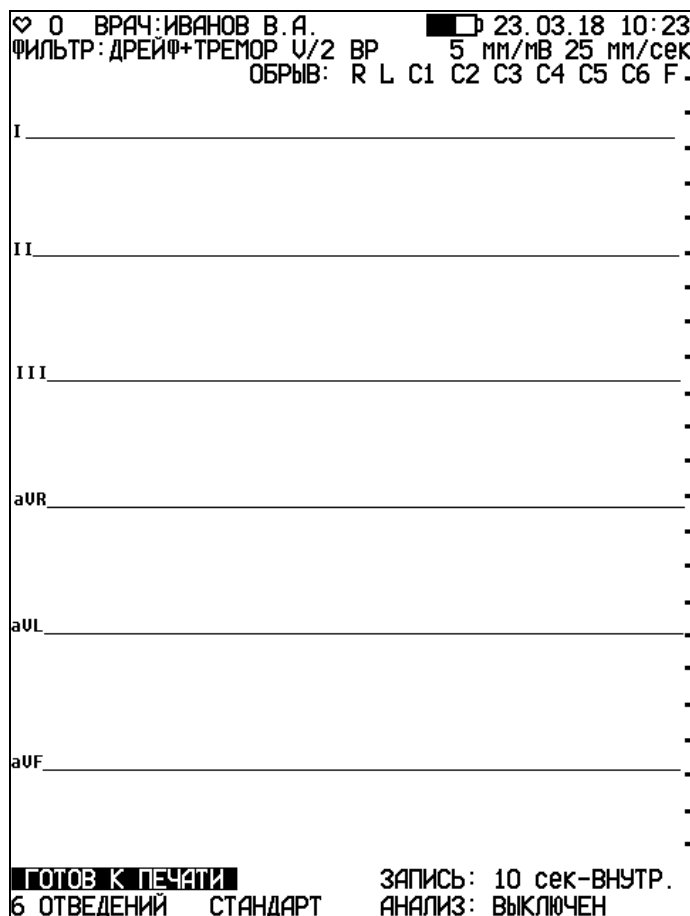

Пример основной экранной формы **ЭК**

В зависимости от настроек **ЭК** основная экранная форма может отличаться от приведенной на рисунке.

В основной экранной форме отображаются кривые ЭКГ и основные настройки **ЭК**.

Кривые ЭКГ

Количество кривых ЭКГ, отображаемых на экране, зависит от выбранного формата регистрации ЭКГ и может быть 3, 4, 6 или 12.

Если на экране отображается 3, 4 или 6 кривых, то посмотреть остальные отведения можно нажимая кнопку **ОТВЕДЕНИЯ** или вращая манипулятор.

В правой части экрана отображаются метки для оценки амплитуды ЭКГ сигнала, расстояние между соседними метками соответствует 1мВ.

Настройки ЭК

В верхней части экрана отображаются следующие настройки:

♥ 0	ВРАЧ: ИВАНОВ В.А.	23.03.18 10:23
ФИЛЬТР:	ДРЕЙФ+ТРЕМОР U/2 ВР	5 мм/мВ 25 мм/сек
ОБРЫВ:	R L C1 C2 C3 C4 C5 C6 F	

- Частота пульса пациента;
- Фамилия врача, проводящего обследование. Фамилию врача можно задать в меню **ЭК**, как будет описано ниже. Если в процессе работы была произведена регистрация пациента, то вместо фамилии врача будет отображаться фамилия и код пациента;
- Символ батареи, показывающий уровень заряда аккумулятора **ЭК**. Если уровень заряда батареи от 20 до 100 %, его изображение на экране будет белого цвета, от 5 до 20 % - желтого цвета, менее 5% - красного цвета;
- Текущие дата и время. Дату и время можно откорректировать в меню **ЭК**;
- Текущее состояние фильтров **ЭК**. Изменить состояние фильтров можно кнопкой **ФИЛЬТР**. При последовательных нажатиях кнопки **ФИЛЬТР** можно выбрать следующие комбинации фильтров:
 - **ДРЕЙФ** включен антидрейфовый фильтр;
 - **ТРЕМОР** включен антитреморный фильтр;
 - **ДРЕЙФ+ТРЕМОР** включены антидрейфовый и антитреморный фильтры;
 - **ВЫКЛЮЧЕН** фильтры выключены.

При необходимости Вы можете изменить параметры антитреморного фильтра. Для этого необходимо включить **ЭК** при нажатой кнопке **ФИЛЬТР**, 1, **АБВГ** и в появившемся меню **НАСТРОЙКА ФИЛЬТРОВ**, при помощи манипулятора выбрать пункт **АНТИТРЕМОРНЫЙ ФИЛЬТР**. После этого в появившемся меню можно выбрать частоту антитреморного фильтра: 25Гц, 30Гц, 35Гц, 40Гц или 45Гц.

Также в этом меню Вы можете изменить:

- верхнюю границу полосы пропускания **ЭК**: 150Гц, 100Гц или 75Гц, выбрав пункт **ФИЛЬТР НИЖНИХ ЧАСТОТ**;
- частоту фильтра сетевой помехи 50Гц или 60Гц, или отключить этот фильтр, выбрав пункт **ФИЛЬТР СЕТЕВОЙ ПОМЕХИ**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При включении антитреморного фильтра возможно изменение формы ЭКГ (снижение амплитуды до 20% и сглаживание R-зубца). Рекомендуется найти причину помех и устранить ее. Используйте антитреморный фильтр в случае, когда устранение помех невозможно.

- Значок **V/2** - появляется на экране **ЭК**, если включен режим печати грудных отведений с вдвое меньшим усилением.
- Значок **ВР** - появляется на экране **ЭК**, если включен режим регистрации пациента с водителем ритма.
- Значение усиления ЭКГ сигнала, в мм/мВ. Изменить значение усиления и, соответственно, амплитуду ЭКГ сигнала можно последовательно, нажимая кнопку **УСИЛЕНИЕ**.
- Значение скорости ЭКГ сигнала, в мм/сек. Изменить значение скорости ЭКГ сигнала можно последовательно нажимая кнопку **СКОРОСТЬ**.

- Информация о состоянии ЭКГ электродов. Если все электроды, необходимые для съема ЭКГ, хорошо наложены на пациента, то в этой зоне ничего не индицируется. Если какой-либо электрод не подключен к пациенту или имеет плохой контакт, то информация об этом отображается на экране красным цветом, например: **ОБРЫВ: С2** или **КОНТАКТ: С2**. Если кабель электродный не подключен к **ЭК**, то отображается сообщение: **ОБРЫВ: R L C1 C2 C3 C4 C5 C6 F**.
- При большой величине шума в одном или нескольких отведениях, на экране **ЭК** отображается соответствующее сообщение. Например: **ШУМ: С2**.

В нижней части экрана отображаются следующие настройки:

ГОТОВ К ПЕЧАТИ	ЗАПИСЬ: 10 сек-ВНУТР.
6 ОТВЕДЕНИЙ	АНАЛИЗ: ВЫКЛЮЧЕН
СТАНДАРТ	

- Сообщение о текущем состоянии **ЭК**. Возможны два типа сообщений: информационные - отображаются на зеленом фоне, и предупреждающие – отображаются на красном фоне.

Возможны следующие информационные сообщения:

- ГОТОВ К ПЕЧАТИ
- ИДЕТ ПЕЧАТЬ ЭКГ
- ИДЕТ ПЕЧАТЬ РИТМА
- ИДЕТ АНАЛИЗ ЭКГ
- ПЕЧАТЬ ДАННЫХ ПАЦИЕНТА
- ПЕЧАТЬ УСР. КОМПЛЕКСОВ
- ПЕЧАТЬ АНАЛИЗА РИТМА
- ИДЕТ ПЕЧАТЬ ТАБЛИЦЫ
- ПЕЧАТЬ НАСТРОЕК
- СЪЕМ ЭКГ В ПАМЯТЬ
- ЗАПИСЬ ЭКГ В ПАМЯТЬ
- ОЖИДАЕМ АРИТМИЮ ...
- ПОИСК НАЧАЛА СТРАНИЦЫ

Возможны следующие предупреждающие сообщения:

- НЕТ БУМАГИ В ПРИНТЕРЕ!
- ОТКРЫТА КРЫШКА ПРИНТЕРА!
- ПЕРЕГРЕВ ГОЛОВКИ!
- ПЕРЕГРЕВ МОТОРА!
- Информация о записи ЭКГ в память. Показывает длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память, при регистрации в автоматическом режиме: 10 или 45 секунд, или **ЗАПИСЬ: ВЫКЛЮЧЕНА**. Включить или выключить запись в память и изменить длительность фрагмента можно в меню **ЭК**.
- Формат печати ЭКГ. Изменить формат печати ЭКГ можно кнопкой **ФОРМАТ**. При последовательных нажатиях кнопки **ФОРМАТ** можно выбрать следующие форматы печати ЭКГ:

- **3 ОТВЕДЕНИЯ** печать ЭКГ группами по 3 отведения
 - **6 ОТВЕДЕНИЙ** печать ЭКГ группами по 6 отведений
 - **12 ОТВЕДЕНИЙ** печать 12 отведений ЭКГ поперек бумаги
 - **3 ОТВ+РИТМ** печать ЭКГ группами по 3 отведения + одно отведение ритма (выбирается в меню)
 - **ЗАПИСЬ РИТМА** печать ЭКГ для анализа ритма (выбор формата ритма производится в меню **ЭК**)
 - **БЕЗ ПЕЧАТИ** печать ЭКГ не производится, но возможна запись ЭКГ в память и печать результатов анализа ЭКГ, а также печать на внешнем принтере.
- **Выбранная система отведений ЭКГ.** Возможна регистрация ЭКГ в следующих системах отведений: **СТАНДАРТ, КАБРЕРА, НЭБ, ФРАНК, ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ** (произвольный набор отведений, задаваемый пользователем). Выбор системы отведений производится в меню **ЭК**.
 - **Информация о формате анализа ЭКГ.** Изменить формат печати анализа ЭКГ можно кнопкой **АНАЛИЗ**. При последовательных нажатиях кнопки **АНАЛИЗ** можно выбрать следующие форматы печати анализа ЭКГ:
 - **ПОЛНЫЙ**
 - **ПОЛНЫЙ+УСР.К.** (усредненный кардиокомплекс)
 - **КРАТКИЙ**
 - **КРАТКИЙ+УСР.К.**
 - **ВЫКЛЮЧЕН.**

Анализ ЭКГ возможен только при регистрации в автоматическом режиме в стандартной системе отведений и отключенном режиме **ВОДИТЕЛЬ РИТМА**.

7.2 ОПИСАНИЕ МЕНЮ И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА

Войти в меню **ЭК** можно двумя способами: нажать кнопку **МЕНЮ/ВЫХОД** или нажать на манипулятор. При этом на экране **ЭК** появится меню следующего вида:

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ		ВЫХОД
ВРАЧ: ИВАНОВ В.А.		ИЗМЕНИТЬ ВРАЧА
УЧРЕЖДЕНИЕ: БОЛЬНИЦА 2		УДАЛИТЬ ВРАЧА
НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ		ВЫХОД
ДЛИНА ПЕЧАТИ: 5 сек		ВОДИТЕЛЬ РИТМА: ВЫКЛ.
ТОЛЩИНА ЛИНИИ: СРЕДНЯЯ		РЕЖИМ U/2: ВЫКЛ.
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА: ВЫКЛ.		ТАЙМЕР ПЕЧАТИ: ВЫКЛ.
АВТОЦЕНТРИРОВАНИЕ: ВЫКЛ.		СЪЕМ: ОДНОВРЕМЕННЫЙ
АВТО СТАРТ: ВЫКЛ.		ВНЕШНИЙ ПРИНТЕР: ВЫКЛ.
НАСТРОЙКИ РИТМА		ВЫХОД
ФОРМАТ РИТМА: 36сек, 1 ОТВ., 3 канала, 25мм/с		
ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 1: II		ОЖИДАТЬ АРИТМИЮ: ВЫКЛ.
ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 2: aVL		ПОРОГ АРИТМИИ: 20%
ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 3: V5		ДОБАВЛЯТЬ РИТМ: ВЫКЛ.
ОТВЕДЕНИЯ		ВЫХОД
СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЙ: СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ		
ОТВ. 1: I	ОТВ. 4: aVR	ОТВ. 7: V1
ОТВ. 2: II	ОТВ. 5: aVL	ОТВ. 8: V2
ОТВ. 3: III	ОТВ. 6: aVF	ОТВ. 9: V3
		ОТВ. 10: V4
		ОТВ. 11: V5
		ОТВ. 12: V6
ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ/ПЕРЕДАЧА		ВЫХОД
ДЛИНА ФРАГМЕНТА: 10 сек.		GSM ПЕРЕДАЧА: ВЫКЛ.
ЗАПИСЬ: ВЫКЛЮЧЕНА		GSM ОТВЕТ: ВЫКЛЮЧЕН
ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ		ВЫХОД
ЯРКОСТЬ: 4		ГРОМКОСТЬ ЗВУКОВ: 5
ЯЗЫК/LANGUAGE: РУССКИЙ		ОСН. ЭКРАН: 12 ОТВ.
ДАТА И ВРЕМЯ: 21.03.18 12:07		БУМАГА: БЕЗ МЕТОК
ПЕЧАТЬ СЕТКИ: ВЫКЛ.		ГРОМКОСТЬ ЗВОНКА: 5
СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ	ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ	ПЕЧАТЬ НАСТРОЕК
ГОТОВ К ПЕЧАТИ		ВЫХОД БЕЗ СОХР.
3 ОТВЕДЕНИЯ СТАНДАРТ		ЗАПИСЬ: ВЫКЛЮЧЕНА
		АНАЛИЗ: ВЫКЛЮЧЕН

Вращая манипулятор можно выбрать раздел меню для внесения изменений и нажать манипулятор или выбрать нужный раздел при помощи сенсорного экрана. После этого Вы можете выбрать нужный пункт данного раздела, нажать манипулятор и внести изменения. После внесения изменений, вращая манипулятор, выберите пункт **ВЫХОД** для выхода из данного раздела или нажмите кнопку **МЕНЮ/ВЫХОД**.

Рассмотрим последовательно, какие настройки можно изменить в каждом из разделов меню.

Изменение информации о пользователе

В разделе меню **ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ** Вы можете ввести название Вашего лечебного учреждения и фамилию врача, проводящего обследование.

В **ЭК** предусмотрено хранение индивидуальных настроек для 10 врачей. Для выбора настроек выберите пункт **ВРАЧ** и нажмите манипулятор. На экране появится меню выбора врача, в котором Вы можете выбрать нужную фамилию, и после этого автоматически установятся все настройки **ЭК**, которые установил этот врач при последнем использовании **ЭК**. Также Вы можете быстро выбрать врача по номеру, нажав цифровую кнопку от 1 до 9.

Если в списке нет нужной Вам фамилии, то Вы можете добавить ее. Для этого в меню выбора врача выберите пустую строку, а затем выберите пункт **ИЗМЕНИТЬ ВРАЧА**. На экране появится поле для ввода новой фамилии врача. Фамилия

вводится с клавиатуры на сенсорном экране (также Вы можете ввести эти данные при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры **ЭК**). После завершения ввода фамилии нажмите манипулятор. Теперь **ЭК** будет хранить настройки нового врача.

Для того, чтобы удалить врача из списка, выберите его в меню выбора врача и затем выберите пункт **УДАЛИТЬ ВРАЧА**. Выбранный врач и его настройки будут удалены из списка.

Ввод названия лечебного учреждения производится аналогично вводу фамилии врача.

Изменение настроек печати

В разделе меню **НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ** Вы можете изменять следующие настройки:

- **ДЛИНА ПЕЧАТИ.** В этом пункте Вы можете выбрать длину печати каждой группы отведений в автоматическом режиме: 3, 5, 10, 15, 25 секунд или 100, 200, 400 миллиметров.
- **ТОЛЩИНА ЛИНИИ.** В этом пункте Вы можете установить толщину печати кривых ЭКГ: узкая, средняя или широкая.
- **ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА.** В этом пункте Вы можете разрешить печать данных пациента после каждого ЭКГ обследования или запретить печать данных пациента для экономии бумаги.
- **АВТОЦЕНТРИРОВАНИЕ.** В этом пункте Вы можете включить или выключить функцию автоцентрирования (сдвиг отдельных отведений ЭКГ при печати для оптимального размещения по ширине бумаги).
- **АВТО СТАРТ.** В этом пункте Вы можете включить или выключить режим автоматического включения регистрации ЭКГ после наложения на пациента всех электродов, необходимых для выбранной системы отведений.
- **ВОДИТЕЛЬ РИТМА.** В этом пункте Вы можете включить или выключить режим пациента с водителем ритма. При включении этого режима импульсы водителя ритма печатаются на ЭКГ как вертикальные линии, а в основной экранной форме в верхней части экрана отображается **ВР**. При включении этого режима анализ ЭКГ невозможен.
- **РЕЖИМ V/2.** В этом пункте Вы можете включить или выключить режим V/2. При включении этого режима грудные отведения V1-V6 печатаются с вдвое меньшим усилением, чем основные и усиленные отведения, но на амплитуду отведений V1-V6 на экране **ЭК** этот режим не влияет. При включении этого режима в основной экранной форме в верхней части экрана отображается значок V/2.
- **ТАЙМЕР ПЕЧАТИ.** В этом пункте Вы можете включить или выключить режим периодической печати ЭКГ.
- **СЪЕМ.** В этом пункте Вы можете выбрать режим съема ЭКГ:
 - **ОДНОВРЕМЕННЫЙ:** все отведения снимаются одновременно;
 - **ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ:** отведения снимаются во время их печати.

Внимание! Если выбран режим последовательного съема ЭКГ, то режим **ОЖИДАТЬ АРИТМИЮ** автоматически отключается.

- **ВНЕШНИЙ ПРИНТЕР.** Этот пункт меню становится доступным, если внешний принтер подключен к разъему **“USB A” ЭК**. В нем Вы можете включить или выключить режим печати ЭКГ на внешнем принтере. Если Вы включите печать на внешнем принтере, то ЭКГ будет печататься и на внешнем принтере, и на встроенном термопринтере. Если Вы хотите печатать только на внешнем принтере, то извлеките бумагу из встроенного термопринтера или выберите формат **БЕЗ ПЕЧАТИ**.

Внимание! Подключение внешнего принтера производите в следующей последовательности:

- при выключенном ЭК и принтере подключите принтер к разъему "USB A" ЭК.
- включите принтер, и только затем включите ЭК.

При нарушении этой последовательности пункт меню **ВНЕШНИЙ ПРИНТЕР** может остаться неактивным.

Изменение настроек ритма

В разделе меню **НАСТРОЙКИ РИТМА** Вы можете изменять следующие настройки:

- **ФОРМАТ РИТМА.** В этом пункте Вы можете выбрать различные форматы печати ритма. Возможные форматы ритма описаны в пункте **РЕГИСТРАЦИЯ РИТМА.**
- **ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 1, 2, 3.** В этом пункте Вы можете выбрать отведения, которые будут печататься при печати ритма. Выбор отведений ритма описан в пункте **РЕГИСТРАЦИЯ РИТМА.**
- **ОЖИДАТЬ АРИТМИЮ.** В этом пункте Вы можете включить или выключить режим автоматической регистрации ЭКГ при обнаружении аритмии.

Внимание! Если выбран режим **ОЖИДАТЬ АРИТМИЮ**, то режим последовательного съема ЭКГ автоматически изменяется на одновременный съем.

- **ПОРОГ АРИТМИИ.** В этом пункте Вы можете задать порог изменения длительности RR-интервала, при котором происходит обнаружение аритмии.
- **ДОБАВЛЯТЬ РИТМ.** В этом пункте Вы можете включить или выключить режим автоматического добавления регистрации ритма при обнаружении аритмии во время регистрации ЭКГ в автоматическом режиме.

Выбор системы отведений

В разделе меню **ОТВЕДЕНИЯ** Вы можете выбрать систему отведений: **СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ**, **ОТВЕДЕНИЯ ПО КАБРЕРА**, **ОТВЕДЕНИЯ ПО НЭБУ**, **ОТВЕДЕНИЯ ПО ФРАНКУ** или **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОТВЕДЕНИЯ**. Если Вы выбрали пункт **ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ ОТВЕДЕНИЯ**, то Вы можете сами выбрать, какие отведения и в какой последовательности будет печатать ЭК.

Изменение настроек записи в память/передачи

В разделе меню **ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ/ПЕРЕДАЧА** Вы можете:

- включить или выключить запись ЭКГ во внутреннюю память ЭК или во внешнюю память, если USB флэш-память подключена к ЭК;
- выбрать длительность фрагмента ЭКГ, записываемого в память: 10 или 45 секунд;
- включить или выключить передачу ЭКГ по каналам сотовой связи (при наличии модуля GSM);
- настроить включение режима телефона или выключить этот режим (при наличии модуля GSM).

Изменение прочих настроек

В разделе меню **ПРОЧИЕ НАСТРОЙКИ** Вы можете:

- изменить яркость экрана;
- изменить громкость звуковых сигналов;
- изменить громкость звонка в режиме телефона;
- выбрать язык: русский, английский или турецкий;

- выбрать режим отображения ЭКГ на экране **ЭК**:
При выборе пункта **ПО ФОРМАТУ**, ЭКГ отображается на экране в соответствии с выбранным форматом регистрации.
Если выбран пункт **12 ОТВ.**, то на экране всегда отображаются все 12 отведений ЭКГ, независимо от выбранного формата регистрации;
- откорректировать дату и время;
- выбрать тип термобумаги: с метками или без меток;
Внимание! Устанавливайте режим **С МЕТКАМИ** только при использовании бумаги в пачках.
- выбрать режим печати сетки. В этом режиме Вы можете использовать термобумагу без миллиметровой сетки, **ЭК** напечатает сетку сам.

Печать настроек

Для печати настроек, выберите пункт меню **ПЕЧАТЬ НАСТРОЕК** (в нижней части экрана). После нажатия манипулятора все текущие настройки **ЭК** будут напечатаны на бумаге.

Возврат к заводским настройкам

Для возврата к заводским настройкам, выберите пункт **ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ**. После нажатия манипулятора на экране появится меню, в котором можно подтвердить или отказаться от установки заводских настроек. После подтверждения будут установлены следующие заводские настройки **ЭК**:

- | | |
|--------------------------|--|
| - система отведений: | СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ |
| - анализ: | АНАЛИЗ ВЫКЛЮЧЕН |
| - фильтр: | АНТИДРЕЙФОВЫЙ+АНТИТРЕМОРНЫЙ |
| - усиление: | 10 мм/мВ |
| - скорость: | 50 мм/с |
| - длина печати: | 5 секунд |
| - толщина линии: | средняя |
| - данные пациента: | данные пациента не печатаются |
| - автоцентрирование: | выключено |
| - автостарт: | выключен |
| - водитель ритма: | выключен |
| - режим V/2: | выключен |
| - таймер печати: | периодическая печать выключена |
| - съем: | одновременный |
| - внешний принтер: | выключен |
| - формат ритма: | 36сек, 1 отведение, 3 канала, 25мм/с |
| - отведение ритма 1: | II |
| - отведение ритма 2: | aVL |
| - отведение ритма 3: | V5 |
| - ожидать аритмию: | режим печати по аритмии выключен |
| - порог аритмии (%): | 20% |
| - длина фрагмента (сек): | в память записывается фрагмент 10 секунд |
| - запись: | выключена |
| - GSM передача: | выключена |

- | | |
|---------------------|-----------|
| - телефон: | выключен |
| - яркость: | 4 |
| - громкость звуков: | 5 |
| - громкость звонка: | 5 |
| - основной экран: | 12 ОТВ. |
| - бумага: | без меток |
| - печать сетки: | выключена |

При возврате к заводским настройкам информация о врачах, наименование лечебного учреждения, дата, время и выбранный язык сохраняются без изменений. Также сохраняются все ЭКГ, ранее записанные в память **ЭК**.

Выход из меню настроек

После внесения изменений, для выхода с сохранением настроек, выберите пункт **СОХРАНИТЬ НАСТРОЙКИ** и нажмите манипулятор. Также можно выйти из меню с сохранением настроек, нажав кнопку **МЕНЮ/ВЫХОД**.

Если Вы не хотите сохранять внесенные изменения, то выберите пункт **ВЫХОД БЕЗ СОХРАНЕНИЯ**, при этом **ЭК** вернется в основную экранную форму, не меняя настройки.

8 РЕГИСТРАЦИЯ ПАЦИЕНТА

Перед съемом ЭКГ со следующего пациента произведите его регистрацию.

Для регистрации пациента, нажмите кнопку **ПАЦИЕНТ**, и на экране **ЭК** появится меню следующего вида:

В этом меню Вы можете ввести данные пациента. Для этого выберите строку, используя манипулятор. В появившемся поле введите данные при помощи клавиатуры на сенсорном экране (также Вы можете ввести эти данные при помощи алфавитно-цифровой клавиатуры **ЭК**). Удобнее всего вводить данные на сенсорном экране стилусом (возможно использование карандаша, ручки или другого предмета).

При вводе ФИО и кода пациента открывается экранная клавиатура, аналогичная обычной компьютерной клавиатуре. Для смены регистра букв используется кнопка **A<->a**, для смены языка – кнопка с наименованием языка (возможны три варианта: **РУССКИЙ**, **ENGLISH**, **TÜRKÇE**), для удаления одного символа набранного текста – кнопка **←**, для удаления всего набранного текста – кнопка **ОЧИСТИТЬ**, для закрытия экранной клавиатуры и отмены набранного текста – кнопка **ОТМЕНА**, а для подтверждения набранного текста – кнопка **ВВОД**.

Также форма ввода данных пациента содержит следующие экранные кнопки, находящиеся в нижней части экрана **ЭК**:

- **СОХРАНИТЬ И ВЫЙТИ**. Осуществляет сохранение введенных данных пациента и переход в основную экранную форму.
- **ОЧИСТИТЬ И ВЫЙТИ**. Осуществляет удаление введенных данных пациента и переход в основную экранную форму.
- **ЗАГРУЗИТЬ ИЗ ПАМЯТИ**. Открывает список сохраненных ЭКГ и позволяет использовать данные уже имеющегося в памяти **ЭК** пациента.

Данные пациента печатаются на бумаге после кривых ЭКГ (если печать данных пациента включена в меню). Кроме того, данные пациента запоминаются в памяти вместе со снятой ЭКГ (если запись в память включена), а фамилия пациента и код используются для поиска записанной в память ЭКГ нужного пациента и сортировки записей в памяти.

Внимание! Данные пациента стираются при выключении **ЭК**.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если Вы не ввели данные следующего пациента, то ЭКГ будет напечатана с данными предыдущего пациента.

Данные пациента можно не вводить, если Вы отключили печать данных пациента и запись в память.

Если Вы произвели регистрацию пациента, то после завершения регистрации фамилия пациента и код пациента будут отображаться в основной экранной форме вместо фамилии врача. После выключения-включения **ЭК** или после очистки данных пациента в основной экранной форме опять будет отображаться фамилия врача.

9 НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ

9.1 ПОДГОТОВКА К НАЛОЖЕНИЮ ЭЛЕКТРОДОВ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Используйте только чистые и неповрежденные электроды без царапин на поверхности. Электроды с изношенной или поврежденной поверхностью могут привести к высокому сопротивлению электрод-кожа и искажению кривых ЭКГ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте старые и новые электроды вместе, заменяйте их новыми все одновременно. Использование совместно электродов разного типа или разной степени износа может вызвать высокое напряжение поляризации и снизить качество регистрации ЭКГ или сделать съем ЭКГ невозможным.

Внимание: Используйте электроды, рекомендованные производителем

Перед наложением электродов убедитесь, что пациент расслаблен и не мерзнет. Положите его на достаточно широкую кушетку, руки должны лежать на кушетке и быть свободно вытянуты вдоль тела: это значительно снизит риск получения искаженных результатов вследствие мышечной дрожи.

Перед наложением электродов кожу в местах контакта желательно обезжирить спиртом или эфиром. Электроды должны быть чистыми и дезинфицированными.

В качестве токопроводящей среды используйте электродный гель, небольшое количество которого нанесите на участки кожи в местах наложения электродов.


При установке электродов обычно обращайте внимание на расположение кабеля электродного. Переплетение проводов кабеля может привести к высокому уровню помех.

Помните, что правильная подготовка пациента и правильное наложение электродов – это основа получения ЭКГ записи высокого качества.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что проводящие части электродов, включая нейтральный электрод, не соприкасаются между собой и с любыми другими проводящими частями.

9.2 НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СНЯТИЯ СТАНДАРТНОЙ ЭКГ

Для съема стандартной ЭКГ располагайте электроды на пациенте следующим образом:

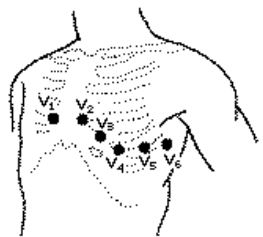Маркировка на штекере	Цвет штекера	Положение электрода	Рисунок
R	Красный	Правая рука	
L	Желтый	Левая рука	
N	Черный	Правая нога	
F	Зеленый	Левая нога	
C1	Белый + красный	В четвертом межреберье по правому краю грудины	
C2	Белый + желтый	В четвертом межреберье у левого края грудины	
C3	Белый + зеленый	На пятом ребре посередине между C2 и C4	
C4	Белый + коричневый	В пятом межреберье по левой среднеключичной линии	

C5	Белый + черный	На уровне C4 по передней подмышечной линии	
C6	Белый + фиолетовый	На уровне C4 по средней подмышечной линии	

Для съема стандартной ЭКГ необходимо наложить на пациента **все 10 электродов**. После установки всех электродов убедитесь, что в верхней части экрана **ЭК** пропало красное сообщение об обрыве электродов. Если сообщение об обрыве электрода осталось, проверьте качество наложения этого электрода на пациента и надежность соединения электрода со штекером кабеля пациента.

Если после проведенных мероприятий сообщение об обрыве не пропало, то можно проверить целостность электродного кабеля, как описано в пункте **ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДНОГО** настоящего руководства.


9.3 НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СНЯТИЯ ЭКГ ПО КАБРЕРА

Для снятия ЭКГ по Кабрера располагайте электроды на пациенте так же, как и при снятии стандартной ЭКГ.

Внимание! При снятии ЭКГ по Кабрера анализ ЭКГ невозможен.

9.4 НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СНЯТИЯ ЭКГ ПО НЭБУ

Для снятия ЭКГ по Нэбу располагайте электроды на пациенте следующим образом:

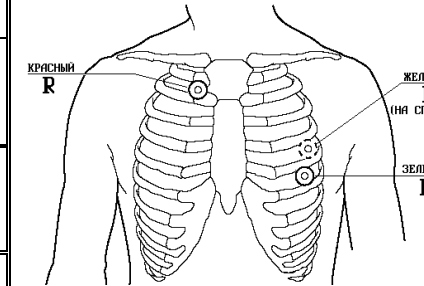Маркировка на штекере	Цвет штекера	Положение электрода	Рисунок
R	Красный	II межреберье у правого края грудины (точка Nst по Нэбу)	
F	Зеленый	В пятом межреберье по левой среднеключичной линии (точка Nap по Нэбу).	
L	Желтый	Задняя подмышечная линия на уровне верхушечного толчка (точка Nax по Нэбу)	
N	Черный	В любом месте поясничной или подвздошной области	
C1-C6	Не накладываются на пациента		

Для съема ЭКГ по Нэбу достаточно наложить на пациента четыре электрода. Допускается расположение электрода N в другом месте, желательно на максимальном удалении от остальных электродов.

После установки электродов R, L, F, N на пациента убедитесь, что в верхней части экрана **ЭК** пропало красное сообщение об обрыве электродов.



Неиспользуемые штекеры кабеля электродного C1-C6 оставьте свободными. Избегайте контакта свободных штекеров с металлическими поверхностями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При контакте свободного электрода с предметом, находящимся под напряжением, возможен удар током пациента.

Внимание! При снятии ЭКГ по Нэбу анализ ЭКГ невозможен.

9.5 НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СНЯТИЯ ЭКГ ПО ФРАНКУ

Для снятия ЭКГ по Франку располагайте электроды на пациенте следующим образом:

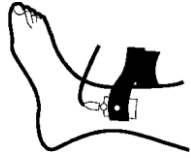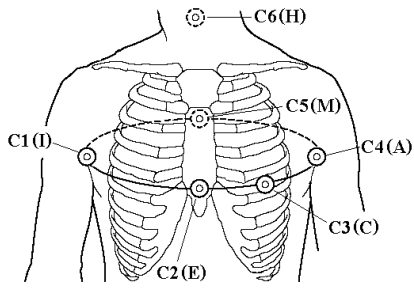Маркировка на штекере	Цвет штекера	Положение электрода	Рисунок
N	Черный	Правая нога	
F	Зеленый	Левая нога	
C1	Белый + красный	На правой средне-подмышечной линии на уровне пятого межреберья (точка I по Франку).	
C2	Белый + желтый	На передней средней линии на уровне пятого межреберья (точка E по Франку).	
C3	Белый + зеленый	Посередине между передней средней линией и левой средне-подмышечной линией на уровне 5 межреберья (точка C по Франку)	
C4	Белый + коричневый	На левой средне-подмышечной линии на уровне 5 межреберья (точка A по Франку)	
C5	Белый + черный	На задней средней линии на уровне 5 межреберья (точка M по Франку)	
C6	Белый + фиолетовый	На задней части шеи (точка H по Франку)	

Для съема ЭКГ по Франку необходимо наложить на пациента 8 электродов. После установки электродов убедитесь, что в верхней части экрана **ЭК** пропало красное сообщение об обрыве электродов.

Неиспользуемые штекеры кабеля электродного R и L оставьте свободными. Избегайте контакта свободных штекеров с металлическими поверхностями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При контакте свободного электрода с предметом, находящимся под напряжением, возможен удар током пациента.

Внимание! При снятии ЭКГ по Франку анализ ЭКГ невозможен.

9.6 НАЛОЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОДОВ ПРИ ВЫБОРЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ ОТВЕДЕНИЙ

Если Вы выбрали систему отведений **НАБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**, то Вы сами можете задать какие отведения должен регистрировать **ЭК** и в какой последовательности их печатать. Выбирать отведения можно только из набора стандартных отведений и Кабрера. В этом случае Вы сами определяете, какие электроды накладывать на пациента.

Неиспользуемые штекеры кабеля электродного оставьте свободными. Избегайте контакта свободных штекеров с металлическими поверхностями.

Внимание! При выборе пользовательского набора отведений анализ ЭКГ невозможен.

9.7 СНЯТИЕ И ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОДОВ

После окончания обследования снимите электроды с тела пациента. Салфеткой из бязи, смоченной в дистиллированной воде, удалите с поверхности электродов остатки электродного геля. Протрите, высушите и уложите электроды в тару, защищающую их от загрязнения и механических повреждений.

Внимание! Категорически запрещается оставлять на электродах гель после окончания работы, применять для очистки электродов острые предметы, подвергать электроды нагреву выше 70 °С.

9.8 ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДНОГО

Если при наложении электродов на пациента не удается добиться пропадания сообщения об обрыве электродов или по каким-то другим причинам возникли сомнения в работоспособности кабеля электродного, Вы можете проверить кабель следующим образом:

Подключите разъем кабеля электродного к разъему **ЭКГ ЭК**. Каждый штекер кабеля электродного поочередно вставляйте в гнездо **КОНТРОЛЬ**, расположенное рядом с разъемом **ЭКГ**, и наблюдайте за светодиодом **КОНТРОЛЬ**:

- если светодиод светится зеленым цветом, то проверяемый штекер исправен;
- если светодиод не светится, то это означает обрыв в цепи проверяемого штекера;
- если светодиод светится красным цветом, то это означает, что цепь проверяемого штекера имеет замыкание на экранирующую оплетку кабеля.

Если проверка показывает, что все 10 штекеров исправны, то это означает, что кабель электродный исправен. Если в процессе проверки обнаружено, что хотя бы один штекер имеет обрыв или замыкание на оплетку, то кабель неисправен и требует ремонта.

Внимание! При проверке одного штекера следите за тем, чтобы остальные штекеры не касались друг друга или других металлических поверхностей. Это может привести к неправильным результатам проверки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Данная проверка не выявляет замыкание между электродами. В эксплуатации этот дефект появляется гораздо реже, чем обрыв или замыкание на оплетку, но он возможен после неквалифицированного ремонта кабеля электродного.

10 РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ

10.1 ПОДГОТОВКА К РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Убедитесь, что прибор не подвергается воздействию помех.

Перед началом регистрации ЭКГ в любом режиме рекомендуется выполнить следующие действия:

- проверьте, какая система отведений установлена и при необходимости установите нужную Вам систему отведений в меню;
- проверьте, какой формат регистрации ЭКГ установлен и при необходимости установите нужный Вам формат, нажимая кнопку **ФОРМАТ**;
- зайдите в меню и проверьте, устраивают ли Вас настройки печати: длина печатаемого фрагмента ЭКГ, толщина линии, печатать данные пациента или нет и т.д. При необходимости измените настройки печати;
- проверьте, включен или выключен анализ ЭКГ и при необходимости выберите нужный Вам вид анализа, нажимая кнопку **АНАЛИЗ**;
- проверьте, включена или выключена запись в память и при необходимости измените установки записи в память в меню.

Все перечисленные выше действия не обязательно выполнять перед каждой регистрацией ЭКГ, если Вы знаете, какие настройки установлены, и у Вас нет необходимости их менять.

10.2 РЕЖИМЫ АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКГ

Автоматическая регистрация ЭКГ

При автоматической регистрации, **ЭК** производит регистрацию всех отведений ЭКГ, доступных в выбранной Вами системе отведений. Например, для стандартной системы отведений, будут напечатаны все 12 отведений ЭКГ.

Автоматическая регистрация ЭКГ начинается после нажатия кнопки **СТАРТ АВТ.** В режиме автоматической регистрации возможно проведение анализа ЭКГ и печать усредненных кардиокомплексов. Также возможна запись ЭКГ в память и печать копии.

Для проведения автоматической регистрации ЭКГ выполните следующие действия:

- произведите регистрацию пациента. Для этого нажмите кнопку **ПАЦИЕНТ** и в появившемся экране введите данные пациента;
- наложите электроды на пациента в соответствии с выбранной Вами системой отведений. Убедитесь, что сообщение об обрыве электродов пропало с экрана **ЭК**. Если сообщение об обрыве не пропало, автоматическая регистрация ЭКГ не может быть начата;
- на экране **ЭК** должна появиться ЭКГ пациента. Если Вы выбрали режим основного экрана **ПО ФОРМАТУ**, то в зависимости от выбранного Вами формата регистрации ЭКГ, на экране будут отображаться 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ. Если на экране отображаются не все отведения ЭКГ, то посмотреть остальные Вы можете, нажимая на кнопку **ОТВЕДЕНИЯ** или вращая манипулятор. Если Вы выбрали режим основного экрана **12 ОТВ.**, то на экране **ЭК** будут отображаться все отведения ЭКГ одновременно;

- в режиме основного экрана **ПО ФОРМАТУ** ЭКГ отображается на экране **ЭК** в том же виде, в каком она будет напечатана на бумаге. Оцените качество ЭКГ сигналов и при необходимости измените усиление и скорость кнопками **УСИЛЕНИЕ** и **СКОРОСТЬ** соответственно. Если необходимо, измените состояние фильтров **ЭК** кнопкой **ФИЛЬТР**;
- дождитесь появления значения ЧСС пациента на экране **ЭК**. Пульс пациента должен сопровождаться звуковым сигналом, если значение громкости не установлено равным нулю;
- нажмите кнопку **СТАРТ АВТ.** для начала автоматической регистрации ЭКГ. **ЭК** напечатает ЭКГ в выбранном Вами формате, данные пациента (если включена печать данных пациента), результаты анализа ЭКГ (если анализ включен) и запишет ЭКГ в память (если запись в память включена).

После завершения регистрации в автоматическом режиме, Вы можете сделать копию только что снятой ЭКГ, нажав кнопку **КОПИЯ**. Вы можете в любой момент прекратить регистрацию ЭКГ, нажав на кнопку **СТОП**. Регистрация будет остановлена, но в этом случае анализ ЭКГ проводиться не будет, ЭКГ не будет записана в память и печать копии будет невозможна.

Автоматическая регистрация ЭКГ в режиме АВТО СТАРТ

Автоматическая регистрация при включенном режиме **АВТО СТАРТ** производится точно так же, как и обычная автоматическая регистрация ЭКГ, описанная выше. Отличие в том, что Вам не надо нажимать на кнопку **СТАРТ АВТ.** для начала регистрации. Для включения этого режима, зайдите в меню и в разделе **НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ**, выберите пункт **АВТО СТАРТ**, и установите его в состояние **ВКЛ.**

При включенном режиме **АВТО СТАРТ** регистрация ЭКГ начинается автоматически, если выполняются следующие условия:

- на пациента наложены все необходимые электроды (в течение 2 секунд нет сообщения об обрыве электродов);
- **ЭК** обнаружил не менее пяти QRS комплексов в ЭКГ пациента;
- **ЭК** не обнаружил шумов или артефактов от двигательной активности пациента.

Для выключения этого режима, зайдите в меню и в разделе **НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ** выберите пункт **АВТО СТАРТ**, и установите его в состояние **ВЫКЛ.**

Автоматическая регистрация ЭКГ по аритмии

ЭК может производить автоматическую регистрацию ЭКГ по аритмии.

Для включения этого режима, зайдите в меню и в разделе **НАСТРОЙКИ РИТМА**, выберите пункт **ОЖИДАТЬ АРИТМИЮ**, и установите его в состояние **ВКЛ.**

В этом же разделе меню Вы можете задать порог аритмии. Порог определения аритмии может быть задан от 10 до 30 % с шагом 1%. Этот порог имеет следующий смысл: если разность длительности двух соседних R-R интервалов превысит заданный Вами порог, то включится регистрация ЭКГ.

Дальнейшие действия не отличаются от действий при обычной регистрации ЭКГ в автоматическом режиме. Разница в том, что после нажатия кнопки **СТАРТ АВТ.** регистрация начнется не сразу. На экране **ЭК** появится сообщение **ОЖИДАЕМ АРИТМИЮ** и только после обнаружения аритмии начнется регистрация ЭКГ в выбранном Вами формате, причем обнаруженная аритмия будет располагаться в середине напечатанного фрагмента ЭКГ, если от момента нажатия кнопки **СТАРТ АВТ.** до появления аритмии прошло достаточно времени.

Если аритмия отсутствует, то Вы можете произвести регистрацию ЭКГ, еще

раз нажав на кнопку **СТАРТ АВТ.** При этом середина распечатки будет соответствовать моменту нажатия кнопки **СТАРТ АВТ.**

Для выключения режима регистрации ЭКГ по аритмии необходимо зайти в меню и в пункте **ОЖИДАТЬ АРИТМИЮ** установить **ВЫКЛ.**

Внимание! Если Вы включили режим регистрации ЭКГ по аритмии, то он останется включенным и после выключения-включения ЭК. Поэтому не забудьте выключить этот режим в меню ЭК.

Автоматическая регистрация ЭКГ с добавлением ритма

ЭК может автоматически добавлять печать ритма после окончания автоматической регистрации ЭКГ, если во время автоматической регистрации была обнаружена аритмия.

Для включения этого режима зайдите в меню и в разделе **НАСТРОЙКИ РИТМА** выберите пункт **ДОБАВЛЯТЬ РИТМ** и установите его в состояние **ВКЛ.** В этом же разделе меню Вы можете выбрать формат печати ритма.

Дальнейшие действия не отличаются от действий при обычной регистрации ЭКГ в автоматическом режиме, но если в процессе регистрации ЭКГ **ЭК** обнаружит аритмию, то после окончания печати ЭКГ будет автоматически добавлена печать ритма в выбранном в меню формате.

Для выключения режима регистрации ЭКГ с добавлением ритма необходимо зайти в меню и в пункте **ДОБАВЛЯТЬ РИТМ** установить **ВЫКЛ.**

Внимание! Если время от начала регистрации ЭКГ до обнаружения аритмии превысило время печати, заданное в выбранном формате ритма, то печать ритма добавлена не будет.

Периодическая регистрация ЭКГ

ЭК может производить периодическую регистрацию ЭКГ с заданным Вами интервалом. При периодической регистрации, так же как и при обычной автоматической регистрации, возможно проведение анализа ЭКГ и печать усредненных кардиокомплексов. Также возможна запись ЭКГ в память и печать копии. Для включения этого режима зайдите в меню и в разделе **НАСТРОЙКИ ПЕЧАТИ** выберите пункт **ТАЙМЕР ПЕЧАТИ** и в появившемся списке выберите интервал печати ЭКГ (от 1 минуты до 60 минут).

Дальнейшие действия не отличаются от действий при обычной регистрации ЭКГ в автоматическом режиме. Разница в том, что кнопку **СТАРТ АВТ.** нажимать не надо, режим начинает работать сразу после выбора Вами интервала печати. Регистрация начнется не сразу, а через заданный Вами интервал времени и будет повторяться с заданным интервалом, пока Вы не выключите этот режим в меню. На экране **ЭК** рядом с сообщением **ГОТОВ К ПЕЧАТИ** появится таймер, показывающий, сколько времени осталось до следующей регистрации ЭКГ.

Для выключения режима периодической регистрации ЭКГ зайдите в меню и в пункте **ТАЙМЕР ПЕЧАТИ** установите **ВЫКЛ.**

Внимание! Если Вы включили режим периодической записи ЭКГ, то он останется включенным и после выключения-включения ЭК. Поэтому не забудьте выключить этот режим в меню ЭК.

В режиме периодической регистрации нажатие на кнопку **СТОП** во время печати ЭКГ останавливает печать, но не выключает режим периодической регистрации и через заданный Вами интервал времени будет напечатана очередная ЭКГ. Также предусмотрена возможность печати ЭКГ в промежутках между периодическими регистрациями ЭКГ.

Анализ ЭКГ

ЭК со встроенным программным модулем анализа ЭКГ покоя "ArMaSoft-12-Cardio" из состава ПКФД-01-"Р-Д" может производить анализ ЭКГ с формированием синдромальных заключений в автоматических режимах регистрации.

Анализ ЭКГ позволяет производить массовые обследования населения с целью выявления лиц с нарушениями сердечной деятельности, определения острого инфаркта миокарда и ишемической болезни сердца.

Анализ ЭКГ можно производить у детей в возрасте от одного года до 15-лет и у взрослых людей (старше 15 лет). Для детей до одного года автоматическая синдромальная интерпретация не производится.

Результаты анализа ЭКГ у пациентов с кардиологическими диагнозами подтверждены данными клинических исследований, которые проводились для установления диагноза (клинический анамнез, исследования ферментов, эхокардиография, в отдельных случаях вентрикулография). Количественные показатели точности по результатам клинических исследований приведены в Приложении 3.

Анализ ЭКГ предназначен для выявления следующих основных ЭКГ-синдромов:

- изменения предсердий;
- нарушения внутрижелудочковой проводимости;
- гипертрофия желудочков сердца;
- инфаркты миокарда с указанием локализации и стадии: (перенесенный) старый; острый; инфаркт миокарда подострой стадии; инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- ишемия миокарда (нарушения процессов реполяризации миокарда);
- определение нормального синусового ритма сердца;
- диагностика нарушений ритма сердца, таких как: желудочковая, предсердная экстрасистолия, мерцание/трепетание предсердий, атриовентрикулярные блокады, суправентрикулярная тахикардия, желудочковая тахикардия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ограничения и перечень возможных заключений при анализе ЭКГ приведены в Приложении 3.

Внимание! Анализ ЭКГ возможен только при правильно введенных данных пациента. Если данные пациента не введены, то **ЭК** не будет производить анализ ЭКГ. Если введены неправильные данные пациента, то результаты анализа могут быть недостоверными.

Внимание! Анализ ЭКГ возможен только при выборе стандартной системы отведений, во всех остальных системах отведений анализ ЭКГ невозможен.

Внимание! Анализ ЭКГ невозможен при регистрации ЭКГ у пациента с водителем ритма, если в настройках **ЭК** установлено **ВОДИТЕЛЬ РИТМА: ВКЛ**.

Внимание! При включенном анализе время регистрации ЭКГ автоматически увеличивается до 45 секунд. На длину распечатки ЭКГ это не влияет, она остается такой, как задано в меню.

Внимание! При невозможности измерить параметры ЭКГ (очень высокий уровень шума, большой дрейф изолинии или отсутствие сигнала хотя бы на одном из отведений) **ЭК** может напечатать сообщение об отказе от проведения анализа с указанием причины.

Внимание! В случае высокого уровня шума **ЭК** может напечатать предупреждение о возможных ошибках в диагностике с указанием причины!

Результаты анализа могут быть напечатаны в полной или краткой форме. Вместе с результатами анализа **ЭК** может напечатать усредненные

кардиокомплексы по всем отведениям. Нужный формат печати результатов анализа Вы можете выбрать, нажимая кнопку **АНАЛИЗ**.

Полный формат анализа ЭКГ

В полном формате анализа **ЭК** измеряет и печатает по каждому отведению амплитудно-временные параметры зубцов и интервалов ЭКГ, отношение амплитуд зубцов ЭКГ. Кроме того **ЭК** измеряет частоту сердечных сокращений сердца, нерегулярность ритма в процентах, вычисляет значение осей во фронтальной плоскости комплекса QRS и зубцов Р и Т, производит анализ ритма и контурный анализ (синдромальная интерпретация морфологии усредненного Р-QRS-T комплекса). Перечень синдромальных заключений и нормы, используемые для формирования этих заключений, приведены в приложении 2.

Ниже перечислены амплитудно-временные параметры, которые **ЭК** измеряет по каждому отведению ЭКГ и печатает в виде таблицы:

- амплитудные параметры (измеряются в мкВ)

aP1	- амплитуда первой полуволны зубца Р;
aP2	- амплитуда второй полуволны зубца Р;
aQ	- амплитуда зубца Q;
aR1	- амплитуда первого зубца R;
aR2	- амплитуда второго зубца R;
aS1	- амплитуда первого зубца S;
aS2	- амплитуда второго зубца S;
aT+	- амплитуда положительной полуволны Т;
aT-	- амплитуда отрицательной полуволны Т;
J	- амплитуда ЭКГ в точке J;
ST1	- амплитуда ЭКГ в точке ST1 (20мс от точки J);
ST2	- амплитуда ЭКГ в точке ST2 (60мс от точки J);
ST3	- амплитуда ЭКГ в точке ST3 (80мс от точки J).

- временные параметры (измеряются в мс)

dP1	- длительность первой полуволны зубца Р;
dP2	- длительность второй полуволны зубца Р;
dQ	- длительность зубца Q;
dR1	- длительность первого зубца R;
dR2	- длительность второго зубца R;
dS1	- длительность первого зубца S;
dS2	- длительность второго зубца S;
QRS	- длительность комплекса QRS;
PQ	- длительность интервала PQ;
QT	- длительность интервала QT;
QT_c	- расчетное значение скорректированной длительности интервала QT;
RPEAK	- длительность интервала от начала до вершины зубца R;
INTDEF	- длительность интервала от начала QRS комплекса до вершины R зубца (в случае QS – комплекса – до вершины S).

- отношение амплитуд зубцов

R/P	- отношение амплитуды максимального зубца R к амплитуде зубца Р;
R/S	- отношение амплитуды максимального зубца R к амплитуде зубца S;
R/Q	- отношение амплитуды максимального зубца R к амплитуде зубца Q;

Если отношение меньше 0,1 то печатается знак “ < ”, а если больше 9999,9 то печатается знак “ > ”.

Кроме того в нижней части таблицы печатаются глобальные значения длительности: зубца Р (**dP**), QRS комплекса (**dQRS**), интервалов **PQ**, **QT** и **QTc** (значение интервала QT приведенное к ЧСС 60уд/мин.), значение ЧСС, значение осей QRS, Р и Т, а также значение длительности **RR** интервала.

Краткий формат анализа ЭКГ

В кратком формате анализа **ЭК** измеряет и печатает следующие параметры:

P(ms)	- максимальная длительность зубца Р;
QRS(ms)	- максимальная длительность комплекса QRS;
PQ(ms)	- средняя длительность интервала PQ;
QT(ms)	- средняя длительность интервала QT;
QTc(ms)	- средняя длительность интервала QT, приведенная к ЧСС 60уд/мин;
@QRS	- значение оси QRS комплекса;
@P	- значение оси зубца Р;
@T	- значение оси зубца Т;
ЧСС	- значение частоты сердечных сокращений.

Кроме того в кратком формате анализа **ЭК** производит анализ ритма и контурный анализ (синдромальная интерпретация морфологии усредненного Р-QRS-Т комплекса), также как и в полном формате анализа.

Режим регистрации без печати

Нажимая кнопку **ФОРМАТ**, Вы можете выбрать режим регистрации **БЕЗ ПЕЧАТИ**. В этом режиме печать ЭКГ не производится, но могут быть напечатаны усредненные кардиокомплексы и результаты анализа ЭКГ, если они включены, и может быть произведена запись ЭКГ в память. Также этот режим можно использовать для съема ЭКГ в память, если у Вас закончилась бумага или для печати только на внешний принтер.

Печать копии

После завершения регистрации ЭКГ в любом из автоматических режимов можно напечатать копию последней ЭКГ (одну или несколько), для этого достаточно нажать кнопку **КОПИЯ**. Если Вы хотите напечатать копию в другом формате или с другими значениями скорости или усиления, то перед нажатием кнопки **КОПИЯ** измените эти настройки и **ЭК** напечатает копию ЭКГ с учетом внесенных Вами изменений.

Внимание! Печать копии последней ЭКГ возможна до выключения **ЭК**. Если **ЭК** выключить, а потом включить, то печать копии будет невозможна.

Печать на внешнем принтере

Если к **ЭК** подключен внешний принтер и в меню настроек печати включена печать на внешнем принтере, то после завершения регистрации ЭКГ в любом из автоматических режимов **ЭК** произведет печать на внешнем принтере. При этом все отведения ЭКГ будут распечатаны на одном листе формата А4, а если включен анализ ЭКГ, то его результаты будут распечатаны на втором листе.

Передачу данных на внешний принтер Вы можете прервать в любой момент, нажав кнопку **СТОП**, но при этом принтер может напечатать те данные, которые успели передаться.

10.3 РУЧНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЭКГ

При ручной регистрации **ЭК** печатает выбранную Вами группу отведений, которая отображается на экране в момент начала печати.

Ручная регистрация ЭКГ начинается после нажатия кнопки **СТАРТ РУЧН** и продолжается до тех пор, пока Вы не нажмете кнопку **СТОП**.

Внимание! В режиме ручной регистрации анализ ЭКГ и запись ЭКГ в память не производятся. Печать копии ЭКГ и печать на внешнем принтере в ручном режиме невозможна.

Внимание! При ручной регистрации ЭКГ выбирайте форматы **3 ОТВЕДЕНИЯ** или **6 ОТВЕДЕНИЙ**. Остальные форматы не имеют смысла при ручной регистрации и, при выборе форматов **3ОТВ+РИТМ** и **12 ОТВЕДЕНИЙ**, **ЭК** будет производить печать **трех** отведений ЭКГ.

Для проведения ручной регистрации ЭКГ выполните следующие действия:

- произведите регистрацию пациента, если Вы хотите видеть данные пациента напечатанными после ЭКГ. Для этого нажмите кнопку **ПАЦИЕНТ** и в появившемся экране введите данные пациента;
- наложите электроды на пациента, в соответствии с выбранной Вами системой отведений. Убедитесь, что сообщение об обрыве электродов пропало с экрана **ЭК**;
- на экране **ЭК** должна появиться ЭКГ пациента. Если Вы выбрали режим основного экрана **ПО ФОРМАТУ**, то в зависимости от выбранного Вами формата регистрации ЭКГ на экране будут отображаться 3 или 6 отведений ЭКГ. Выберите группу отведений, которую Вы хотите напечатать, нажимая на кнопку **ОТВЕДЕНИЯ** или вращая манипулятор. Если Вы выбрали режим основного экрана **12 ОТВ.**, то на экране **ЭК** будут отображаться все отведения ЭКГ одновременно. В этом режиме наименования отведений, которые будут напечатаны в ручном режиме, будут выделены лиловым цветом. Выбрать нужную Вам группу отведений Вы можете, нажимая на кнопку **ОТВЕДЕНИЯ** или вращая манипулятор;
- Если был выбран режим основного экрана **ПО ФОРМАТУ**, то ЭКГ отображается на экране **ЭК** в том же виде, в каком она будет напечатана на бумаге. Оцените качество ЭКГ сигналов и при необходимости измените усиление и скорость кнопками **УСИЛЕНИЕ** и **СКОРОСТЬ** соответственно. Если необходимо, измените состояние фильтров **ЭК** кнопкой **ФИЛЬТР**;
- дождитесь появления значения ЧСС пациента на экране **ЭК**. Пульс пациента должен сопровождаться звуковым сигналом, если значение громкости не установлено равным нулю;
- нажмите кнопку **СТАРТ РУЧН** для начала ручной регистрации ЭКГ. Для остановки регистрации нажмите кнопку **СТОП**.

В ручном режиме Вы можете не подключать все электроды к пациенту (например, можно подключить только один из грудных электродов). В этом случае в отведениях, соответствующих неподключенным электродам, будет печататься ровная линия, а на экране будет отображаться сообщение об обрыве.

10.4 РЕГИСТРАЦИЯ РИТМА

При регистрации ритма **ЭК** печатает одно или три выбранных Вами отведений для анализа ритма. Возможны следующие форматы регистрации ритма:

- печать одного отведения за 36 секунд в 3 ряда со скоростью 25 мм/с;
- печать одного отведения за 72 секунды в 6 рядов со скоростью 25 мм/с;
- печать одного отведения за 90 секунд в 3 ряда со скоростью 10 мм/с;
- печать одного отведения за 3 минуты в 6 рядов со скоростью 10 мм/с;
- печать одного отведения за 3 минуты в 3 ряда со скоростью 5 мм/с;
- печать трех отведений за 24 секунды в 6 рядов со скоростью 25 мм/с;
- печать трех отведений за 1 минуту в 6 рядов со скоростью 10 мм/с;
- печать одного отведения за 3 минуты в 6 рядов со скоростью 10 мм/с, с проведением анализа variability ритма, печатью оценки variability ритма, построением и печатью графиков ритмограммы, гистограммы и скаттерграммы.

Выбор формата печати ритма производится в меню, в разделе **НАСТРОЙКИ РИТМА** в пункте **ФОРМАТ РИТМА**.

Выбор отведений также производится в разделе **НАСТРОЙКИ РИТМА** в пунктах **ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 1**, **ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 2** и **ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 3**. Отведение, выбранное в пункте **ОТВЕДЕНИЕ РИТМА 1**, будет использоваться в форматах регистрации ритма с одним отведением и при автоматической регистрации в формате **3ОТВ.+РИТМ**.

При регистрации ритма вначале идет съем ЭКГ в память, о чем появляется сообщение на экране, а после завершения съема ЭКГ происходит печать ритма в выбранном формате.

В режиме регистрации ритма возможно проведение анализа ЭКГ и печать усредненных кардиокомплексов. Также возможна запись ЭКГ в память.

Внимание! Печать копии в формате регистрации ритма невозможна, но так как при регистрации ритма в память **ЭК** записываются все снимаемые отведения ЭКГ, то если перед печатью копии Вы установите другой формат, то копия будет напечатана в другом формате.

Для проведения регистрации ритма выполните следующие действия:

- произведите регистрацию пациента, если у Вас включен анализ ЭКГ, включена печать данных пациента или включена запись в память. Для этого нажмите кнопку **ПАЦИЕНТ** и в появившемся экране введите данные пациента;
- наложите электроды на пациента в соответствии с выбранной Вами системой отведений. Убедитесь, что сообщение об обрыве электродов пропало с экрана **ЭК**. Если сообщение об обрыве не пропало, регистрация ритма не может быть начата;
- на экране **ЭК** должна появиться ЭКГ пациента. В зависимости от установленного ранее формата регистрации ЭКГ, на экране будут отображаться 1, 3, 4, 6 или 12 отведений ЭКГ. Если на экране не отображаются отведения, выбранные Вами для регистрации ритма, то увидеть их Вы можете, нажимая на кнопку **ОТВЕДЕНИЯ** или вращая манипулятор;
- оцените качество ЭКГ сигналов и при необходимости измените усиление и скорость кнопками **УСИЛЕНИЕ** и **СКОРОСТЬ** соответственно. Если необходимо, измените состояние фильтров кнопкой **ФИЛЬТР**;
- дождитесь появления значения ЧСС пациента на экране **ЭК**. Пульс пациента должен сопровождаться звуковым сигналом, если значение громкости не равно нулю;
- нажмите кнопку **СТАРТ РИТМ** для начала записи ритма. На экране **ЭК** будут отображаться выбранные отведения ритма (одно или три) и **ЭК** начнет съем

ЭКГ в память, а затем напечатает запись ритма в выбранном Вами формате. После этого **ЭК** напечатает результаты анализа ЭКГ (если анализ включен), запишет ЭКГ в память (если запись в память включена) и вернется к формату регистрации ЭКГ, который был установлен перед печатью ритма.

Регистрацию ритма можно начать и другим способом: нажимая кнопку **ФОРМАТ**, выберите формат **ЗАПИСЬ РИТМА**. На экране **ЭК** появится одно или три отведения ритма в формате, который Вы выбрали в меню. Если выбран формат с регистрацией одного отведения, то кнопкой **ОТВЕДЕНИЯ** или вращением манипулятора Вы можете изменить отведение для регистрации ритма. Если же выбран формат с тремя отведениями, то изменить отведения можно только в меню. Для начала регистрации ритма нажмите кнопку **СТАРТ АВТ**.

Вы можете прекратить регистрацию ритма как на этапе съема ЭКГ в память, так и в процессе печати ритма, нажав на кнопку **СТОП**, но в этом случае анализ ЭКГ проводиться не будет, ЭКГ не будет записана в память.

Внимание! При регистрации ритма в режиме **"АНАЛИЗ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ"** рекомендуется отключить звук сопровождения ритма сердца в меню **ЭК** (установите **ГРОМКОСТЬ** = 0) для исключения навязывания ритма пациенту.

Если Вы хотите произвести регистрацию ритма, используя электроды только на конечностях пациента (без грудных электродов), то для этого выберите в пункте меню **ОТВЕДЕНИЯ** систему отведений по Нэбу или систему отведений **НАБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** без регистрации грудных отведений ЭКГ.

В этом случае будет произведен только анализ variability ритма, а анализ ЭКГ будет невозможен.

10.5 ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФА ПРИ ДЕФИБРИЛЛЯЦИИ

При проведении реанимационных мероприятий с использованием дефибриллятора возможно использование **ЭК** для контроля ЭКГ пациента. В этом случае рекомендуется выбрать систему отведений **НАБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ** без регистрации грудных отведений ЭКГ, при этом наложение грудных электродов необязательно, достаточно наложить электроды только на конечности пациента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: **ЭК** защищен от разряда дефибриллятора в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-25 только при использовании кабеля электродного МТЦ.30.03.501 производства ООО «НПП «Монитор», входящего в комплект поставки. При использовании другого электродного кабеля возможен выход **ЭК** из строя.

При разряде дефибриллятора входные усилители **ЭК** входят в состояние насыщения на 3-4 секунды, это будет видно по форме кривых на экране. В этот период времени печать ЭКГ в автоматическом режиме невозможна, о чем будет предупреждать сообщение об обрыве электродов. Через 3-4 секунды, когда сообщение об обрыве исчезнет с экрана, нажмите кнопку **СТАРТ АВТ** для регистрации ЭКГ. Печать ЭКГ в ручном режиме возможна и при наличии сообщения об обрыве электрода.

Внимание! Насыщение усилителей может произойти и при плохом контакте электродов, поэтому при обрыве одного из электродов на экране **ЭК** появится такое же сообщение об обрыве, как и при разряде дефибриллятора.



11 РАБОТА С ПАМЯТЬЮ

Общие сведения

ЭК имеет встроенную энергонезависимую память для хранения записей ЭКГ. Объем памяти **ЭК** – 128 Мбайт. В память может быть записано около 500 записей ЭКГ длительностью 10 секунд.

Если Вы приобрели **ЭК** с модулем USB, то подключив к разъему **"USB A"** внешнюю USB флэш-память, Вы можете использовать ее для хранения записей ЭКГ.

ЭКГ, записанную в память, можно напечатать на **ЭК**, передать запись ЭКГ в компьютер или стереть. Также можно копировать записи ЭКГ из внутренней памяти во внешнюю и наоборот.

Запись ЭКГ в память

Во внутреннюю или внешнюю память могут быть записаны ЭКГ, снятые в одном из автоматических режимов. Для того, чтобы ЭКГ записывалась в память, необходимо до начала регистрации ЭКГ войти в меню и в разделе **ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ**, в пункте **ЗАПИСЬ**, выбрать **ВНУТРЕННЯЯ ПАМЯТЬ** или **ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ** и в пункте **ДЛИНА ФРАГМЕНТА**, выбрать нужную Вам длительность фрагмента: 10 или 45 секунд.

После этого все ЭКГ, снятые в автоматическом режиме, будут записываться в память.

Внимание! Пункт **ВНЕШНЯЯ ПАМЯТЬ** появляется в меню только при наличии подключенной к **ЭК** USB флэш-памяти.

Внимание! Имейте в виду, что при выборе длительности фрагмента 45 секунд, соответственно увеличится время регистрации ЭКГ и уменьшится количество записей, которое может поместиться в памяти.

Просмотр содержимого памяти

Для просмотра содержимого памяти нажмите кнопку **ПАМЯТЬ**. После этого **ЭК** предложит Вам выбрать внутреннюю или внешнюю память для просмотра, а затем на экране **ЭК** на некоторое время появится сообщение **ЧТЕНИЕ ЗАПИСЕЙ** и после этого появится меню следующего вида:

ЗАПИСАННЫЕ ЭКГ			
ПОСЛЕДНЯЯ ЭКГ	ВСЕ ЗАПИСИ	ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ	ВЫХОД
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 74		СВОБОДНО(%): 82	

В нижней части этого меню отображается количество ЭКГ, хранящихся в памяти **ЭК** и какой процент памяти еще свободен.

В верхней части экрана Вы можете при помощи манипулятора выбрать один из пунктов:

- **ПОСЛЕДНЯЯ ЭКГ** – просмотр информации о последней ЭКГ;
- **ВСЕ ЗАПИСИ** – просмотр списка всех записей ЭКГ в памяти;
- **ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ** – стирание всех записей в памяти **ЭК**;
- **ВЫХОД** – возврат в основную экранную форму.

Для просмотра списка записей выберите пункт **ВСЕ ЗАПИСИ**, при этом на экране появится список записей следующего вида:

ЗАПИСАННЫЕ ЭКГ			
ПАЦИЕНТ	ДАТА	ВРЕМЯ	КОД
ИВАНОВ В.А.	14.07.09	14:55	01
ПЕТРОВ И.Н.	14.07.09	15:25	01
ЛАРИОНОВ А.Н.	14.07.09	15:45	01
КАПИТОНОВ А.Н.	15.07.09	09:45	02
КАЛИНИН А.Н.	15.07.09	11:22	02

[6]-ПЕРЕДАТЬ [7]-УДАЛИТЬ
КНОПКИ СТАРТ АВТ...СТОП-СОРТИРОВКА, [2]/[3]-СТРАНИЦА -/+
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 74 СВОБОДНО(%): 82 СТР. 1/1

В списке белым цветом отображаются записи ЭКГ, имеющие 10 секундную длительность, желтым цветом – с длительностью 45 секунд и зеленым цветом отображаются записи, уже переданные в компьютер или скопированные во внешнюю (или внутреннюю) память в данном сеансе работы с памятью.

Для облегчения поиска нужной записи в **ЭК** предусмотрена возможность сортировки записей:

- нажатие кнопки **СТАРТ АВТ.** позволяет осуществить сортировку записей по фамилии пациента в алфавитном порядке. Повторное нажатие – сортировка в обратном алфавитном порядке;
- нажатие кнопки **СТАРТ РУЧН.** позволяет осуществить сортировку записей по возрастанию или убыванию даты и времени записи;
- нажатие кнопки **СТАРТ РИТМ.** позволяет осуществить сортировку записей по коду записи в алфавитном или в обратном алфавитном порядке;
- при нажатии кнопки **СТОП** данные выводятся без сортировки.

Возле параметра, по которому была произведена сортировка, отображается стрелка, показывающая направление сортировки.

Внимание! Если записей в памяти много, то сортировка может продолжаться довольно длительное время. На время сортировки на экране появляется сообщение **ИДЕТ СОРТИРОВКА**.

В списке записей, вращая манипулятор, выберите нужную Вам ЭКГ и после нажатия на манипулятор на экране **ЭК** появятся сведения об этой записи ЭКГ:

ЗАПИСЬ ЭКГ			
НОМЕР ЭКГ: 02 ДАТА: 14.07.09 ВРЕМЯ: 15:25:34 ВРАЧ: ИВАНОВ В.А. УЧРЕЖДЕНИЕ: БОЛЬНИЦА 2 СИСТЕМА ОТВЕДЕНИЙ: СТАНДАРТНЫЕ ОТВЕДЕНИЯ ФИЛЬТР: АНТИДРЕЙФОВЫЙ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ: 10 сек. ВОД. РИТМ: ВЫКЛ			
ДАННЫЕ ПАЦИЕНТА			
ФИО: ПЕТРОВ И.Н. КОД: 01 ДАТА РОЖДЕНИЯ: 06.06.1963 ПОЛ: МУЖСКОЙ РОСТ: 178 см ВЕС: 64 кг ВОЗРАСТ: лет: 36 месяцев: 7 ПУЛЬС: 64 уд./мин АД: 130/83 мм рт.ст.			
ПЕЧАТЬ ЗАПИСИ	ПЕРЕДАЧА ЗАПИСИ	УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ	ВЫХОД
ГОТОВ К ПЕЧАТИ		5 мм/мВ 25 мм/сек	
6 ОТВЕДЕНИЙ СТАНДАРТ		АНАЛИЗ: ВЫКЛЮЧЕН	
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 74		СВОБОДНО(%): 82 СТР. 1/1	

Печать записи ЭКГ

Эту запись Вы можете напечатать, предварительно установив нужный Вам формат печати, скорость и усиление, используя, как обычно, кнопки **ФОРМАТ**, **СКОРОСТЬ** и **УСИЛЕНИЕ**. Текущее состояние этих параметров индицируется в нижней части экрана, причем значения усиления и скорости будут такими, при которых производилась запись ЭКГ, но при желании Вы можете их изменить. Также Вы можете выбрать нужный Вам формат анализа ЭКГ кнопкой **АНАЛИЗ**. Для печати ЭКГ, при помощи манипулятора выберите пункт **ПЕЧАТЬ ЗАПИСИ** и нажмите манипулятор.

Передача записи ЭКГ

Выбрав пункт **ПЕРЕДАЧА ЗАПИСИ**, Вы можете передать запись:

- в компьютер из внутренней памяти **ЭК** через разъем **СОМ-ПОРТ**, если в **ЭК** установлен модуль СОМ-порта (устанавливается в **ЭК** по опции);
Для приема ЭКГ, на компьютере должно быть установлено ПО для ПЭВМ, поставляемое ООО «НПП «Монитор» по отдельному заказу.
- во внешнюю USB флэш-память из внутренней памяти **ЭК** через разъем **USB-A**, если в **ЭК** установлен модуль USB (устанавливается в **ЭК** по опции);
- во внутреннюю память **ЭК** из внешней USB флэш-памяти через разъем **USB-A**, если в **ЭК** установлен модуль USB (устанавливается в **ЭК** по опции);
- на удаленный компьютер по каналам сотовой связи, если в **ЭК** установлен

модуль GSM (устанавливается в **ЭК** по опции).

Для приема ЭКГ, на удаленном компьютере должно быть установлено ПО для ПЭВМ, поставляемое ООО «НПП «Монитор» по отдельному заказу и должен быть настроен доступ к FTP серверу, как описано в Приложении 5.

Удаление записи ЭКГ

Также в этой экранной форме Вы можете удалить эту запись, выбрав пункт **УДАЛЕНИЕ ЗАПИСИ**. После этого на экране **ЭК** появится сообщение:

**ЗАПИСЬ БУДЕТ УДАЛЕНА!
ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ НАЖМИТЕ 'СТОП'**

Для удаления – нажмите кнопку **СТОП**, если Вы передумали удалять запись, то нажмите любую другую кнопку или манипулятор.

Копирование записи ЭКГ на внешнюю USB флэш-память

Если к **ЭК** подключена внешняя USB флэш-память, то список записей в памяти будет выглядеть немного по-другому:

ЗАПИСАННЫЕ ЭКГ			
ПОСЛЕДНЯЯ ЭКГ	ВСЕ ЗАПИСИ	ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ	ВЫХОД
ПАЦИЕНТ	ДАТА	ВРЕМЯ ↓	КОД
ИВАНОВ В.А.	14.07.09	14:55	01
ПЕТРОВ И.Н.	14.07.09	15:25	01
ЛАРИОНОВ А.Н.	14.07.09	15:45	01
КАПИТОНОВ А.Н.	15.07.09	09:45	02
КАЛИНИН А.Н.	15.07.09	11:22	02

[4]- ВЫДЕЛИТЬ [5]/[6]- КОПИРОВАТЬ ВСЕ/ВЫДЕЛЕННОЕ [7]- УДАЛИТЬ
КНОПКИ СТАРТ АВТ... СТОП-СОРТИРОВКА, [2]/[3]- СТРАНИЦА +/-
ВСЕГО ЗАПИСЕЙ: 74 СВОБОДНО(%): 82 СТР. 1/1

При подключенной внешней памяти в нижней части экрана добавляются сообщения о выделении и копировании записей. Выбрав интересующую Вас запись ЭКГ Вы можете выделить ее, нажав на кнопку “4” и копировать ее на внешнюю память, нажав кнопку “6”. Можно сначала выделить несколько записей, а затем копировать их. Также можно скопировать все записи не выделяя их, а просто нажав на кнопку “5”.

Аналогичным образом происходит копирование записей с внешней памяти во внутреннюю память **ЭК**.

12 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

12.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ЭК не требует никакого регулярного технического обслуживания, кроме очистки, дезинфекции и зарядки аккумуляторов, поэтому его обслуживание проводится медицинским персоналом. Один раз в год должна производиться периодическая калибровка ЭК.

Внимание! Перед очисткой и дезинфекцией ЭК, обязательно отключите его от сети переменного тока.

12.2 ОЧИСТКА

Для очистки ЭК используйте ткань, слегка смоченную водой или этиловым спиртом. Для чистки экрана используйте мягкую ткань, не поцарапайте поверхность экрана.

Перед дальнейшей эксплуатацией тщательно вытрите и высушите ЭК.

Если имеются сомнения в сохранности или работоспособности ЭК, обратитесь к квалифицированному техническому персоналу.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте ацетон и другие растворители для очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не сбрызгивайте, не поливайте ЭК. Не допускайте попадания жидкости внутрь ЭК, а также на разъемы ЭК, блока питания и кабеля электродного.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не погружайте кабель электродный целиком в воду или чистящие растворы, потому что разъем кабеля не водонепроницаемый.

Внимание! Гарантия не распространяется на кабель электродный, имеющий механические повреждения, вызванные неправильным обращением.

При очистке электродов, отсоедините их от кабеля электродного. Электроды следует чистить тканью, смоченной водой. **Не царапайте электроды!**

Ухудшение качества печати может быть связано с загрязнением прижимного резинового ролика или термоголовки термопринтера. Очистку производите при выключенном электрокардиографе.

Для чистки прижимного ролика используйте тампон из ваты, намотанный на жесткую палочку, смоченный водой. Откройте крышку бумажного отсека и очистите доступную часть ролика. Проверните немного ролик термопринтера и продолжайте чистить ролик до полной его очистки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не смачивайте вату бензином, ацетоном или другими веществами, способными повредить резину.

Для чистки термоголовки используйте тампон из ваты, смоченный этиловым спиртом. Откройте крышку бумажного отсека и очистите термоголовку. После окончания очистки дождитесь полного высыхания спирта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для очистки термоголовки не используйте твердые предметы, способные поцарапать ее поверхность.

12.3 ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфицировать ЭК рекомендуется тогда, когда это необходимо в соответствии с практикой, принятой в вашем медицинском учреждении.

Дезинфекцию можно проводить 3% раствором перекиси водорода (H₂O₂) с последующим удалением следов раствора чистой водой или 70% спиртовым раствором.

Для очистки и дезинфекции кабелей используйте 1-2% раствор формальдегида или 70% спиртовой раствор.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Всегда разбавляйте дезинфицирующие средства в соответствии с инструкцией производителя или используйте по возможности максимально низкие концентрации.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не используйте автоклав или ультразвуковой процесс для дезинфекции кабеля электродного и электродов. Максимальная температура обработки кабеля электродного и электродов не более 70°C.

12.4 ОБСЛУЖИВАНИЕ ВСТРОЕННОГО АККУМУЛЯТОРА

Если аккумулятор разрядился в процессе работы или ЭК не использовался более одного месяца и не был подключен к сети переменного тока, то аккумуляторы необходимо подзарядить. Для этого подключите ЭК к сети переменного тока.

На верхней панели засветятся индикаторы "≈" зеленого цвета и "⏻" желтого цвета и начнется заряд аккумуляторов.

Когда аккумулятор зарядится полностью, индикатор "⏻" погаснет. Время полной зарядки составляет 6-7 часов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Хранение ЭК в течение длительного времени без подзарядки аккумуляторов может привести к сокращению их срока службы. При длительном хранении ЭК рекомендуется произвести полную зарядку аккумулятора, извлечь аккумулятор и хранить его отдельно.

Предприятие-изготовитель рекомендует заменять аккумуляторы ЭК каждые 2 года.

Новую аккумуляторную батарею типа 2/ICR18650B (2 Lilon элемента с платой защиты) можно приобрести на предприятии-изготовителе ЭК по адресу: 344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурсанта́ская, 104А, ООО «НПП «Монитор». Тел. (863) 243-61-11, 243-63-77, 231-04-01. E-mail: remont@monitor-ltd.ru. Адрес интернет-сайта: www.monitor-ltd.ru

Также аккумуляторную батарею можно приобрести в сервисных центрах и у дилеров ООО «НПП «Монитор».

12.5 ПЕРИОДИЧЕСКАЯ КАЛИБРОВКА

Калибровка ЭК производится один раз в год при эксплуатации и хранении в соответствии с методикой, приведенной в Приложении 8: в организациях, одобренных производителем или имеющих аккредитацию Ростехрегулирования на выполнение калибровки медицинских изделий (перечень организаций представлен на сайте Ростехрегулирования www.fundmetrology.ru).


Данные о проведенных калибровках записываются в таблицу в разделе 21.

Внимание! При проведении калибровки необходимо отключить антитреморный и антидрейфовый фильтры и установить формат регистрации 3 ОТВЕДЕНИЯ.

13 ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Помехи от электросети

Помехи выглядят как регулярный, периодический сигнал на изолинии ЭКГ, они могут появляться вместе с помехами от мышечной дрожи (тремор).

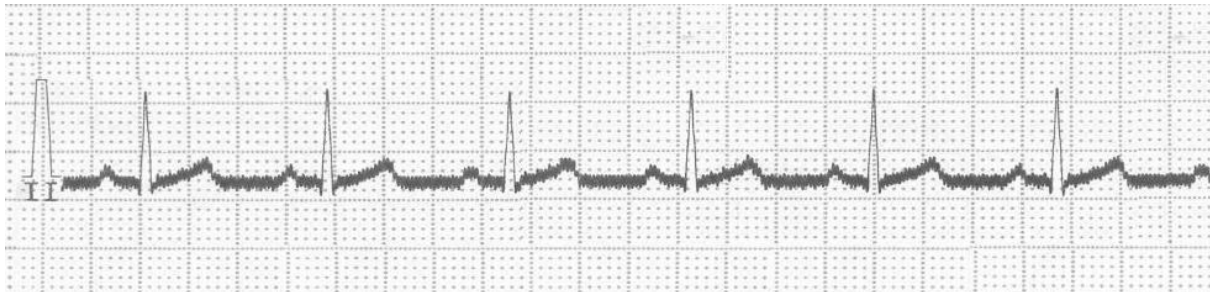


Возможные причины:

- неправильно выбрана частота сетевого фильтра: 50 или 60 Гц;
- грязь или ржавчина на электродах или штекерах кабеля электродного;
- плохой контакт электрода с кожей пациента;
- плохой контакт электрода со штекером кабеля электродного;
- пациент или оператор касается электрода во время регистрации;
- пациент прикасается к металлическим частям кровати или лабораторного стола;
- неисправен кабель электродный, проверьте его, как описано в пункте **ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДНОГО** настоящего руководства;
- наличие поблизости электроприборов, осветительных приборов, скрытой проводки в стенах или полах. Попробуйте отключить **ЭК** от сети и снять ЭКГ при работе от аккумуляторов или отключить другие приборы, или выбрать другое место для съема ЭКГ.

Помехи от мышечной дрожи (тремор)

Помехи выглядят как нерегулярное дрожание кривой ЭКГ. Они могут иметь сходство или появляться вместе с помехами от электросети.

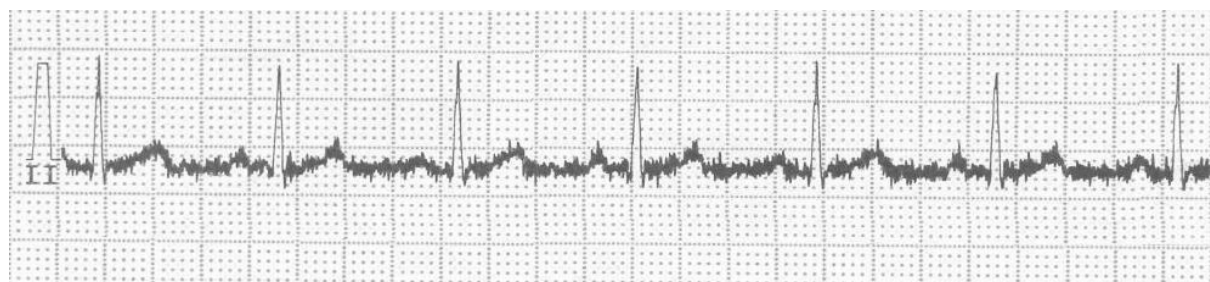


Возможные причины:

- пациент испытывает неудобство, напряжен или нервничает;
- пациент замерз и дрожит;
- пациент имеет нервные или мышечные расстройства (например, болезнь Паркинсона);
- кровать слишком узкая или короткая для удобного расположения конечностей.

Если после устранения всех перечисленных выше причин, помехи остались, то можно включить антитреморный фильтр, но при этом возможно изменение формы ЭКГ (снижение амплитуды до 20% и сглаживание R-зубца).

Дрейф ЭКГ

Помеха выглядит как смещение кривой ЭКГ вверх и вниз.

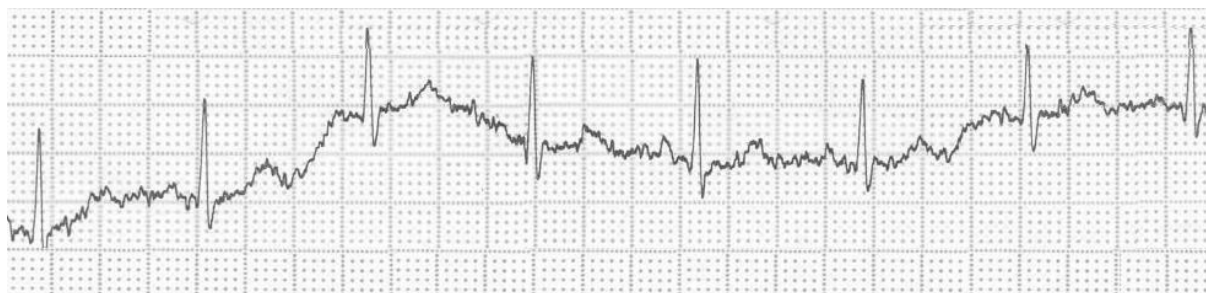

Возможные причины:

- грязь или ржавчина на электродах или штекерах кабеля электродного;
- плохой контакт электрода с кожей пациента;
- плохой контакт электрода со штекером кабеля электродного;
- не нанесено достаточно геля на кожу пациента или гель высох;
- жирная кожа;
- значительное поднятие и опускание груди во время нормального или напряженного дыхания или другие движения пациента.

Если после устранения всех перечисленных выше причин, дрейф остался, то можно включить антидрейфовый фильтр, на форму ЭКГ сигнала он заметного влияния не оказывает.

При возникновении других проблем попробуйте выполнить действия, описанные в таблице.

Проблема	Действие
ЭК не включается при работе от сети: индикаторы $\% \circ$ и $\cong$ не светятся, изображения на экране нет.	1. Проверьте, что шнур питания надежно подсоединен к блоку питания ЭК и розетке электросети. 2. Отсоедините блок питания от ЭК и проверьте напряжение +15В на выходном штекере блока питания, если напряжение не соответствует, то неисправен блок питания. Если напряжение в норме, то неисправен сам ЭК.
ЭК не включается при работе от батареи: индикатор $\% \circ$ не светится, изображения на экране нет.	Возможно, что разряжена батарея. Включите электрокардиограф с питанием от электросети и подзарядите батарею. Если после 6 часов подзарядки батареи ЭК не работает или время работы составляет менее 30 минут, замените батарею на новую.
Не производится регистрация.	1. Проверьте, не включен ли в ЭК формат регистрации ЭКГ БЕЗ ПЕЧАТИ , установите нужный Вам формат кнопкой ФОРМАТ . 2. Проверьте, есть ли бумага в ЭК. 3. Проверьте, что крышка бумажного отсека плотно закрыта 4. Проверьте, что нет сообщения об обрыве электродов. При обрыве электрода регистрация в автоматическом режиме невозможна.

Во время работы от батареи ЭК выключается при печати ЭКГ.	Питание автоматически отключается из-за разряда батареи. Включите электрокардиограф с питанием от электросети и подзарядите батарею.
Регистрация кривых ЭКГ в автоматическом режиме не производится, даже если электроды правильно подсоединены к пациенту, сообщение об обрыве электродов устранить не удастся.	1. Проверьте, не включен ли в ЭК формат регистрации ЭКГ без печати, установите нужный Вам формат кнопкой ФОРМАТ. 2. Проверьте кабель электродный, как описано в пункте ПРОВЕРКА КАБЕЛЯ ЭЛЕКТРОДНОГО настоящего руководства. 3. Проверьте, что электроды чистые. Если какой-либо электрод загрязнен высохшим электродным гелем, регистрация ЭКГ невозможна из-за высокого сопротивления кожа-электрод. 4. Если одновременно используются новые и старые электроды, или многоразовые и одноразовые электроды, то регистрация ЭКГ может быть невозможна из-за высокого напряжения поляризации. 5. При повторном использовании одноразового электрода также возможно появление большого напряжения поляризации, затрудняющее регистрацию ЭКГ. Применяйте только новые одноразовые электроды.
Не выполняется печать результатов анализа.	1. Проверьте, включен ли у Вас анализ ЭКГ. 2. Проверьте, какая система отведений выбрана. Анализ ЭКГ возможен только при выборе стандартной системы отведений. 3. Если во время регистрации ЭКГ произошел кратковременный обрыв электрода, то ЭК не сможет провести анализ ЭКГ. 4. Если включен режим работы с пациентом с водителем ритма, то анализ ЭКГ невозможен.
Пропуски при печати ЭКГ.	Возможно, произошло загрязнение термоголовки. Очистите термоголовку ватным тампоном, слегка смоченным спиртом. При заправке бумаги старайтесь не прикасаться руками к термоголовке.
Бумага перекашивается при протяжке	1. Ровно установите бумагу регистрации, плотно закройте крышку бумажного отсека и попробуйте напечатать снова. 2. Если загрязнена термоголовка или прижимной резиновый валик, то бумага может перекашиваться. Очистите термоголовку и прижимной валик.
Недостаточная яркость экрана	Попробуйте отрегулировать яркость в меню ЭК .
Неверные значения времени и даты на экране.	1. Установите правильную дату и время в меню ЭК. 2. Если дата и время все равно сбиваются после выключения-включения ЭК без подключенного сетевого блока питания, то возможно истек срок службы встроенной литиевой батареи. Срок службы этой батареи около 3-5 лет.

Если устранить причины появления проблем не удалось, то обратитесь в ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель:

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурская, 104А, ООО «НПП «Монитор»
Тел. (863) 243-61-11, 243-63-77, 231-04-01.

E-mail: remont@monitor-ltd.ru

Адрес интернет-сайта предприятия-изготовителя: www.monitor-ltd.ru

14 ХРАНЕНИЕ

Все составные части **ЭК** должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика или потребителя при температуре от 5 до 40 °С и относительной влажности не более 80% на стеллажах не более, чем в 2 ряда. Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

15 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

ЭК должен транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя при температуре от минус 50 до плюс 50 °С и относительной влажности не более 80%.

Оберегайте **ЭК** от воздействия вибрационных и ударных нагрузок при транспортировании. Вибрационные и ударные нагрузки при транспортировании должны соответствовать ГОСТ Р 50444, группа 5.

После транспортирования **ЭК** в условиях отрицательных температур необходимо выдержать его не менее 12 часов в нормальных климатических условиях перед использованием.

16 УТИЛИЗАЦИЯ

16.1 По окончании срока службы электрокардиограф и принадлежности должны быть утилизированы, как отходы класса А по СанПиН 2.1.7.2790, за исключением одноразовых электродов, которые подлежат утилизации по классу Б.

16.2 Одноразовые электроды, прошедшие дезинфекционную обработку или не использованные до конца срока стерильности, утилизируются как отходы класса А.

16.3 Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Цвет пакетов может быть любой, за исключением желтого и красного.

16.4 Отходы класса Б собираются в одноразовую мягкую (пакеты) или твердую (непрокальваемую) упаковку (контейнеры) желтого цвета или имеющие желтую маркировку.

17 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

• Изготовитель гарантирует соответствие **ЭК** требованиям технических условий, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящим руководством.

• Гарантийный срок – 18 месяцев с момента продажи, если иные условия не предусмотрены договором поставки.

• Гарантийный срок аккумулятора, кабеля электродного и комплекта электродов – 12 месяцев с момента продажи и не может быть увеличен.

• Срок хранения до ввода в эксплуатацию – не более 6 месяцев.

• В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет **ЭК** (или его части) в случае выхода **ЭК** из строя при соблюдении правил эксплуатации и хранения, приведенных в данном руководстве, и отсутствии механических повреждений **ЭК** (или его частей), происшедших по вине потребителя.

• В случае выхода **ЭК** из строя из-за наличия производственных дефектов во время действия гарантийных обязательств, гарантийный срок продлевается на время, затраченное на устранение дефектов, о чем делается запись в приложении.

• По вопросам гарантийного ремонта обращайтесь в ремонтную организацию или на предприятие-изготовитель:

344068, г. Ростов-на-Дону, ул. Краснокурская, 104А, ООО «НПП «Монитор»
Тел. (863) 243-61-11, 243-63-77, 231-04-01.

E-mail: remont@monitor-ltd.ru

Адрес интернет сайта предприятия изготовителя: www.monitor-ltd.ru

18 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах **ЭК12Т-01-«Р-Д»** вариант исполнения **«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141»** зав.№ _____ соответствует техническим условиям ТУ 2660-005-24149103-2018 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись лица,
ответственного
за приемку _____

19 СЕРТИФИКАТ О КАЛИБРОВКЕ

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах **ЭК12Т-01-«Р-Д»** вариант исполнения **«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141»** зав.№ _____ прошел калибровку в соответствии с методикой в Приложении 8 и признан годным к эксплуатации.

Дата калибровки _____

Калибровку произвел _____
(подпись, Ф.И.О.)

20 ДАННЫЕ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Электрокардиограф 3-6-12 канальный с регистрацией ЭКГ в ручном и автоматическом режимах **ЭК12Т-01-«Р-Д»** вариант исполнения **«ЭК12Т-01-«Р-Д»/141»** зав.№ _____ введен в эксплуатацию.

Дата ввода в эксплуатацию _____

Ввод в эксплуатацию произвел _____
(подпись, дата, печать)



21 ДАННЫЕ О КАЛИБРОВКАХ

Данные о периодических калибровках электрокардиографа должны заноситься в таблицу:

Дата калибровки	Результат калибровки	Фамилия калибровщика

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Общие технические характеристики

1.1 Общие характеристики **ЭК** приведены в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Значение
1	Соответствие конструкторской документации	МТЦ. 31.00.000
2	Питание от сети переменного тока	от 85 до 242В, 50 или 60Гц
3	Питание от бортовой сети автомобиля	от 12 до 16В
4	Питание от встроенной аккумуляторной батареи	7,4В ± 1,2В
5	Потребляемая мощность	не более 30ВА
6	Масса в полном комплекте поставки	не более 5,0 кг
7	Масса блока электрокардиографического	не более 1,2 кг
8	Габаритные размеры блока электрокардиографического	не более 260х180х70 мм
9	Тип дисплея	цветной TFT
10	Размер экрана по диагонали	141 мм±2%
11	Разрешающая способность	640х480 точек
12	Регистрация в системе отведений	стандартные, по Нэбу, по Кабрера и по Франку
13	Разрешающая способность печати при скорости 25 мм/с	64 точки/мм вдоль бумаги 8 точек/мм поперек бумаги
14	Тип термобумаги	рулонная, в пачках
15	Ширина термобумаги	110 мм
16	Память	внутренняя до 500 ЭКГ, внешняя – USB флэш
17	Возможные интерфейсы для связи с компьютером	RS 232, USB, GSM, Bluetooth
18	Работа в автомобиле скорой медицинской помощи	да
19	Одновременная регистрация 12 отведений	поперек бумаги

1.2 **ЭК** обеспечивает следующие виды регистраций:

- 1) регистрацию 12-ти отведений одновременно и вывод их на печать поперек бумаги с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 40 мм;
- 2) регистрацию 12-ти отведений и вывод их на печать по 6 отведений вдоль бумаги в ручном или автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 20 мм;
- 3) регистрацию 12-ти отведений и вывод их на печать по 3 отведения или по 3 отведения плюс «ритм» вдоль бумаги в ручном или автоматическом режиме с эффективной шириной записи каждого отведения не менее 40 мм;
- 4) регистрацию 12-ти отведений в «режиме проб» – многократная регистрация ЭКГ с заданным интервалом в диапазоне от 1 до 90 мин. В течение заданного времени наблюдения 5-180 мин;
- 5) регистрацию ритма в течение заданного времени;
- 6) основные параметры съема электрокардиограммы: режим, чувствительность, скорость, включение антитреморного фильтра и антидрейфового фильтра, ЧСС, дата, время и параметры ЭКГ регистрируются рядом с ЭКГ.

1.3 На дисплее прибора отображаются ЭКГ, параметры режима съема, ЧСС, меню, состояние аккумулятора, обрыв электродов, выбранные фильтры, значения усиления, скорости, формат отведений, виды анализа ЭКГ и другие параметры. ЭК может иметь и другие сервисные функции.

1.4 При нарушении контакта электродов **ЭК** обеспечивает индикацию наименования электрода с нарушенным контактом.

1.5 При подключении ЭК к компьютеру через интерфейс RS 232, USB или Bluetooth обеспечивается работа установленных на компьютере из комплекта поставки программных модулей «ЭКГ-Ревю», «ArMaSoft-12-Cardio», «Stress-12-Cardio», а при наличии модуля GSM программного модуля «ArMaSoft-12-Tele». Работа модулей осуществляется в соответствии с технической документацией на них.

2 Технические параметры

2.1 Диапазон измерения ЧСС электрокардиографом – от 30 до 300 уд/мин. Абсолютная погрешность измерения ЧСС в пределах ± 2 уд/мин.

2.2 ЭК измеряет и регистрирует амплитуды зубцов P, Q, R, S, ST, T во всех отведениях ЭКГ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-25.

2.3 ЭК измеряет и регистрирует во всех отведениях ЭКГ интервалы RR, PQ (PR), QT, QRS, длительности зубцов P, Q, R и S в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-25.

2.4 ЭК вычисляет угол α (α QRS) ($\arctg$ отношения суммы амплитуд зубцов Q, R, S, R', S' в отведении aVF к сумме этих же зубцов в отведении I) в диапазоне от -180° до 180° с погрешностью $\pm 1^\circ$.

2.5 Входной импеданс – не менее 10 МОм в диапазоне смещения постоянного входного напряжения ± 300 мВ.

2.6 ЭК обеспечивает ослабление синфазного сигнала в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-25.

2.7 Напряжение шумов, приведенных ко входу, не превышает в размахе 30 мкВ.

2.8 ЭК обеспечивает следующие значения коэффициента усиления: 2.5, 5, 10, 20 и 40 мм/мВ. Значение коэффициента усиления указывается в ЭКГ отчете. Пределы допускаемой относительной погрешности установки коэффициента усиления $\pm 5\%$.

2.9 Амплитудно-частотная характеристика ЭК соответствует ГОСТ Р МЭК 60601-2-25 в диапазоне от 0,05 Гц до 150 Гц.

2.10 ЭК обеспечивает регистрацию входных сигналов ± 5 мВ (размах 10 мВ) во всех отведениях в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-2-25.

2.11 ЭК обеспечивает следующие скорости записи ЭКГ - 5, 10, 12.5, 25 и 50 мм/с. Погрешность установки скорости не более $\pm 5\%$ в соответствии с ГОСТ Р МЭК 60601-1 и ГОСТ Р МЭК 60601-2-25.

2.12 ЭК регистрирует следующую справочную информацию:

- заключение о положении электрической оси сердца (ЭОС);
- заключение о смещении сегмента ST с указанием отведений, в которых обнаружено смещение;
- заключение об амплитудно-временных параметрах комплекса QRS (контурного анализа) с указанием отведений, в которых обнаружены отклонения.

2.13 В ЭК обеспечиваются:

- заключение о регулярности ритма, построение ритмограммы и скаттерограммы;
- печать ритма по одному или трем выбранным отведениям;
- печать ФИО пациента, наименование лечебного учреждения, ФИО врача;
- запоминание до 10 профилей (фамилии врачей и установленные ими настройки);
- автостарт при подключении последнего электрода;
- подключение к разъему USB A внешней стандартной компьютерной клавиатуры или флэш-памяти.

3 Эксплуатационные характеристики

3.1 Средняя наработка на отказ T_o – не менее 1600 ч. По последствиям отказа ЭК относится к классу В по ГОСТ Р 50444 и РД 50-707.

3.2 Средний срок службы до списания – не менее 5 лет при среднем времени эксплуатации 8 часов в сутки.

3.3 Время готовности к работе – не более 1 мин.

3.4 Время непрерывной работы ЭК – не менее 8 часов в сутки.

3.5 ЭК при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 и ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ4.2.

3.6 ЭК при транспортировании устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

3.7 ЭК при эксплуатации обладает устойчивостью к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 5 (для работы в автомобиле скорой медицинской помощи).

3.8 ЭК в транспортной упаковке обладает прочностью к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 5.

4 Маркировка

4.1 Маркировка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р МЭК 60601-1 и ГОСТ Р МЭК 60601-2-25.

4.2 На каждом **ЭК** указаны:

- товарный знак предприятия-изготовителя;
- сокращенное наименование, страна и город предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение типа **ЭК**;
- обозначение технических условий;
- номинальное напряжение питания и частота переменного тока;
- потребляемая мощность;
- номер регистрационного удостоверения;
- знак наличия маркировки CE  ;
- знаки класса и типа электробезопасности по ГОСТ Р МЭК 60601-1:



изделие класса II



рабочая часть типа CF с защитой от разряда дефибриллятора;

- знак соответствия в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50460  ;
- знак обращения к инструкции по эксплуатации  ;
- знак электронных и электрических отходов  ;
- штрих-код;
- заводской номер .

4.3 На каждой коробке указаны:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение типа **ЭК**;
- наименование и адрес изготовителя;
- обозначение технических условий;
- масса груза;
- изображение **ЭК**;
- знак «вверх» по ГОСТ 14192  (правильное положение груза - вертикальное);
- знак «хрупкое, обращаться осторожно» по ГОСТ 14192  ;
- знак «беречь от влаги» по ГОСТ 14192  ;
- предел по количеству ярусов в штабеле по ГОСТ 14192  ;
- грузополучатель;
- пункт назначения;
- грузоотправитель;
- серийный номер .
- номер счета;
- год и месяц упаковывания **ЭК**.

5 Упаковка

5.1 Упаковка соответствует требованиям ГОСТ Р 50444.

5.2 **ЭК** вместе с запасными частями, принадлежностями и эксплуатационной документацией укладывается в сумку, а затем – в коробки из картона типа 1 по ГОСТ 12301, изготовленные из коробочного картона в соответствии с требованиями ГОСТ 7933.

5.3 Коробка оклеивается лентой из бумаги в соответствии с требованиями ГОСТ 8828.

5.4 В каждую коробку с **ЭК** вкладывается упаковочный лист в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

6 Соответствие действующим стандартам

6.1 **ЭК** соответствует требованиям ГОСТ Р 50444, ТУ 2660-005-24149103-2018 и комплекта конструкторской документации.

6.2 По безопасности **ЭК** соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1, ГОСТ Р МЭК 60601-2-25 для изделий с внутренним источником питания, тип CF с защитой от разряда дефибриллятора по ГОСТ Р МЭК 60601-2-25. **ЭК** выполняется по классу защиты II.

6.3 Требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик соответствуют ГОСТ Р МЭК 60601-2-25 для анализирующих многоканальных электрокардиографов.

6.4 По электромагнитной совместимости **ЭК** соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.

6.5 Подключение **ЭК** к другим устройствам через интерфейсы соответствует требованиям ГОСТ IEC 60601-1-1.

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ АМПЛИТУД И ДЛИТЕЛЬНОСТЕЙ ЭЛЕМЕНТОВ ЭКГ

ЭК осуществляет обработку ЭКГ длительностью 10 секунд. Для обработки используется ЭКГ, отфильтрованная фильтрами, заданными пользователем. Независимо от того, был ли включен антидрейфовый фильтр, дрейф изолинии будет устранен в процессе обработки ЭКГ.

Первый этап обработки ЭКГ заключается в поиске опорных точек для усреднения PQRS-комплексов ЭКГ. С этой целью ищется отведение с максимальной амплитудой сигнала, затем определяются точки для усреднения комплексов, и осуществляется расчет усредненного комплекса по всем отведениям. Также на первом этапе осуществляется оценка качества сигнала ЭКГ. В случае обнаружения высокого уровня шума дальнейшая обработка не производится и пользователю выдается соответствующее сообщение. На этом этапе также определяется средний RR-интервал. Перед усреднением комплексов осуществляется коррекция дрейфа изолинии.

Второй этап обработки ЭКГ заключается в анализе полученных усредненных комплексов с целью обнаружения элементов ЭКГ. Сначала ищутся зубцы Q, R, и S и фиксируется положение QRS-комплекса в каждом отведении. Затем слева от найденного QRS-комплекса осуществляется поиск зубца P. Если зубец P обнаружен, осуществляется расчет уровня изолинии на интервале PQ (PR), если нет, то за изолинию берется усредненный уровень сигнала на участке с минимальным уровнем шума. После этого осуществляется поиск зубца T справа от QRS-комплекса, расчет амплитуд зубцов, расчет смещения ST-сегмента.

Третий этап обработки ЭКГ заключается в расчете глобальных и локальных длительностей интервалов ЭКГ. Локальные длительности зубцов, а также QRS-комплекса рассчитываются по каждому отведению отдельно. За точку начала каждого зубца берется точка его пересечения с изолинией. Глобальные длительности QRS-комплекса, интервалов PQ и QT рассчитываются исходя из самых крайних точек зубцов по всем отведениям.

Исходя из полученных данных, осуществляется расчет положения электрической оси сердца, а также сравнение с нормативами для данного пациента. В случае отклонения от нормативов выдается соответствующее сообщение с указанием отведения и параметра, вышедшего за пределы нормы.

СПИСОК ОСНОВНЫХ СИНДРОМАЛЬНЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЙ И ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ

1. Количественные показатели точности диагностических интерпретационных значений (контурный анализ)

ЭКГ пациентов с кардиологическими диагнозами подтверждены данными клинических исследований, которые проводились для установления диагноза. Результаты показателей точности по контурному анализу и по анализу ритма приведены в таблицах.

Контурный анализ

Диагностическая категория	Число испытуемых ЭКГ	Чувствительность, %	Специфичность, %	Позитивное прогностическое значение, %
Изменения предсердий	46	75	92	97
Гипертрофия левого желудочка	129	60	91	93
Гипертрофия правого желудочка	75	28	98	95
Нарушения внутрижелудочковой проводимости (без учета WPW синдрома)	136	78	89	90
Старый (перенесенный инфаркт миокарда)	160	82	85	97
Острый инфаркт миокарда	128	78	85	96
Ишемия миокарда (нарушения процессов реполяризации)	112	85	92	98

Анализ ритма сердца.

Диагностическая категория	Число испытуемых ЭКГ	Чувствительность, %	Специфичность, %	Позитивное прогностическое значение, %
Синусовый ритм	950	97	97	99
Синусовая аритмия	680	96	95	99
Фибрилляция/трепетание предсердий	118	86	94	99
A-V блокада I- степени	57	72	86	95
Желудочковая/предсердная экстрасистолия	183	89	81	97
Эпизоды тахикардии (суправентрикулярная, желудочковая)	61	78	81	95

2. Предварительные комментарии или заключения, относящиеся к условиям регистрации ЭКГ

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
2.1	ЭКГ не пригодно для анализа в отведениях V1 ... V6.	Амплитуда QRS <0,35 мВ в отв. V _n или амплитуда QRS в отв. V _{n-1} /V _{n+1} <20% амплитуды QRS в отв. V _n .	“Плохие отведения” исключаются из анализа.
2.2	ЭКГ не пригодно для анализа в отведениях I, II, III, aVR, aVF, aVL. Дальнейший анализ ЭКГ не проводился.	Амплитуда QRS <0,1 мВ.	При наличии низкоамплитудной записи в отведениях от конечностей блокируется синдромальная интерпретация.
2.3	Возможны ошибки измерений. Проверьте данные!	Амплитудно-временные параметры зубца Р не соответствуют максимальным половозрастным нормативам.	Блокируется синдромальная интерпретация.
2.4	Вероятно перепутаны электроды R и L. Дальнейший анализ ЭКГ не проводился.	Отрицательный QRS вектор в отведении I и дополнительные критерии.	Блокируется синдромальная интерпретация.
2.5	Вероятно декстрокardia. Поменяйте местами электроды R и L и повторите запись.	Отрицательный вектор QRS и зубца Т в отведении I. Умеренное (≤500 мкВ) преобладание R в отведении V6.	Алгоритм учитывает также значение осей зубца Р и комплекса QRS и динамику амплитуд или площадей зубца R и комплекса QRS в грудных отведениях.
2.6	Ритм кардиостимулятора. Анализ ЭКГ не производился из-за наличия импульсов кардиостимулятора.	Система автоматически идентифицирует импульс имплантированного кардиостимулятора по его характерным амплитудно-частотным характеристикам.	Блокируются автоматические измерения амплитудно-временных параметров, синдромальная интерпретация и диагностика нарушений ритма.
2.7	ВНИМАНИЕ! Заключения, относящиеся к отведениям с волнами трепетаний предсердий могут быть не корректными из-за ошибок измерений.	Сообщение при обнаружении трепетания предсердий.	Не влияет на результаты автоматической синдромальной интерпретации. Акцентирует внимание врача на необходимости тщательного анализа данных.

3. Предварительные заключения, относящиеся к измерению интервалов

3.1. PR-интервал

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
3.1.1	Короткий PR: ? Предвозбуждение желудочков.	Значение PR интервала меньше должных величин (по возрасту).	Только для синусового ритма.
3.1.2	Атриовентрикулярная блокада первой степени.	Значение PR интервала превышают верхнюю границу нормы (с учетом возраста и ЧСС).	Только для синусового ритма.

3.2. QT-интервал

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
3.2.1	Удлинённый QT _c интервал: ? Гипокалемия или слияние T-U зубцов.	Длительность QT интервала, нормированная по ЧСС $\geq 0,46/0,47$ (для женщин старше 50 лет) при ЧСС < 110 уд/мин.	Оценивается при длительности QRS не более 0,12с.
3.2.2	Удлинённый QT _c интервал: ? Гипокалемия или слияние T-U /T-P зубцов.	То же при ЧСС ≥ 110 уд/мин.	Оценивается при ЧСС не более 125 ударов и при длительности QRS не более 0,12с.
3.2.3	Укороченный QT _c интервал: ? Гиперкальцемиа.	Длительность QT интервала, нормированная по ЧСС $\leq 0,35$ с.	

4. Предварительные заключения, относящиеся к измерению предсердий

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
4.1	Неспецифические изменения зубца Р.	Низкоамплитудный широкий зубец Р ($> 0,125$ с).	
4.2	Возможно увеличение правого предсердия.	Острый зубец Р с увеличенной амплитудой в отведениях II, III, V1.	
4.3	Возможно увеличение левого предсердия.	Широкий (> 125 мс) двухфазный зубец Р с отрицательной полуволной в отведениях V1, V2.	
4.4	Возможно увеличение обоих предсердий.	Широкий, двухфазный зубец Р с высокоамплитудной (> 250 мкВ) положительной полуволной в отведениях V1, V2.	

5. Предварительные заключения, относящиеся к отклонению оси QRS

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
5.1	Неопределённое положение электрической оси сердца.	S1, S2, S3 тип кривой - наличие зубца S в отведениях I, II, III.	Учитываются также соотношения амплитуд зубцов Q, R, S.
5.2	Горизонтальное положение ЭОС во фронтальной плоскости.	$0^\circ < \text{ось QRS} < 30^\circ$	
5.3	Нормальное положение ЭОС во фронтальной плоскости.	$30^\circ < \text{ось QRS} \leq 70^\circ$	
5.4	Вертикальное положение ЭОС во фронтальной плоскости.	$70^\circ < \text{ось QRS} \leq 90^\circ$	
5.5	Пограничное отклонение ЭОС влево.	$-30^\circ < \text{ось QRS} \leq 0^\circ$	

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
5.6	Отклонение электрической оси сердца (ЭОС) влево.	$-45^{\circ} < \text{ось QRS} \leq -30^{\circ}$	
5.7	Выраженное отклонение ЭОС влево.	$-120^{\circ} < \text{ось QRS} \leq -45^{\circ}$	
5.8	Пограничное отклонение вправо.	$90^{\circ} < \text{ось QRS} < 110^{\circ}$	
5.9	Отклонение ЭОС вправо.	$110^{\circ} \leq \text{ось ORS} < 125^{\circ}$	
5.10	Выраженное отклонение ЭОС вправо.	$125^{\circ} \leq \text{ось ORS} < 180^{\circ}$	
5.11	Неопределенное положение ЭОС.	$\text{ось ORS} > 180^{\circ}$	
5.12	Резкое отклонение ЭОС во фронтальной плоскости.	$-180^{\circ} < \text{ось ORS} < -120^{\circ}$	
5.13	Поворот вокруг продольной оси сердца по часовой стрелке.	Переходная зона смещена влево.	При отсутствии грубых нарушений внутрижелудочковой проводимости.
5.14	Поворот вокруг продольной оси сердца против часовой стрелки	Переходная зона смещена вправо.	При отсутствии грубых нарушений внутрижелудочковой проводимости. Дополнительно оценивается соотношение абсолютных значений амплитуды зубцов Q, S, S1, R, R1 в отведениях I, III, V4, V5, V6

6. Предварительные заключения, относящиеся к нарушениям проводимости

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
6.1	Полный блок левой ножки пучка Гиса.	Длительность QRS > 125 мс Отрицательный вектор QRS в отведениях V1, V2, зазубрины QRS в латеральных отведениях и другие критерии.*	*Приведены основные критерии. Алгоритм использует в адаптивном режиме более 27 критериев, измеряемых в отведениях I, V1, V2, V5, V6.
6.2	Нарушения внутрижелудочковой проводимости по типу полного блока левой ножки пучка Гиса.	Основным отличием от заключения 6.1 является сохранение эмбрионального зубца R в отведениях V1, V2.	Заключение используется как инструмент дифференциальной диагностики. Отражает наличие остаточной проводимости по левой ножке пучка Гиса. Имеет клиническое значение при динамическом наблюдении как показатель эффективности лечения.
6.3	Неполный блок левой ножки пучка Гиса.	$0,10\text{с} < \text{длительность QRS в отведениях V1, V2, V5, V6} < 0,13\text{с}$	При отсутствии заключений 6.1 и 6.2. Учитываются также значения амплитуды и длительности зубцов Q, R и S.
6.4	Блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса.	Длительность QRS $< 0,12\text{с}$, $-120^{\circ} < \text{ось QRS} < -45^{\circ}$, $ S > R$ в отведении II.	Оценивается также время внутреннего отклонения (INDEF) и амплитуда Q_{aVL} , S_{V5}
6.5	Возможна блокада передней ветви левой ножки пучка Гиса.	Основные признаки совпадают с заключением 6.4. $-45^{\circ} < \text{ось QRS} \leq -45^{\circ}$.	То же.

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
6.6	Блокада задней ножки пучка Гиса.	Длительность QRS <0,12с, 90° < ось QRS <180°, R _{II} ≥ 0,8 мВ, R _{III} ≥ 1 мВ.	При отсутствии гипертрофии правого желудочка. Оценивается также амплитуда R _I , R _{III} и наличие зубца Q.
6.7	Полный блок правой ножки пучка Гиса.	Длительность QRS >0,12 с. Длительность R или R _I в отведениях V ₁ , V ₂ >0,045с. (T-) _{VI} < -0,1мВ. Ось QRS вне пределов (-60° и -120°) и (100° и 135°).	Оценивается также длительность и амплитуда S и S _I , отношение амплитуд R/S в отведениях I, V ₅ , V ₆ , наличие гипертрофии правого желудочка, амплитуда R и R _I в отведениях II и III.
6.8	Полный блок правой ножки пучка Гиса с блокадой передней ветви левой ножки.	Основные критерии по п.6.7 -120° < ось QRS < -60°.	
6.9	Полный блок правой ножки пучка Гиса с блокадой задней ветви левой ножки.	Основные критерии по п.6.7. 100° < ось QRS ≤135°. Нет гипертрофии правого желудочка.	Учитывается также амплитуда R и R _I в отведениях II и III.
6.10	Нарушения внутрижелудочковой проводимости по типу полного блока правой ножки пучка Гиса.	Длительность QRS >0, 12с. В отведении V ₁ нет дельта-волны. Длительность S (S _I) в отведении I, V ₅ , V ₆ >0,035с и другие признаки.	При постановке заключения 6.10 (в отличие от заключения 6.7), не используются ограничения по диапазону допустимых значений оси QRS, а также применяются менее строгие допуски по значениям R/S и R _I /S _I . В клиническом смысле заключение 6.10 интерпретируется как признак сохранения остаточной проводимости по правой ножке пучка Гиса. Имеет значение при динамических наблюдениях как показатель эффективности лечения.
6.11	Неполный блок правой ножки пучка Гиса.	Длительность QRS <125мс. RR1 комплекс в отведениях V ₁ , V ₂ .	Амплитудный критерий по признаку R _I изменяется в зависимости от уровня шума, а также от наличия мерцания или трепетания предсердий. Существенные отклонения точки J.
6.12	Минимальные нарушения внутрижелудочковой проводимости.	Зазубрины QRS в отведениях от конечностей и грудных отведениях.	
6.13	Очаговые нарушения внутрижелудочковой проводимости.		
6.14	WPW синдром типа А.	Вероятность наличия дельта-волны в двух грудных отведениях >90%. Положительный вектор QRS в отведении V ₁ .	Для идентификации дельта-волн применяется вероятностный алгоритм, использующий в качестве входной информации полное геометрическое описание комплекса QRS.
6.15	WPW синдром типа В.	Вероятность наличия дельты волны в 2-х грудных отведениях >90%. Отрицательный вектор QRS в отведении V ₁ .	Оцениваются также длительность комплекса QRS и длительность PR(PQ) интервала.

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
6.16	Возможно WPW синдром типа A/ Исключить WPW синдром типа A.	Вероятность наличия дельта-волны в грудных отведениях: >70% (ранг диагноза "возможно"), >30% (ранг диагноза "исключить"). Положительный вектор QRS в отведении V1.	Оценивается также амплитуда зубца R.
6.17	Возможно WPW синдром типа B/ Исключить WPW синдром типа B.	Вероятность наличия дельта-волны в грудных отведениях: >70% (ранг диагноза "возможно"), >50% (ранг диагноза "исключить") Отрицательный вектор QRS в отведении V1.	

7. Предварительные заключения, относящиеся к гипертрофии желудочков

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
7.1	Гипертрофия левого желудочка.	Сумма баллов > 6.	Каждый из диагностических критериев имеет определенный вес (число баллов). Используются общепринятые амплитудные критерии в соответствии с половозрастными нормативами ($R_{I, aVL, V5, V6}$), индекс Левиса, индекс Соколова. Учитывается наличие отрицательной полуволны P_{V1} , положение оси QRS во фронтальной плоскости.
7.2	Вероятно гипертрофия левого желудочка.	Сумма баллов > 5.	
7.3	Возможно гипертрофия левого желудочка.	Сумма баллов = 4.	
7.4	Дополнение 1 к заключениям 7.1.-7.3: "...с вторичными изменениями ST сегмента и (или) зубца Т".	Косо-нисходящая депрессия ST сегмента, изолированная, или с инверсией зубца Т.	Оценивается по отведениям V1, V2, aVF при отсутствии позиционных отведений.
7.5	Дополнение 2 к заключениям 7.1-7.3: "...с изменениями ST сегмента и (или) зубца Т подозрительными в отношении ишемии миокарда".	Горизонтальная депрессия сегмента ST сегмента, изолированная, с инверсией зубца Т.	

№	Заключение	Основные критерии	Дополнительные критерии и комментарии
7.6	Гипертрофия правого желудочка.	Сумма баллов ≥ 6 .	Каждый из диагностических критериев имеет определенный вес (число баллов). Оценивается амплитуда зубцов S, R, T индекс Левиса на соответствие общепринятым половозрастным нормативам. Учитывается положение оси QRS во фронтальной плоскости и другие признаки, длительность QRS наличие/отсутствие перенесенных инфарктов миокарда и нарушений проводимости.
7.7	Вероятно гипертрофия правого желудочка.	Сумма баллов = 5.	
7.8	Возможно гипертрофия правого желудочка.	Сумма баллов = 4.	
7.9	Дополнение 1 к заключениям 7.6-7.8: "...с вторичными изменениями сегмента S-T".	Косо-нисходящая депрессия ST-сегмента, изолированная или с инверсией зубца T.	Оценивается по отведениям V1, V2, aVF при отсутствии позиционных изменений.
7.10	Гипертрофия обоих желудочков.	Число баллов ГЛЖ ≥ 6 . Число баллов ГПЖ ≥ 6 .	Максимальный вектор QRS > возрастных нормативов.
7.11	Вероятно гипертрофия обоих желудочков.	Число баллов ГЛЖ = 5. Число баллов ГПЖ = 5.	Максимальный вектор QRS > возрастных нормативов.
7.12	Возможно гипертрофия обоих желудочков.	Число баллов ГЛЖ = 4. Число баллов ГПЖ = 4.	
7.13	Дополнение к заключениям 7.10-7.12: "...с вторичными ST-T изменениями"	При наличии горизонтальной депрессии ST сегмента в сочетании с инверсией зубца T.	При отсутствии позиционных изменений.

8. Предварительные заключения, относящиеся к инфарктам миокарда

8.1 Структура диагностического заключения.

Заключения группы 8 (инфаркты миокарда) являются комплексными и состоят из следующих блоков:

Блок 1. [Достоверность заключения]

Параметр [Достоверность заключения] может принимать следующие значения:

- высоко-достоверное;
- вероятно достоверное;
- возможно достоверное.

Слова "высоко-достоверное" в тексте заключения не используются. То есть, заключение "Задне-нижний старый инфаркт миокарда" имеет ранг "Высоко-достоверный".

Уровень достоверности заключения отражает чувствительность (вероятность положительного результата диагностики заболевания при его наличии) и специфичность (вероятность отрицательного результата диагностики заболевания при его отсутствии) используемых диагностических критериев.

Заключения ранга "высоко-достоверное" имеют самую высокую специфичность и самую низкую чувствительность. Заключения с рангом "возможно" имеют самую высокую чувствительность и низкую специфичность.

Логика работы программы построена так, что "инфарктные признаки" конкретной электрокардиограммы последовательно оцениваются на соответствие критериям, имеющим различные уровни чувствительности и специфичности. Применение многоуровневой

диагностической логики обеспечивает оптимальное соотношение чувствительности и специфичности. Благодаря этому, кумулятивная точность автоматической диагностики инфарктов миокарда составляет не менее 95-98%.

Блок 2. [Стадия инфаркта]

Параметр [Стадия инфаркта] может принимать следующие значения:

- острая стадия инфаркта;
- подострая стадия инфаркта;
- перенесенный (старый) инфаркт миокарда;
- инфаркт миокарда неопределенного возраста.

Термин “Инфаркт миокарда неопределенного возраста” нуждается в пояснениях. При врачебной расшифровке электрокардиограмм этот термин не используется. Более того, определение возраста инфаркта миокарда является одной из наиболее ответственных задач врача функциональной диагностики. Для решения этой задачи врач исследует ЭКГ в динамике, изучает анамнез и клиническое состояние пациента, привлекает данные лабораторных исследований и т.д.

Программа, в отличие от врача, формулирует заключение только на основе информации, содержащейся в конкретной электрокардиограмме. Часто этой информации бывает недостаточно для достоверного определения возраста инфаркта. Например, изменения ST-сегмента или зубца Т, подозрительные в отношении наличия инфаркта миокарда, могут быть вызваны позиционными изменениями электрокардиограммы.

Термин “Инфаркт миокарда неопределенного возраста” используется во всех случаях, когда электрокардиограмма содержит достоверные признаки наличия инфаркта миокарда по критерию зубца Q, но параметры ST-сегмента и зубца Т не позволяют однозначно определить стадию инфаркта. Использование этого термина акцентирует внимание врача на необходимости принятия им конкретного диагностического решения в условиях неопределенности компьютерного заключения.

Блок 3. [Локализация]

Параметр [Локализация] может принимать следующие значения:

- задне-нижняя стенка (отведения II, III, aVF);
- боковая стенка (отведения I, V5, V6);
- передне-перегородочная (отведения V2, V3, V4);
- передняя стенка (отведения V3, V4);
- межжелудочковая перегородка (отведения V1, V2);
- задняя стенка (“высокий задний инфаркт” / “постеро-базальный”) (отведения V1, V2);
- передне-боковая стенка (отведения I, aVL, V2, V3, V4, V5);
- обширный инфаркт миокарда (область инфаркта включает две и более локализации).

8.2 Диагностические критерии.

Основным диагностическим критерием перенесенного инфаркта миокарда является наличие патологического зубца Q.

Диапазон патологических значений признака составляет:

- по длительности зубца Q: от $\geq 0,03$ с до $> 0,04$ с;
- по амплитуде: программа оценивает патологический ранг зубцов Q с амплитудой от 60мкВ;
- по $|Q/R|$ отношению: от $\geq 1/3$ до $> 1/4$ (включая форму QS).

Основным диагностическим критерием высокого заднего инфаркта является наличие доминантного зубца $R_{V1,V2}$ в сочетании с высокоамплитудным положительным зубцом Т в этих же отведениях.

Основным диагностическим признаком острой стадии инфаркта миокарда (при наличии патологического зубца Q) является подъем сегмента ST более 0,1мВ. Дополнительными признаками является наклон сегмента ST и амплитуда зубца Т.

Основным диагностическим признаком подострой стадии инфаркта миокарда (при наличии патологического зубца Q) является сочетание умеренного подъема ST сегмента и развитие отрицательной полуволны зубца Т.

Результаты измерений диагностических параметров ранжируются соответственно уровням диагностической точности заключений “высоко-достоверно...”, “вероятно...”, “возможно...”. Программа обеспечивает также динамическую подстройку порогов отдельных критериев, в зависимости от выраженности изменений других критериев.

8.3. Система диагностических заключений по группе “Инфаркты миокарда”.

8.3.1 Задне-нижние инфаркты миокарда:

- острый задне-нижний инфаркт миокарда;
- вероятно острый задне-нижний инфаркт миокарда;
- возможно острый задне-нижний инфаркт миокарда;
- задне-нижний инфаркт миокарда, вероятно острый;
- задне-нижний инфаркт миокарда, возможно острый;
- задне-нижний инфаркт миокарда подострой стадии;
- вероятно задне-нижний инфаркт миокарда подострой стадии;
- возможно задне-нижний инфаркт миокарда подострой стадии;
- старый задне-нижний инфаркт миокарда;
- задне-нижний инфаркт миокарда или изменения могут быть связаны с позиционным синдромом $Q_{III}-S_I$;
- вероятно старый задне-нижний инфаркт миокарда;
- возможно старый задне-нижний инфаркт миокарда;
- задне-нижний инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- вероятно задне-нижний инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- возможно задне-нижний инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- миокардиопатия может быть причиной патологических зубцов Q (добавление к заключениям группы “задне-нижние инфаркты миокарда» при наличии миокардиопатии в анамнезе).

8.3.2 Инфаркт миокарда боковой стенки:

- острый инфаркт миокарда боковой стенки;
- вероятно острый инфаркт миокарда боковой стенки;
- возможно острый инфаркт миокарда боковой стенки;
- инфаркт миокарда боковой стенки, вероятно острая стадия;
- инфаркт миокарда боковой стенки, возможно острая стадия;
- инфаркт миокарда боковой стенки подострой стадии;
- вероятно инфаркт миокарда боковой стенки подострой стадии;
- возможно инфаркт миокарда боковой стенки подострой стадии;
- старый инфаркт миокарда боковой стенки;
- вероятно старый инфаркт миокарда боковой стенки;
- возможно старый инфаркт миокарда боковой стенки;
- инфаркт миокарда боковой стенки неопределенного возраста;
- вероятно инфаркт миокарда боковой стенки неопределенного возраста;
- возможно инфаркт миокарда боковой стенки неопределенного возраста;
- миокардиопатия может быть причиной патологических зубцов Q (добавление к заключениям группы “боковые инфаркты миокарда» при наличии миокардиопатии в анамнезе).

8.3.3 Передне-перегородочный инфаркт миокарда:

- острый передне-перегородочный инфаркт миокарда;
- вероятно передне-перегородочный острый инфаркт миокарда;
- возможно передне-перегородочный острый инфаркт миокарда;
- передне-перегородочный инфаркт миокарда, вероятно острая стадия;
- передне-перегородочный инфаркт миокарда, возможно острая стадия;
- передне-перегородочный инфаркт миокарда подострой стадии;
- вероятно передне-перегородочный инфаркт подострой стадии;
- возможно передне-перегородочный инфаркт миокарда подострой стадии;
- передне-перегородочный старый инфаркт миокарда;
- вероятно передне-перегородочный старый инфаркт миокарда;
- возможно передне-перегородочный старый инфаркт миокарда;
- исключить передне-перегородочный инфаркт; изменения ЭКГ также могут быть связаны с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ);
- изменения ЭКГ в передне-перегородочной области, вероятно связаны с ГЛЖ, но наличие инфаркта нельзя исключить;
- QS-форма ЭКГ в правой группе грудных отведений, вероятно связана с ГЛЖ, но наличие инфаркта нельзя исключить;
- изменения ЭКГ в передне-перегородочной области, вероятно связаны с поворотом сердца по часовой стрелке, но наличие инфаркта нельзя исключить;

- миокардиопатия также может быть причиной патологических зубцов Q (добавление к заключениям группы “передне-перегородочные инфаркты миокарда” при наличии миокардиопатии в анамнезе).

8.3.4 Передний инфаркт миокарда:

- острый передний инфаркт миокарда;
- вероятно передний острый инфаркт миокарда;
- возможно острый передний инфаркт миокарда;
- передний инфаркт миокарда, вероятно острый;
- передний инфаркт миокарда, возможно острый;
- передний инфаркт миокарда подострой стадии;
- вероятно передний инфаркт миокарда подострой стадии;
- возможно передний инфаркт миокарда подострой стадии;
- старый передний инфаркт миокарда;
- вероятно старый передний инфаркт миокарда;
- возможно старый передний инфаркт миокарда;
- передний инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- возможно передний инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- вероятно передний инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- исключить передний инфаркт миокарда, изменения ЭКГ также могут быть связаны с гипертрофией левого желудочка;
- изменения ЭКГ в передней области вероятно связаны с ГЛЖ, но наличие инфаркта нельзя исключить;
- изменения ЭКГ в передней области вероятно связаны с поворотом сердца по часовой стрелке, но наличие инфаркта нельзя исключить;
- обратное развитие зубца R в отведениях (...);
- миокардиопатия может быть причиной патологических зубцов Q (добавление к заключениям группы “передние инфаркты миокарда” при наличии миокардиопатии в анамнезе).

8.3.5 Перегородочные инфаркты миокарда:

- перегородочный острый инфаркт миокарда;
- вероятно перегородочный острый инфаркт миокарда;
- возможно перегородочный острый инфаркт миокарда;
- вероятно перегородочный инфаркт миокарда подострой стадии;
- возможно перегородочный инфаркт миокарда подострой стадии;
- перегородочный старый инфаркт миокарда;
- вероятно перегородочный старый инфаркт миокарда;
- возможно перегородочный старый инфаркт миокарда;
- обратное развитие R в отведении V3;
- вероятно перегородочный инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- возможно перегородочный инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- исключить перегородочный инфаркт, изменения ЭКГ также могут быть с гипертрофией левого желудочка;
- изменения ЭКГ в перегородочной области вероятно связаны с ГЛЖ, но наличие инфаркта нельзя исключить;
- изменения ЭКГ в перегородочной области вероятно связаны с поворотом сердца по часовой стрелке, но наличие инфаркта нельзя исключить;
- миокардиопатия также может быть причиной патологических зубцов Q (добавление к заключениям группы “перегородочные инфаркты миокарда” при наличии миокардиопатии в анамнезе).

8.3.6 Задние (базальные) инфаркты миокарда:

- возможно задний инфаркт миокарда подострой стадии;
- возможно задний инфаркт миокарда, возраст не определен;
- добавления к заключениям из групп “задне-нижние инфаркты миокарда” и “боковые инфаркты миокарда”: “изменения в V1, V2 указывают на вовлечение в процесс высоких отделов задней стенки” или “высокий R в V1 вероятно отражает наличие инфаркта”.

8.3.7 Передне-боковые инфаркты миокарда:

- передне-боковой острый инфаркт миокарда;
- вероятно передне-боковой острый инфаркт миокарда;
- возможно острый передне-боковой инфаркт миокарда;
- передне-боковой инфаркт миокарда, вероятно острая стадия;
- передне-боковой инфаркт миокарда, возможно острая стадия;
- передне-боковой инфаркт миокарда подострой стадии;
- вероятно передне-боковой инфаркт миокарда подострой стадии;
- возможно передне-боковой инфаркт миокарда подострой стадии;
- старый передне-боковой инфаркт миокарда;
- вероятно старый передне-боковой инфаркт миокарда;
- возможно старый передне-боковой инфаркт миокарда;
- передне-боковой инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- вероятно передне-боковой инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- возможно передне-боковой инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- “миокардиопатия также может быть причиной патологических зубцов Q” - добавление к заключениям группы “передне-боковые инфаркты миокарда” при наличии миокардиопатии в анамнезе.

8.3.8 Обширные инфаркты миокарда

- обширный острый инфаркт миокарда;
- вероятно обширный острый инфаркт миокарда;
- обширный инфаркт миокарда, вероятно острый;
- обширный инфаркт миокарда, возможно острый;
- обширный инфаркт миокарда подострой стадии;
- обширный инфаркт миокарда подострой стадии;
- вероятно обширный инфаркт миокарда подострой стадии;
- обширный старый инфаркт миокарда;
- вероятно обширный старый инфаркт миокарда;
- обширный инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- вероятно обширный инфаркт миокарда неопределенного возраста;
- обширный инфаркт миокарда;
- дополнения:
 - “... с острыми изменениями в передне-боковой области”;
 - “... с острыми изменениями в задне-нижней и передне-перегородочной области”;
 - “... с острыми изменениями в задне-нижней и боковой области”;
 - “... с острыми изменениями в боковой области”;
 - “... с острыми изменениями в задне-нижней области”;
 - “... с острыми изменениями в передне-перегородочной области”;
- дополнение при наличии миокардиопатии в анамнезе: “миокардиопатия также может быть причиной патологических Q зубцов”.

9. Предварительные заключения, относящиеся к подъему ST-сегмента.

Заключения группы 9 состоят из двух блоков.

9.1 Первый блок “ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ” содержит информацию о локализации подъема ST сегмента и имеет стандартную формулировку: “подъем ST сегмента [локализация]”,

Параметр [локализация] может принимать следующие значения:

- задне-нижняя стенка;
- боковая стенка;
- передне-перегородочная область;
- передняя стенка;
- перегородка;
- передне-боковая стенка.

Наличие подъема в любых двух и более локализациях дает заключение “распространенный подъем ST сегмента”.

9.2 Второй блок "ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ" - содержит диагностические предположения о причине регистрируемых изменений:

- "...вероятно связанный с перикардитом", (при умеренном подъеме ST-сегмента в нескольких отведениях);
- "...возможно физиологичен для пациента данного возраста", (возраст <20 лет, малые изменения ST сегмента в сравнении с амплитудой R и T);
- "...повторить обследование при подозрении повреждения миокарда", (возраст >20 лет, умеренные изменения ST сегмента в сравнении с амплитудой R и T);
- "...вероятно связанный с распространением зоны инфаркта в боковую область", (изменения ST сегмента в отведениях от боковой стенки, наличие острого задне-нижнего, передне-перегородочного или переднего инфаркта миокарда);
- "...вероятно реципроктные изменения в отведениях V1, V2, V3", (при наличии задне-нижнего инфаркта);
- "...выраженные неспецифические изменения сегмента ST", (подъем ST-сегмента величиной до 0,2 мВ при отсутствии ГЛЖ, инфаркта миокарда и перикардита);
- "...умеренные неспецифические изменения сегмента ST", (подъем ST-сегмента величиной до 0,15 мВ при отсутствии ГЛЖ, инфаркта миокарда и перикардита);
- "...исключить синдром ранней реполяризации" (подъем точки J и другие признаки).

Пример комбинированного заключения: "Подъем сегмента ST в боковой области, вероятно связанный с распространением зоны инфаркта в боковую область".

10. Предварительные заключения, относящиеся к изменениям ST-T (инверсия зубца T и депрессия сегмента ST).

Заключения группы 10 состоят из блока "ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ", который содержит информацию о локализации и морфологии изменений, и блока "ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ", который содержит диагностическую информацию о причине регистрируемых изменений.

10.1. Блок "ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ" может содержать следующую информацию:

- ST-изменения в отведениях (*);
- ST-депрессия типа "соединение" в отведениях (*);
- обширные изменения ST сегмента;
- инверсия T зубца в отведениях (*);
- обширная инверсия зубца T;
- ST-T изменения в отведениях (*);
- обширные ST-T изменения (*), параметр [локализация] - см. раздел 9.

10.2. Блок "ПРИЧИНЫ ИЗМЕНЕНИЙ" может содержать следующую информацию:

- "...считать нормальным ювенильным зубцом T", (возраст <20 лет, инверсия зубца T в отведениях от передней стенки /перегородки);
- "...реципроктные или подозрительные в отношении ишемии миокарда";
- "...с высокой вероятностью связаны с ишемией или повреждением миокарда", (глубокий отрицательный зубец T в сочетании с горизонтальной депрессией ST сегмента);
- "...связаны с ишемией миокарда", (горизонтальная депрессия ST сегмента);
- "...вероятно неспецифического характера или связаны с ишемией миокарда", (ST депрессия типа "соединение").
- "...могут рассматриваться как неспецифические, при наличии патологии дыхательных путей", (изолированные изменения в отведениях I, II, III, при отсутствии позиционных изменений).
- "...не имеют существенного значения для женщин данного возраста", (инверсия T в отведениях от задне-нижней стенки и/или боковой стенки, возраст <35 лет);
- "...необычны для мужчин данного возраста, но не являются достоверно патологическими", (инверсия T в отведениях от задне-нижней стенки, возраст <30 лет);
- "...вероятно связаны с блокадой передней ветви левой ножки пучка Гиса" (без комментариев);
- "...вероятно связаны с блокадой задней ножки пучка Гиса" (без комментариев);
- "...могут быть частично связаны с высокой ЧСС" (при ЧСС >120 уд./мин);
- "...могут быть частично связаны с нарушениями ритма", (при наличии мерцания или трепетания предсердий);
- "...могут быть частично связаны с высокой ЧСС и нарушениями ритма" (при ЧСС >120 уд/мин и наличии мерцания или трепетания предсердий).

11. Предварительные заключения, относящиеся к изменению амплитуды QRS-комплекса:

- низкоамплитудные QRS в стандартных отведениях ($QRS < 500 \text{ мкВ}$);
- низкоамплитудные QRS в грудных отведениях ($QRS < 1 \text{ мВ}$ для всех грудных);
- низкоамплитудные QRS в стандартных и грудных отведениях ($QRS < 500 \text{ мкВ}$ для стандартных и $QRS < 1 \text{ мВ}$ для всех грудных).

12. Предварительные заключения, относящиеся высокому зубцу Т:

- высокий зубец Т, исключить гиперкалиемию (амплитуда зубца Т больше половозрастных нормативов);
- высокий зубец Т, исключить гиперкалиемию или ваготонию (то же при брадикардии);
- высокий зубец Т возможно связан с инфарктом миокарда (при наличии инфаркта миокарда амплитуда зубца T_{V3-V5} больше половозрастных нормативов).

13. Список основных параметров и заключений по анализу ритма и проводимости.

Заключения формируются на основе анализа 45-секундной записи ЭКГ.

13.1. Параметры ЧСС:

- средняя частота желудочковых сокращений в уд/мин;
- нерегулярность ритма в %;
- ритм кардиостимулятора.

13.2. Суправентрикулярные ритмы и комплексы:

- нормальный синусовый ритм;
- синусовая тахикардия;
- синусовая брадикардия;
- Общим критерием диагностики синусового ритма является наличие сцепленной с комплексом QRS волны Р, нормальная полярность волны Р, отсутствие дельта волн, наличие одного типа формы QRS комплекса.
- миграция суправентрикулярного водителя ритма, (изменение формы волны Р и PQ интервала в пределах записи);
- остановка синусового узла (пауза $> 2 \text{ с}$);
- эктопический предсердный ритм (вариация интервала $RR \leq 40\%$, $P_{II} < 0$, $PR \leq 80 \text{ мс}$);
- неопределенный предсердный ритм, (альтернация формы волны Р, ЧСС $< 100 \text{ уд/мин}$, альтернация QRS);
- многофокусная ("хаотическая") предсердная тахикардия, (альтернация формы волны Р, ЧСС $> 100 \text{ уд/мин}$, альтернация QRS);
- мерцание предсердий (наличие f волн, переменный RR интервал);
- мерцание или трепетание предсердий (переменный RR интервал, нет сцепленных с QRS Р-волн, волны трепетания не имеют однозначной классификации);
- вероятно мерцание или трепетание предсердий (то же, при меньшей достоверности заключения);
- трепетание предсердий с A-V проведением $N:1$, ($nF/RR = \text{целое число}$);
- трепетание предсердий с переменным A-V проведением, (nF/RR переменная величина для одной записи);
- бигеминия: синусовый ритм со сцепленными предсердными экстрасистолами (эктопический комплекс является предсердной экстрасистолой);
- предсердная тригеминия, (то же, для случая тригеминии);
- вероятно бигеминия, исключить мерцание предсердий, (при слабой выраженности сцепленных Р-волн);
- предсердные экстрасистолы, (интервал сцепления $\leq 80\%$, эктопический QRS имеет тип морфологии основного ритма и выраженную сцепленную волну Р);
- суправентрикулярные экстрасистолы, (то же, но Р- волна может не определяться);
- возможно заблокированные предсердные экстрасистолы, (Р-волна, после которой нет QRS, задержка более $0,3 \text{ с}$, при ЧСС $< 120 \text{ уд/мин}$).
- суправентрикулярные экстрасистолы с аберрантным желудочковым проведением, (морфология эктопического QRS отличается от морфологии QRS основного ритма);
- интерполированные предсердные экстрасистолы, (после предсердной экстрасистолы нет компенсаторной паузы);
- парные предсердные экстрасистолы, (без комментариев);
- парные предсердные экстрасистолы с аберрантным желудочковым проведением, (без комментариев);

- выскальзывающие предсердные комплексы, (интервал сцепления с комплексом основного ритма $>1,2$ характеристического значения RR интервала);
- выскальзывающие суправентрикулярные комплексы, (то же, но выскальзывающий комплекс QRS может не иметь сцепленной волны P);
- выскальзывающие суправентрикулярные комплексы с абберантным желудочковым проведением, (то же, но морфология выскальзывающего комплекса QRS отличается от морфологии комплексов QRS основного ритма);
- парные предсердные выскальзывающие комплексы, (без комментариев);
- парные суправентрикулярные выскальзывающие комплексы, (без комментариев);
- парные суправентрикулярные выскальзывающие комплексы, (без комментариев);
- парные суправентрикулярные выскальзывающие комплексы с абберантным проведением, (без комментариев).

13.3. Атриовентрикулярные узловые ритмы и комплексы:

- узловой ритм, ($nP/nQRS > 0,90$, RR вариация $\leq 40\%$, $P_{II} < 0$, $PR < 80\text{мс}$);
- ускоренный узловой ритм, (то же при $120 > ЧСС > 60$ уд/мин);
- узловой выскальзывающий (замещающий) ритм, (интервал сцепления между последним комплексом основного ритма и первым QRS комплексом выскальзывающего ритма $>1,2$ характеристического значения RR интервала основного ритма);
- узловые выскальзывающие комплексы, (без комментариев);
- узловые экстрасистолы (интервал сцепления $\leq 80\%$, эктопический комплекс с $P_{II} < 0$);
- узловой ритм с антероградной блокадой I степени, ($P_{II} < 0$, $PQ > 0,09\text{с}$);
- узловой ритм, активность предсердий не обнаружена, (без комментариев);
- узловая тахикардия ($120 > ЧСС > 60$ уд/мин, длительность QRS $> 120\text{мс}$);
- узловая тахикардия с абберантным желудочковым проведением ($120 > ЧСС > 60$ уд/мин, длительность QRS $> 120\text{мс}$);
- бигеминия: синусовый ритм со сцепленными узловыми экстрасистолами, (без комментариев).

13.4. Желудочковые ритмы и комплексы:

- идиовентрикулярный ритм, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, ЧСС > 40 уд/мин);
- ускоренный идиовентрикулярный ритм, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, ЧСС < 100 уд/мин);
- желудочковая тахикардия, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, ЧСС > 100 уд/мин);
- желудочковый выскальзывающий ритм, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, интервал сцепления между последним комплексом основного ритма и выскальзывающим ритмом $>1,2$ характеристического значения RR-интервала);
- желудочковые экстрасистолы, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, интервал сцепления $\leq 80\%$);
- желудочковые выскальзывающие комплексы, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, интервал сцепления $>1,2$ характеристического значения RR-интервала);
- парные желудочковые экстрасистолы, (без комментариев);
- парные желудочковые выскальзывающие комплексы, (без комментариев);
- абберантные комплексы, вероятно желудочковые экстрасистолы, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, интервал сцепления $> 0,8$ характеристического значения RR-интервала $< 1,0$);
- абберантные желудочковые комплексы, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, интервал сцепления $> 0,8$ характеристического значения RR-интервала $< 1,2$);
- желудочковые экстрасистолы с изменяющимся интервалом сцепления, исключить желудочковую парасистиолию, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, изменение интервала сцепления $> 80\text{мс}$);
- желудочковая бигеминия, (эктопическая QRS-желудочковая экстрасистола);
- альтернация QRS или желудочковые экстрасистолы, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, несколько типов морфологии QRS, интервал сцепления не определен, (при мерцательной аритмии));
- мультифокальные (полиморфные) желудочковые экстрасистолы, (длительность QRS $> 120\text{мс}$, несколько типов морфологии QRS, интервал сцепления $\leq 80\%$);
- интерполированные желудочковые экстрасистолы, (после экстрасистолы нет компенсаторной паузы).

13.5. Аномалии проведения в атриовентрикулярном соединении:

- A-V блокада I степени, (длительность PQ интервала превышает верхнюю границу пологовозрастных нормативов);
- A-V блокада II степени, тип Мобитц I, ($2,0 > nP/nQRS \geq 1,90$, минимальный PP интервал $> 120\text{мс}$, диапазон PR > 30 мс и другие признаки);

- A-V блокада II степени типа 2:1, ($nP/nQRS \geq 0,30$, минимальный PP интервал ≥ 300 мс, диапазон PR > 60 мс и другие признаки);
- полная A-V блокада, (ЧСС < 60 уд/мин, минимальный PP интервал ≥ 300 мс, диапазон PR > 60 мс и другие признаки);
- A-V диссоциация, (отсутствие взаимосвязи между ритмом предсердий и ритмом желудочков).

13.6. Основные дополнения к базовым заключениям:

- с синусовой аритмией;
- с периодами желудочковой бигеминии;
- с периодами бигеминии по типу желудочковых выскальзывающих комплексов;
- с периодами недоминантных сокращений;
- с залпом недоминантных сокращений;
- с периодами синусового ритма;
- с периодами суправентрикулярного экстрасистолического ритма с аберрантным желудочковым проведением;
- с периодами суправентрикулярного выскальзывающего ритма с аберрантным желудочковым проведением;
- с синдромом WPW;
- с периодами аберрантного желудочкового проведения;
- с периодами мультифокальных экстрасистол;
- с залпом комплексов различной формы;
- с миграцией предсердного водителя ритма к AV соединению.

Дополнения группы 13.6. в комплексе с базовыми ритмами формируют “комплексное заключение по ритму”

Примеры:

“Нормальный синусовый ритм с синусовой аритмией” или “Идиовентрикулярный желудочковый ритм с периодами синусового ритма” и т.п.

Приложение 4

НОРМЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ОЦЕНКИ ВАРИАБЕЛЬНОСТИ РИТМА

Параметры, измеряемые при анализе вариабельности ритма:

- ВРЕМЯ НАБЛЮДЕНИЯ	время наблюдения равно 3 минутам - не регулируется
- ВСЕГО RR-ИНТЕРВАЛОВ	количество RR-интервалов за время наблюдения
- ВСЕГО NN-ИНТЕРВАЛОВ	количество NN-интервалов за время наблюдения
- УСРЕДНЕННАЯ ЧСС	значение ЧСС усредненное за время наблюдения
- УСРЕДНЕННЫЙ RR-ИНТЕРВАЛ	RR-интервал усредненный за время наблюдения
- МАКСИМАЛЬНЫЙ RR-ИНТЕРВАЛ	максимальный RR-интервал за время наблюдения
- МИНИМАЛЬНЫЙ RR-ИНТЕРВАЛ	минимальный RR-интервал за время наблюдения
- ОТНОШЕНИЕ МАКС/МИН	отношение максимального RR-интервала к минимальному
- РАЗНОСТЬ МАКС - МИН (BP)	вариационный размах: разность максимального и минимального RR-интервала
- SD ЧСС	стандартное отклонение мгновенной ЧСС за время наблюдения
- SDNN	стандартное отклонение NN-интервала
- RMSSD	квадратный корень среднего значения квадратов разностей последовательных NN – интервалов
- NN50	число NN интервалов, отличающихся от соседних более, чем на 50 мс
- pNN50	отношение параметра NN50 к общему количеству NN интервалов в записи
- КОЭФФИЦИЕНТ ВАРИАЦИИ	коэффициент вариации RR-интервалов
- Mo	мода интервалов RR
- AMo	амплитуда моды интервалов RR
- ИН	индекс напряжения
- ВПР	вегетативный показатель ритма
- ИВР	индекс вегетативного равновесия
- ПАПР	показатель адекватности процессов регуляции
- SD1 скаттерграммы	значение короткой оси эллипса скаттерграммы
- SD2 скаттерграммы	значение длинной оси эллипса скаттерграммы

Оценка вариабельности ритма

Оценка ЧСС

ЭК может формировать следующие оценки ЧСС:

ВЫРАЖЕННАЯ БРАДИКАРДИЯ	$ЧСС < 50$
УМЕРЕННАЯ БРАДИКАРДИЯ	$50 \leq ЧСС < 60$
НОРМОКАРДИЯ	$60 \leq ЧСС < 75$
УМЕРЕННАЯ ТАХИКАРДИЯ	$75 \leq ЧСС < 90$
ВЫРАЖЕННАЯ ТАХИКАРДИЯ	$ЧСС \geq 90$

Оценка индекса напряжения (вегетативный тонус)

ЭК может формировать следующие оценки индекса напряжения:

ВАГОТОНИЯ	$ИН < 30$
НОРМОТОНИЯ	$30 \leq ИН \leq 90$
СИМПАТИКОТОНИЯ	$90 < ИН \leq 160$
ГИПЕРСИМПАТИКОТОНИЯ	$ИН > 160$

НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ

Если **ЭК** приобретен с модулем GSM и Вы планируете использовать его для передачи ЭКГ по каналам сотовой связи на удаленный компьютер с установленным программным модулем удаленного приема и анализа ЭКГ "ArMaSoft-12-Tele", то Вам необходимо выполнить следующие действия:

1. Приобрести у местного оператора сотовой связи SIM-карту.
2. Установить SIM-карту в модуль GSM.

Внимание! Все действия по установке SIM-карты производите при выключенном **ЭК**!

Для установки SIM-карты открутите 2 винта, крепящие модуль GSM, и извлеките его из **ЭК**. Установите SIM-карту в держатель и установите модуль GSM в **ЭК**.

3. Узнайте параметры FTP сервера, на который Вы планируете передавать ЭКГ.

Для настройки Вам потребуются следующие параметры FTP сервера:

- адрес FTP сервера;
- логин и пароль для доступа к FTP серверу.

4. После этого можно приступить к настройке беспроводной связи в **ЭК**.

Для того, чтобы войти в меню настройки беспроводной связи, включите **ЭК** при нажатой кнопке **5**.

На экране **ЭК** появится меню **НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ**, в котором Вам сначала нужно ввести пин-код SIM-карты. Для завершения ввода нажмите манипулятор.

Внимание! Постарайтесь ввести пин-код без ошибок. Если пин-код будет введен неправильно 3 раза, то SIM-карта будет заблокирована.

После ввода правильного пин-кода Вам станут доступны поля для ввода остальной информации:

APN: имя точки доступа мобильной сети передачи данных выбранного оператора сотовой связи. Ниже для примера приведены APN основных операторов сотовой связи:

MegaFon	internet
MTC	internet.mts.ru
BeeLine	internet.beeline.ru

FTP СЕРВЕР: адрес FTP сервера

FTP ЛОГИН: логин FTP сервера

FTP ПАРОЛЬ: пароль FTP сервера

Внимание! Ввод этой информации осуществляется только английскими буквами. Соответствие английских букв кнопкам **ЭК** приведено на экране. Для переключения ввода больших и маленьких букв используйте кнопку **СТАРТ РИТМ**, для стирания предыдущей позиции используйте кнопку **СТАРТ АВТ**.

Внимание! Значение **No** (IMSI номер SIM-карты - отображается на экране **ЭК** ниже пин-кода) необходимо ввести в ПО для ПЭВМ, которое будет осуществлять прием переданной Вами ЭКГ, как описано в руководстве пользователя этого ПО.

После завершения ввода всей информации нажмите кнопку **МЕНЮ/ВЫХОД**, на экране **ЭК** должно появиться сообщение: **НАСТРОЙКИ СОХРАНЕНЫ УСПЕШНО!** Повторное нажатие этой же кнопки приведет к выключению **ЭК**. Процесс настройки завершен.

После проведения настройки передача ЭКГ по каналам сотовой связи может осуществляться двумя способами:

- передача ЭКГ из памяти **ЭК**, как описано в п.11 **РАБОТА С ПАМЯТЬЮ**.
- автоматическая передача ЭКГ сразу после завершения регистрации. Для включения этого режима, в меню **ЭК**, в разделе **ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ/ПЕРЕДАЧА**, необходимо выбрать **GSM ПЕРЕДАЧА: ВКЛ**.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ТЕЛЕФОНА

При наличии модуля GSM с установленной SIM-картой и наличии подключенной гарнитуры, **ЭК** может работать в режиме телефона.

К модулю GSM может быть подключена стандартная гарнитура с раздельными разъемами микрофона и наушников.

Для включения режима телефона, в меню **ЭК**, в разделе **ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ/ПЕРЕДАЧА**, необходимо выбрать **GSM ОТВЕТ: ТЕЛЕФОН** или **ТЕЛ. АВТО**.

Если Вы выбрали **GSM ОТВЕТ: ТЕЛ. АВТО**, то **ЭК** будет переходить в режим телефона автоматически после **успешно завершенной** передачи ЭКГ, также перейти в режим телефона можно нажав на манипулятор в основной экранной форме.

После завершения передачи ЭКГ (или после нажатия на манипулятор) на экране **ЭК** появится меню **РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА**. В этом меню будут отображаться номера телефонов, записанных в SIM-карте, а также предложение набрать номер вручную. Номера, записанные в памяти SIM-карты, Вы можете удалять (кнопка **6**), редактировать или добавит новый номер (кнопка **5**).

Примечание: В новую SIM-карту оператор сотовой связи обычно записывает несколько номеров, которые будут отображаться на экране **ЭК**. Рекомендуется их удалить (кнопка **6**).

При помощи манипулятора выберите номер, на который Вы хотите совершить звонок (или введите номер вручную) и нажмите манипулятор. **ЭК** произведет вызов по этому номеру, и Вы при помощи гарнитуры сможете поговорить с выбранным абонентом.

Если в меню **ЭК** Вы выбрали **GSM ОТВЕТ: ТЕЛЕФОН**, то **ЭК** не будет автоматически переходить в режим телефона после передачи ЭКГ, а будет переходить в него при нажатии на манипулятор.

Пока **ЭК** находится в режиме телефона, он может принимать звонки на номер его SIM-карты. При этом будет звучать сигнал вызова и **ЭК** предложит Вам выбор: **ОТВЕТИТЬ** или **СБРОСИТЬ ВЫЗОВ**.

Выход из режима телефона осуществляется нажатием кнопки **МЕНЮ/ВЫХОД**.

Примечание: Если на удаленном пульте проводится оценка вероятности острой ишемии миокарда, то программа, при обработке полученной ЭКГ, запрашивает у пользователя информацию о наличии и характеристике болей у пациента. Эту информацию можно передать, связавшись с оператором, находясь в режиме телефона.

Если в меню выбрано **GSM ОТВЕТ: ВЫКЛЮЧЕН**, то вход в меню **ЭК** будет осуществляться и кнопкой **МЕНЮ/ВЫХОД** и нажатием на манипулятор, а при выборе любого другого варианта вход в меню **ЭК** будет осуществляться только кнопкой **МЕНЮ/ВЫХОД**.

РАБОТА В РЕЖИМЕ ПРИЕМА РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ЭКГ С УДАЛЕННОГО ПУЛЬТА

При наличии модуля GSM с установленной SIM-картой, **ЭК** может принимать отчет с результатами анализа ЭКГ с удаленного компьютера, где установлен программный модуль удаленного приема и анализа "ArMaSoft-12-Tele".

Для включения режима загрузки результатов, в меню **ЭК**, в разделе **ЗАПИСЬ В ПАМЯТЬ/ПЕРЕДАЧА**, необходимо выбрать **GSM ОТВЕТ: ТЕКСТ** или **ТЕКСТ АВТО**.

Если Вы выбрали **GSM ОТВЕТ: ТЕКСТ АВТО**, то **ЭК** будет переходить в режим загрузки результатов автоматически после **успешно завершенной** передачи ЭКГ, также перейти в режим загрузки результатов можно нажав на манипулятор в основной экранной форме.

После успешного завершения передачи ЭКГ (или после нажатия на манипулятор) на экране **ЭК** появится меню **ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ**. В этом меню **ЭК** будет посылать запросы на сервер и при появлении результатов анализа ЭКГ автоматически загрузит и распечатает их. После этого **ЭК** перейдет в основную экранную форму.

Запросы результатов анализа будут повторяться автоматически через определенные промежутки времени.

В меню **ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ** при ожидании результатов можно самостоятельно отправить запрос или перейти в **РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА**.

Выход из режима **ЗАГРУЗКА РЕЗУЛЬТАТОВ** осуществляется нажатием кнопки **МЕНЮ/ВЫХОД**.

Если в меню **ЭК** Вы выбрали **GSM ОТВЕТ: ТЕКСТ**, то **ЭК** не будет автоматически переходить в режим загрузки результатов после передачи ЭКГ, а будет переходить в него при нажатии на манипулятор.

При получении результатов в этом режиме их можно просмотреть перед печатью. Распечатка результатов будет осуществлена при выборе пункта **ПЕЧАТЬ**. При необходимости связаться с удаленным пультом для перехода в **РЕЖИМ ТЕЛЕФОНА**, нужно выбрать пункт **ТЕЛЕФОН**.

Примечание: Результаты анализа ЭКГ с удаленного пульта можно получить только на последнюю распечатанную ЭКГ. После выключения **ЭК** или съема другой ЭКГ, загрузка результатов не будет осуществлена. В случае необходимости повторной загрузки отчета с сервера, нужно распечатать из памяти нужную электрокардиограмму и войти в режим загрузки результатов.

Если в меню выбрано **GSM ОТВЕТ: ВЫКЛЮЧЕН**, то вход в меню **ЭК** будет осуществляться и кнопкой **МЕНЮ/ВЫХОД** и нажатием на манипулятор, а при выборе любого другого варианта вход в меню **ЭК** будет осуществляться только кнопкой **МЕНЮ/ВЫХОД**.

МЕТОДИКА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКИ

Условия калибровки

При проведении калибровки необходимо соблюдать следующие условия:

- температура окружающего воздуха: 20 ± 5 °С;
- атмосферное давление: 630 – 800 мм.рт.ст. (840 – 1067гПа);
- относительная влажность: $65 \pm 15\%$;
- напряжение питающей сети: $220 \pm 4,4$ В;
- частота питающей сети: $50 \pm 0,5$ Гц;
- на рабочем месте сетевые цепи для исключения электромагнитных помех разносят от входных цепей **ЭК** на расстоянии не менее одного метра;
- вблизи рабочего места отсутствуют источники электромагнитных помех.

Подготовка к калибровке

Перед проведением калибровки необходимо выполнить следующие работы:

- проверить на средствах калибровки наличие отметок об их поверке;
- ознакомиться с Руководством по эксплуатации на **ЭК**;
- подготовить к работе средства калибровки и проверяемый **ЭК** согласно руководствам по их эксплуатации.

1 Внешний осмотр

1.1 При проведении внешнего осмотра **ЭК** проверяют:

- наличие руководства по эксплуатации;
- комплектность в соответствии с руководством по эксплуатации;
- отсутствие механических повреждений, влияющих на его работоспособность;
- наличие и прочность крепления соединительных элементов;
- обеспечение чистоты разъемов кабеля отведений;
- четкость маркировки.

Примечание: Допускается проводить калибровку **ЭК** без запасных частей и принадлежностей, не влияющих на его работоспособность и на результаты калибровки.

2 Проведение калибровки

2.1 Общие положения

Периодическую калибровку проводят при помощи функциональных генераторов «ДИАТЕСТ», «ГФ-05» или аналогичных.

Для калибровки производят сравнения формы и амплитудно-временных параметров нормированных испытательных ЭКС, подаваемых с выходов функциональных генераторов с формой и амплитудно-временными параметрами этого сигнала на выходе **ЭК** по записи на бумажном носителе, которые должны соответствовать рисункам 2-4 и таблицам 1-2.

2.2 Определение идентичности формы сигнала и измерения его амплитудно-временных параметров

На выходах функционального генератора установите основной испытательный сигнал (рис. 1) с частотой 0,75 Гц, размахом 2,0 мВ на выходе (форма на рис. 2 и 3; таблицы 1-2).



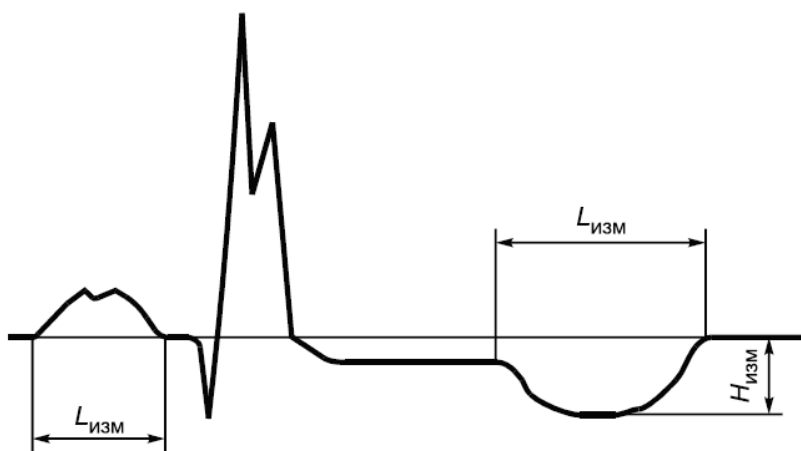


Рисунок 1
Форма испытательного сигнала

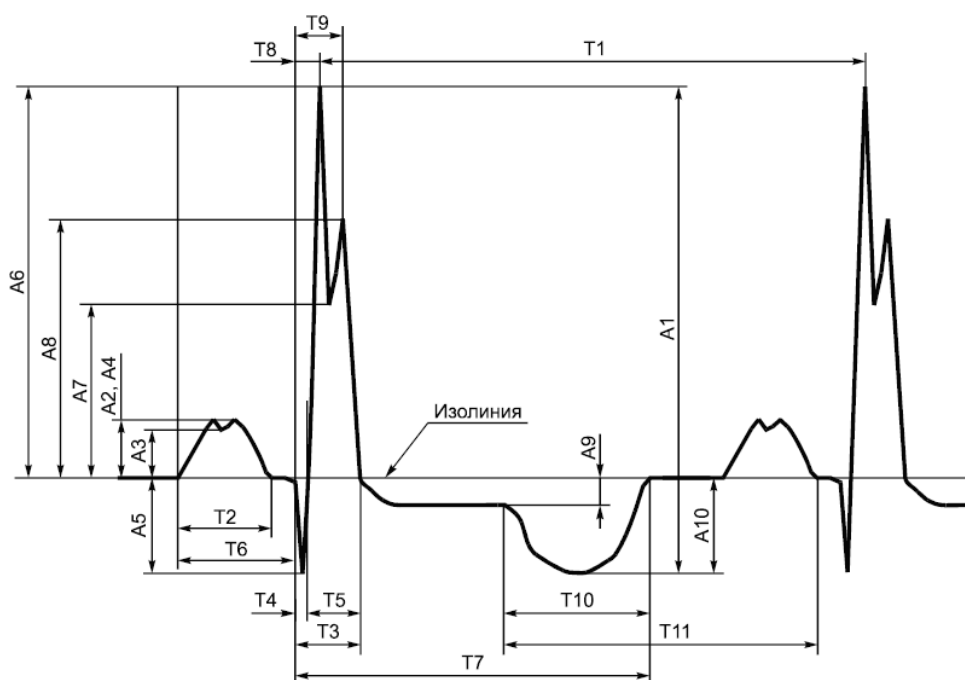

A1 - размах сигналов; A2 - амплитуда зубца P; A3 - амплитуда седловины зубца P; A4 - амплитуда зубца P'; A5 - амплитуда зубца Q; A6 - амплитуда зубца R; A7 - амплитуда седловины зубца R; A8 - амплитуда зубца R'; A9 - уровень сегмента ST; A10 - амплитуда зубца T; T1 - интервал RR; T2 - зубец P; T3 - комплекс QRS; T4 - зубец Q; T5 - зубец R; T6 - интервал PQ (PR); T7 - интервал QT; T8 - интервал внутреннего отклонения QRmax; T9 - интервал внутреннего отклонения QRmax; T10 - зубец T; T11 - интервал от начала T до окончания P

Рисунок 2
Наименования и обозначения амплитудно-временных параметров элементов
испытательного ЭКГ-сигнала в отведениях I, II, aVL, aVF, V1-V6

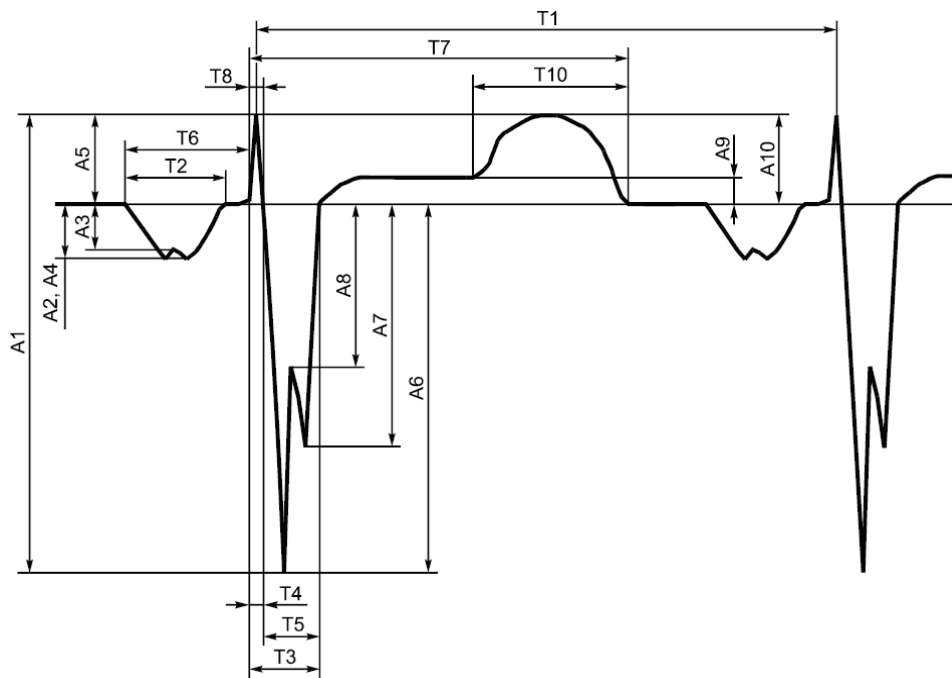

A1 - размах сигналов; A2 - амплитуда зубца P; A3 - амплитуда седловины зубца P; A4 - амплитуда зубца P'; A5 - амплитуда зубца R; A6 - амплитуда зубца S; A7 - амплитуда зубца S'; A8 - амплитуда седловины зубца S; A9 - уровень сегмента ST; A10 - амплитуда зубца T; T1 - интервал RR; T2 - зубец P; T3 - комплекс QRS; T4 - зубец R; T5 - зубец S; T6 - интервал PR; T7 - интервал QT; T8 - интервал внутреннего отклонения QRmax

Рисунок 3

Наименования амплитудно-временных параметров элементов испытательного ЭКГ-сигнала в отведении aVR

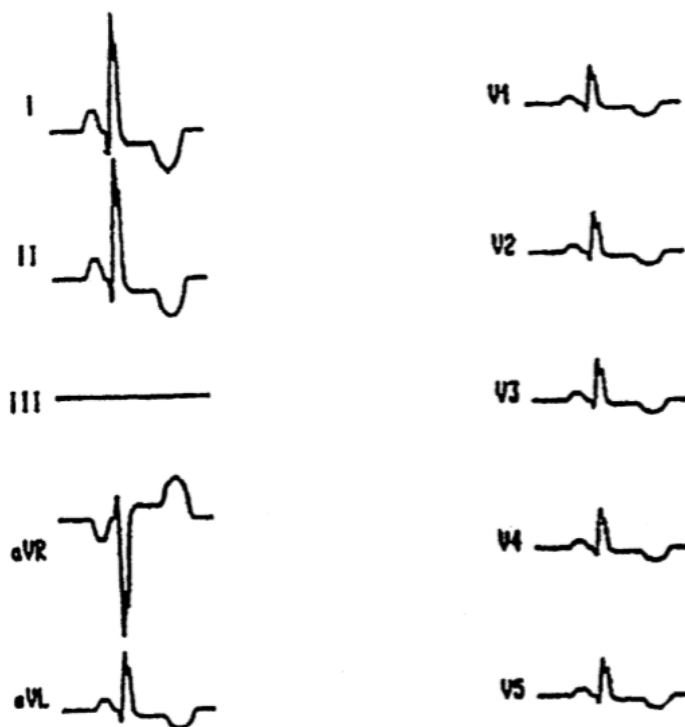


Рисунок 4

Форма и полярность регистрируемого испытательного ЭКГ-сигнала на выходе ЭК в общепринятых отведениях

Внимание! На ЭК при регистрации сигналов по данному пункту и далее любые фильтры выключают.

На ЭК включают режим полного анализа ЭКГ, устанавливают чувствительность 10мм/мВ и скорости движения бумаги 50 мм/сек, и проводят регистрацию тестового сигнала на бумаге.

По каждому отведению сравнивают распечатанные на бумаге значения амплитудно-временных параметров с таблицами 1-2, также сравнивают форму сигнала на записи с формой сигнала, изображенной на рисунках 2-4.

Таблица 1 Амплитудные параметры проверяемых отведений

Обозначение и наименование амплитудного параметра элемента ЭКГ-сигнала	Пределы допускаемой погрешности, %	Значение амплитуды элемента ЭКГ-сигнала на выходе ЭК, мкВ			
		I, II	aVR	aVL, aVF	V1 – V6
A1 Размах сигнала	10	2000±200	2000±200	1000±100	667±67
A2 Амплитуда зубца Р	15	234±35	- (234±35)	117±18	78±12
A3 Амплитуда седловины зубца Р	15	196±29	- (196±29)	98±15	65±10
A4 Амплитуда зубца Р'	15	234±35	- (234±35)	117±18	78±12
A5 Амплитуда зубца Q (в отведении aVR-зубца R)	15	- (394±59)	394±59	-(197±30)	- (131±20)
A6 Амплитуда зубца R (в отведении aVR-зубца S)	10	1605±161	- (1605±161)	803±80	535±54
A7 Амплитуда седловины зубца R (в отведении aVR-зубца S)	10	716±72	- (716±72)	358±36	239±36
A8 Амплитуда зубца R' (в отведении aVR-зубца S')	10	1068±107	- (1068±107)	534±53	356±53
A9 Уровень сегмента ST	25 мкВ	- (116±25)	116±25	-(58±25)	- (39±25)
A10 Амплитуда зубца Т	15	- (408±61)	408±61	-(204±31)	- (136±20)

Таблица 2 Временные параметры проверяемых отведений

Обозначение и наименование элемента ЭКГ-сигнала	Пределы допускаемой погрешности, %	Допускаемые значения длительности элемента ЭКГ-сигнала на выходе ЭК, мс		
		ном (вход)	мин	макс
T1 Интервал RR	5	1333,3	1266,4	1399,7
T2 Зубец Р (P1+P2)	7	132,7	123,4	142,0
T3 Комплекс QRS	7	104,2	96,9	111,5
T4 Зубец Q	7	30,5	28,4	32,6
T5 Зубец R (R1+R2)	7	73,3	68,2	78,4
T6 Интервал PQ(PR)	7	165,3	153,7	176,9
T7 Интервал QT	7	516,0	479,9	552,1
T10 Зубец Т	7	212,0	197,2	226,8

Если измеренные амплитудно-временные параметры соответствуют данным, представленным в таблицах 1-2, то ЭК признают годным по данному параметру.

2.3 Определение напряжения внутренних шумов, приведенного ко входу

Имитатор ЭКС переводят в состояние "выключен". Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу, определяют в каждом канале ЭК.

Органы управления ЭК устанавливают в следующее положение:

- чувствительность: 20 мм/мВ;
- скорость движения бумаги: 25 мм/с.

Осуществляют регистрацию сигнала в течение 5 с. Измеряют линейные размеры максимального размаха зарегистрированного сигнала шума.

Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу ($U_{ш}$), в мкВ, определяют по формуле:

$$U_{ш} = \frac{h_{изм.ш}}{S_{ном}} \cdot 1000,$$

где $h_{изм.ш}$ - измеренное на записи значение линейного размера максимального размаха шума, исключая ширину линии записи, мм (единичные выбросы размахом более 1,5 мм, появляющиеся реже одного раза в секунду, учитывать не следует);
 $S_{ном}$ - номинальное значение установленной чувствительности, мм/мВ.

Если значение напряжения внутренних шумов, приведенного ко входу, не превышает 30 мкВ, ЭК признают годным по данному параметру.

2.4 Определение диапазона и погрешности измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС)

На выходе имитатора ЭКС устанавливают испытательный сигнал «ЧСС-1» (рисунок 5а) с частотой 1 Гц и размахом 2,0 мВ.

Проводят регистрацию сигнала при установленных на ЭК значениях чувствительности 10 мм/мВ и скорости движения бумаги 50 мм/с. Убеждаются в соответствии формы воспроизводимого сигнала с формой сигнала, приведенной на рисунке 5а.

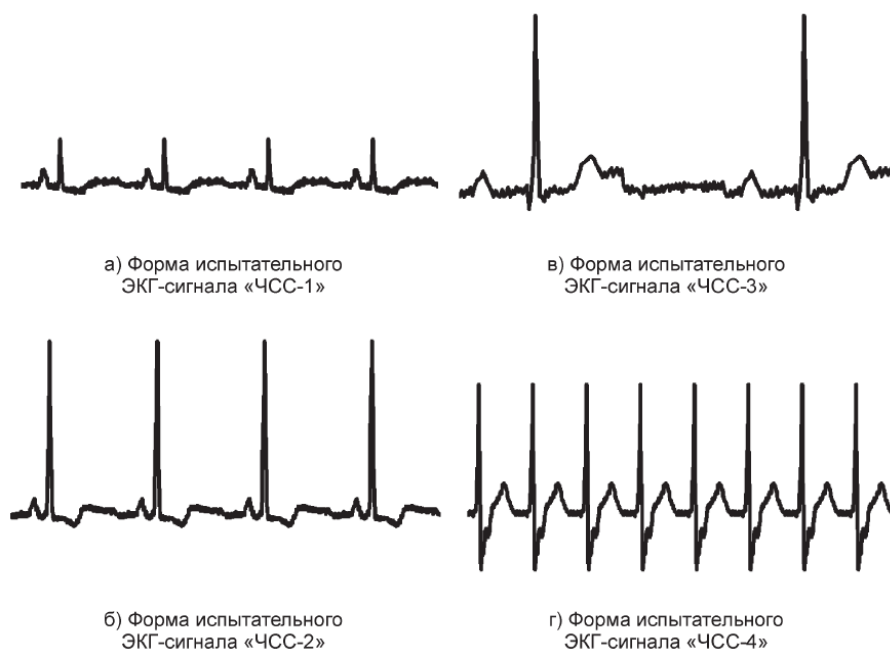


Рисунок 5
Формы испытательных ЭКГ-сигналов

На экране дисплея или на «распечатке» считывают измеренное значение ЧСС. Абсолютную погрешность измерений ЧСС ($\Delta\text{ЧСС}$) определяют по формуле

$$\Delta\text{ЧСС} = \text{ЧСС}_{изм} - \text{ЧСС}_{ном},$$

где $\text{ЧСС}_{изм}$ - измеренное ЭК значение ЧСС, мин^{-1} ;
 $\text{ЧСС}_{ном}$ - номинальное значение ЧСС, установленное на имитаторе ЭКС, мин^{-1} .

Аналогично проверяют форму сигнала и абсолютную погрешность измерений ЧСС при регистрации сигналов в соответствии с таблицей 3 и рисунками 5 б, в, г.

Таблица 3

Сигнал ЧСС		Значения ЧСС, мин ⁻¹	
Форма сигнала	Частота, Гц	Номинальное	Измеренное
ЧСС-1	1,0	60	
ЧСС-2	1,0	60	
ЧСС-3	0,5	30	
ЧСС-4	2,0	120	
ЧСС-4	3,0	180	
ЧСС-4	4,0	240	
ЧСС-4	5,0	300	

Если абсолютная погрешность измерения ЧСС не превышает ± 2 удара в минуту, то **ЭК** признают годным по данному параметру.

Электромагнитная совместимость

Электрокардиограф удовлетворяет требованиям ГОСТ Р МЭК 60601-1-2.

Внимание. Использование не рекомендованных принадлежностей и кабеля отведений может привести к увеличению помехоэмиссии или снижению помехоустойчивости прибора.

Внимание. Электрокардиограф нельзя использовать в близком контакте с другим оборудованием. Если такой контакт необходим, необходимо контролировать нормальную работу в конфигурации, в которой он будет использоваться.

Внимание. При эксплуатации прибора необходимо соблюдение специальных мер предосторожности, в той части, которая касается электромагнитной совместимости (ЕМС).
Установку и ввод прибора в эксплуатацию необходимо проводить в соответствии с информацией, указанной ниже.

Внимание. Функционирование прибора при более низких входных напряжениях, чем те, которые указаны в технических характеристиках на электрокардиограф, может привести к неточным результатам обследования.

Внимание. Портативное и мобильное RF (радиочастотное) коммуникационное оборудование может повлиять на работу электрокардиографа. Обратитесь к таблицам 1, 2, 3 и 4.

Таблица 1. Электромагнитные излучения

Электрокардиограф предназначен для работы в электромагнитной обстановке, описанной в приведенной ниже таблице. Покупатель или пользователь должен обеспечить, чтобы прибор применялся именно в такой обстановке.

Испытания на помехоэмиссию	Соответствие	Электромагнитная обстановка - указания
Индустриальные радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11	Группа 1	Электрокардиограф использует радиочастотную энергию только для выполнения внутренних функций. Уровень эмиссии радиочастотных помех является низким и, вероятно, не приведет к нарушениям функционирования расположенного вблизи электронного оборудования.
Индустриальные радиопомехи по ГОСТ Р 51318.11	Класс А	Электрокардиограф пригоден для применения во всех местах размещения иных, чем жилые дома и здания, непосредственно подключенные к распределительной электрической сети, питающей жилые дома.
Гармонические составляющие потребляемого тока по ГОСТ Р 51317.3.2	Класс А	
Колебания напряжения и фликер по ГОСТ Р 51317.3.3	Соответствует	

Таблица 2. Устойчивость к электромагнитным помехам

Электрокардиограф предназначен для работы в электромагнитной обстановке, описанной в приведенной ниже таблице. Покупатель или пользователь должен обеспечить, чтобы прибор применялся именно в такой обстановке.

Испытания на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия требованиям помехоустойчивости	Электромагнитная обстановка - указания
Электростатические разряды (ЭСР) по ГОСТ Р 51317.4.2	± 6 кВ контактный разряд ± 8 кВ воздушный разряд	± 6 кВ контактный разряд ± 8 кВ воздушный разряд	Полы помещения должны быть выполнены из дерева, бетона или керамической плитки. Если полы покрыты синтетическим материалом, то относительная влажность воздуха должна составлять не менее 30%.
Наносекундные импульсные помехи по ГОСТ Р 51317.4.4	±2 кВ для линий электропитания ±1 кВ для линий ввода-вывода	±2 кВ для линий электропитания Не применяют	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки.
Микросекундные импульсные помехи большой энергии по ГОСТ Р 51317.4.5	±1 кВ при подаче помехи по схеме «провод-провод» ±2 кВ при подаче помехи «провод – земля»	±1 кВ при подаче помехи по схеме «провод-провод» ±2 кВ при подаче помехи «провод – земля»	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки.
Динамические изменения напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11	<5% U_n (прерывание напряжения >95% U_n) в течение 0,5 и 1 периода 40% U_n (провал напряжения 60% U_n) в течение 5 периодов 70% U_n (провал напряжения 30% U_n) в течение 25 периодов 120% U_n (выброс напряжения 20% U_n) в течение 25 периодов <5% U_n (прерывание напряжения >95% U_n) в течение 5 с	<5% U_n (прерывание напряжения >95% U_n) в течение 0,5 и 1 периода 40% U_n (провал напряжения 60% U_n) в течение 5 периодов 70% U_n (провал напряжения 30% U_n) в течение 25 периодов 120% U_n (выброс напряжения 20% U_n) в течение 25 периодов <5% U_n (прерывание напряжения >95% U_n) в течение 5 с	Качество электрической энергии в электрической сети здания должно соответствовать типичным условиям коммерческой или больницы обстановки. Если пользователю прибора требуется непрерывная работа в условиях прерываний сетевого напряжения, рекомендуется обеспечить питание электрокардиографа от батареи или источника питания
Магнитное поле промышленной частоты по ГОСТ Р 50648	3 А/м	3 А/м	Магнитные поля на частоте сети питания должны быть на уровнях, характерных для коммерческой или больницы сети питания.

Примечание – U_n – уровень напряжения электрической сети до момента подачи испытательного воздействия.

Таблица 3. Соотношение испытательных уровней при испытаниях на помехоустойчивость, уровней помехоустойчивости и уровней соответствия требованиям помехоустойчивости

Электрокардиограф предназначен для работы в электромагнитной обстановке, описанной в приведенной ниже таблице. Покупатель или пользователь должен обеспечить, чтобы прибор применялся именно в такой обстановке.

Испытание на помехоустойчивость	Испытательный уровень по МЭК 60601	Уровень соответствия требованиям помехоустойчивости	Электромагнитная обстановка - указания
Расстояние между используемой мобильной радиотелефонной системой связи и любым элементом прибора, включая кабели, должно быть не меньше рекомендуемого пространственного разнosa, который рассчитывается в соответствии с приведенным выражением применительно к частоте передатчика. Рекомендуемый пространственный разнос составляет:			
Кондуктивные помехи, наведенные радиочастотными электромагнитными полями по ГОСТ Р 51317.4.6	3 В (среднеквадратическое значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц вне частот выделенных для ПНМБ ВЧ устройств ¹⁾	3 В (среднеквадратическое значение) в полосе от 150 кГц до 80 МГц вне частот выделенных для ПНМБ ВЧ устройств	$d = (1.17)\sqrt{P}$
Излучаемое радиочастотное электромагнитное поле по ГОСТ Р 51317.4.3	3 В/м от 80 МГц до 2,5 ГГц	3 В/м	$d = (1.17)\sqrt{P}$ от 80 МГц до 800 МГц $d = (2.33)\sqrt{P}$ от 800 МГц до 2.5 ГГц, где: d – рекомендуемый пространственный разнос в м ²⁾, P – номинальное значение максимальной выходной мощности в Вт в соответствии со значением, установленным изготовителем. Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных передатчиков по результатам наблюдений за электромагнитной обстановкой ³⁾ должна быть ниже, чем уровень соответствия в каждой полосе частот ⁴⁾. Помехи могут иметь место вблизи оборудования, маркированного знаком 

- 1) В полосе частот от 150 кГц до 80 МГц для ПНМБ ВЧ устройств выделены частоты: от 6,765 до 6,795 МГц, от 13,553 до 13,567 МГц, от 26,957 до 27,283 МГц, от 40,66 до 40,70 МГц.
- 2) Уровни соответствия требованиям помехоустойчивости в полосах частот, выделенных для ПНМ ВЧ устройств в участках от 150 кГц до 80 МГц и от 80 МГц до 2,5 ГГц, предназначаются для уменьшения вероятности того, что мобильные портативные радиотелефонные системы связи могут стать причиной нарушения функционирования, если они непреднамеренно оказываются расположенными слишком близко от оборудования. Для этого при расчетах рекомендуемого разнosa для передатчиков, работающих в этих полосах частот, используется дополнительный коэффициент 10/3.
- 3) Напряженность поля при распространении радиоволн от стационарных радиопередатчиков, таких как базовые станции радиотелефонных сетей (сотовых/беспроводных) и наземных подвижных радиостанций, любительских радиостанций, АМ и FM радиовещательных передатчиков, телевизионных передатчиков, не может быть определена расчетным путем с достаточной точностью. Для этого должны быть осуществлены практические измерения напряженности поля. Если измеренные значения в месте размещения прибора превышают применимые уровни соответствия, следует проводить наблюдения за работой электрокардиографа с целью проверки его нормального функционирования. Если в процессе наблюдения выявляется отклонение от нормального функционирования, то необходимо принять дополнительные меры, такие как переориентировка или перемещение прибора.
- 4) Вне полосы частот от 150 кГц до 80 МГц напряженность поля должна быть меньше, чем 3 В/м.

Примечания:

1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
2. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.
3. Дополнительный коэффициент 10/3 при расчетах рекомендуемого разнosa для передатчиков, работающих в полосах частот, выделенных для ПНМБ высокочастотных устройств в участках от 150 кГц до 80 МГц и от 80 МГц до 2,5 ГГц, предназначается для уменьшения вероятности того, что портативные подвижные радиочастотные средства связи могут стать причиной нарушения функционирования, если они непреднамеренно оказываются расположенными слишком близко от оборудования.
4. Приведенные выражения применимы не во всех случаях. На распространение электромагнитных волн влияет поглощение или отражение от конструкций, объектов и людей.
5. При определении рекомендуемых значений пространственного разнosa d для передатчиков с номинальной максимальной выходной мощностью, не указанной в таблице, в приведенные выражения подставляют номинальную выходную мощность в ваттах, указанную в документации изготовителя передатчика.

Таблица 4. Рекомендуемые значения пространственного разнosa между портативным и подвижным радиочастотными средствами связи и прибором.

Электрокардиограф предназначен для применения в электромагнитной обстановке, при которой осуществляется контроль уровней излучаемых помех.

Покупатель или пользователь прибора может избежать влияния электромагнитных помех, обеспечивая минимальный пространственный разнос между портативными и подвижными радиочастотными средствами связи (передатчиками) и электрокардиографом, как рекомендуется ниже, с учетом максимальной выходной мощности средств связи.

Номинальная максимальная выходная мощность передатчика, Вт	Пространственный разнос, м, в зависимости от частоты передатчика		
	в полосе от 150 кГц до 80 МГц вне частот, выделенных для ПНМБ ВЧ устройств	в полосе от 80 МГц до 800 МГц	в полосе 800 МГц до 2.5 ГГц
	$d = (1.17)\sqrt{P}$	$d = (1.17)\sqrt{P}$	$d = (2.33)\sqrt{P}$
0.01	0.117	0.117	0.233
0.1	0.37	0.37	0.74
1	1.17	1.17	2.33
10	3.70	3.70	7.37
100	11.70	11.70	23.30

Примечания:

1. На частотах 80 и 800 МГц применяют большее значение напряженности поля.
2. В полосе от 150 кГц до 80 МГц для ПНМБ ВЧ устройств выделены частоты: от 6,765 до 6,795 МГц, от 13,553 до 13,567 МГц, от 26,957 до 27,283 МГц, от 40,66 до 40,70 МГц.

СВЕДЕНИЯ О РЕМОНТЕ ИЗДЕЛИЯ

Дата ремонта	Перечень работ, проведенных при ремонте	Наименование ремонтной организации	Подпись